

## FR: Manuel du détecteur IR Gewa Androméda



## FR: Manuel français du détecteur infrarouge Gewa Androméda

### *Description*

Les détecteurs Gewa Androméda IR amplifient les signaux IR et transfèrent les informations vers la carte du récepteur. Les détecteurs sont disponibles avec des boîtiers différents pour montage à l'extérieur.

#### **01902 Gewa Androméda IR-DET 3**

Couvercle en plastique avec 3 m de câble blindé. Montage discret qui cache les vis.

Environnement: Intérieur et extérieur

Degrés de protection: IP-65

Taille: 70 x 42 x 28 mm.

Couleur: blanc polaire.



#### **419870 Gewa Androméda IR-DET**

Détecteur destiné à être monté sur un mur. Environnement:

Intérieur. Degrés de protection:

IP-21. Taille: 96 x 96 x 36 mm.

Couleur: blanc polaire.



#### **419875 Gewa Androméda IR-DET OEM**

Détecteur pour intégration

Taille: 49 x 20 x 19 mm.

Longueur du câble: 200 mm.

Matière: Métal



## **Localisation**

Si possible, choisissez un endroit où le détecteur est protégé contre les rayons directs du soleil, ce qui améliorera la portée. S'il vous plaît notez qu'il s'agit d'un système optique et, par conséquent, il ne doit y avoir aucun obstacle entre l'émetteur et le détecteur. À l'intérieur, la lumière est réfléchiée mais contre les murs, le plancher et le plafond. Les matériaux clairs sont de bons réflecteurs tandis que les matériaux sombres sont mauvais. Le verre laisse passer la lumière infrarouge.

## **Connexion**

Raccordez le détecteur conformément aux instructions pour chaque récepteur. NOTE! Pour les instructions de branchement, se référer aux couleurs des fils. Soyez prudent lorsque vous branchez le détecteur au récepteur. Une connexion incorrecte risque d'endommager le détecteur. Lorsque une rallonge du câble du détecteur (de type EKKX 1x2x0.5) est utilisée, la longueur maximale de câble est de 100 m.

*Attention! Lors du montage du Gewa Androméda IR-DET OEM, le boîtier du détecteur doit être isolé des matériaux électriquement conducteurs.*

*Attention! Les détecteurs contenues dans ce manuel ne peuvent être connectés qu'au récepteurs Gewa Androméda IR-ZREC.*

Service d'assistance technique :

**0 899 493 251**

**Service 0,60 €/min  
+ prix appel**



Développer l'espace de liberté

a AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden  
Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | [info@abilia.se](mailto:info@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)