


Guide utilisateur pour siège de douche NEPTUNE XL 300KG


Référence 20140



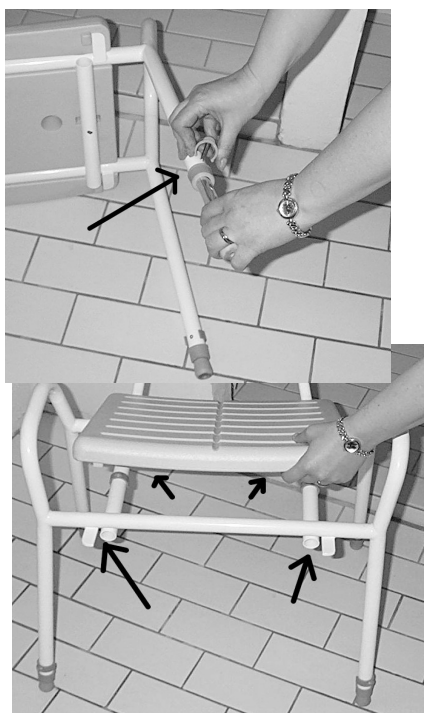

Pour ajuster la hauteur des pieds, retirez le clip. Déplacez le pied à la hauteur désirée puis réinsérez le clip. La même procédure est répétée sur l'autre pied. Différence maximale de 2 trous en biais

Le siège s'enclenche entre les 4 morceaux d'acier plat.

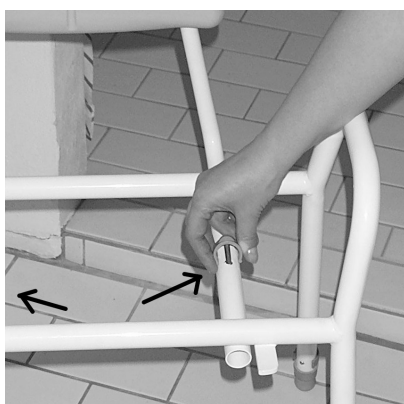

Monter le dossier. Le siège se détache et le dossier est poussé dans les deux pôles du dossier. Le dossier est maintenant placé dans la position souhaitée, puis placez les clips dans les trous et vous pouvez à nouveau clipser le siège.

Numéro Art.

300 kg Neptun Super Soft

20140

Charge max. 300 kg

Attention ! Poussez les clips vers le bas lors du réglage de la hauteur.

Attention ! Ne pas utiliser dans un environnement contenant du chlore comme les piscines, etc

2 ans de droits de plainte contre les erreurs de fabrication.

Conditions de réclamation pour le cadre

HMN accorde une période de 2 ans pour réclamer des droits contre la dégradation du cadre pour toutes les chaises de douche INOXLINE en acier inoxydable. La garantie s'applique pour la production et aux panes de matériaux. Elle ne peut être utilisée que si les produits ont été utilisés normalement. Veuillez noter que l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.

Nettoyage :

Le produit peut être nettoyé régulièrement, sans détergent non abrasif. Lavez et séchez le produit après le nettoyage. Le produit peut être lavé à 85 ° C en 3 minutes.



ZI du RECOU
F 69520 GRIGNY
Tel. : 04 72 24 08 99 Fax : 04 72 24 25 36
E-Mail : cree@cree.fr
www.cree.fr