



VELA Salsa

VARIANTES:

100/110/120/130/400

Numéro de manuel 105034



VELA Salsa 100



VELA Salsa 110



VELA Salsa 130



VELA Salsa 120



VELA Salsa 400

TABLE DES MATIÈRES

1.0. INTRODUCTION	3
1.1. SÉCURITÉ	4
1.1.1. Transport	4
1.2. GARANTIE	4
1.3. DÉPAQUETER LE FAUTEUIL	5
1.4. ENTRETIEN	5
1.4.1. Roues	5
1.4.2. Armature	5
1.4.3. Rembourrage	5
1.5. MANUEL D'UTILISATION	6
1.5.1. Réglage de la hauteur du siège	6
1.5.2. Réglage de la hauteur du siège (Salsa 130 & 400)	6
1.5.3. Réglage de l'inclinaison du siège	6
1.5.4. Réglage de l'inclinaison du siège (Salsa 130 & 400)	6
1.5.5. Frein	7
1.5.6. Réglage de la hauteur du dossier	7
1.5.7. Réglage de l'inclinaison du dossier	7
1.5.8. Réglage de l'accoudoir, la hauteur	7
1.5.9. Réglage de l'accoudoir, l'épaisseur	8
1.5.10. Rotation (en option)	8

1.0. INTRODUCTION

CHER(E) CLIENT(E)

Nous vous remercions d'avoir acheté un VELA Salsa. Ce manuel d'utilisation contient les informations utiles concernant la mise en position, le mode d'emploi et l'entretien des fauteuils VELA Salsa.

Important

Veillez lire ce manuel attentivement et le sauvegarder pour une utilisation ultérieure. Ce manuel est un accompagnement obligatoire du fauteuil. Vous trouverez également le manuel d'utilisation sur le site web de VELA : www.vela.eu. Sur le site, vous trouverez aussi d'autres informations pertinentes sur les fauteuils VELA Salsa.

N'hésitez pas de contacter le distributeur de VELA de votre pays, si vous avez des questions.

VELA se réserve le droit de modifier ce manuel.

VELA

Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg
Denmark
www.vela.eu

GÉNÉRAL

1.1. SÉCURITÉ

Ce fauteuil qui porte le marquage « CE » est conforme aux lois à la législation de l'UE en vigueur en la matière. Le fauteuil est fabriqué par VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV, Denmark.

VELA Salsa est un fauteuil d'intérieur conçu pour personnes assises.

VELA Salsa 100/110/120/130/400 sont testés et approuvés pour un poids maximum de 125 kg.

1.1.1. TRANSPORT

Activez le frein du fauteuil lors d'un transport par voiture, par avion ou tout autre moyen de transport. Le fauteuil n'est pas approuvé comme siège de passager dans les moyens de transport et ne doit jamais être utilisé comme tel.

Le fauteuil supporte les spécifications de transport suivantes :

Température : -40°C (-40°F) à +70°C (+158°F).

Humidité : 15-95%.

Pression atmosphérique: PPP jusqu'à 1000 metres (3280 ft) au dessus la surface de la mer

1.2. GARANTIE

VELA accorde sur ses produits une garantie selon les lois et la réglementation qui sont en vigueur dans le pays où le fauteuil a été acheté. La garantie est applicable uniquement quand les pièces de rechange et l'accessoire d'origine sont utilisés. Toute modification du fauteuil doit être faite par un technicien de service autorisé.

VELA n'assume pas la responsabilité des dégâts ou des dommages qui sont survenus à cause :

- :: Du transport
- :: Du mauvais usage
- :: De l'usure
- :: D'un usage non correcte
- :: D'une utilisation des pièces de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas ceux d'origine
- :: Des modifications faites par des techniciens de service non-autorisés

1.3. DÉPAQUETER LE FAUTEUIL

VELA Salsa est fourni dans un emballage de carton, développé avec soin et considération pour l'environnement.

S'il y a des pièces manquantes ou de dégâts à lors du transport du fauteuil, veuillez contacter votre distributeur immédiatement. N'essayez pas de réparer le fauteuil vous-même ou de l'utiliser.

Contenu de l'emballage en carton :

- :: Fauteuil VELA Salsa
- :: Manuel d'utilisation

1.4. ENTRETIEN

Nous recommandons un service de réglage annuel de votre VELA Salsa pour repérer, par exemple, des parties usées ou défectueuses.

1.4.1. ROUES

VELA recommande que les roues soient contrôlées à intervalles réguliers pour enlever des restes de tissu par exemple.

1.4.2. ARMATURE

Lavez à l'eau, si possible avec un savon à l'acide neutre.

1.4.3. REMBOURRAGE

Stof: Nettoyez avec un produit pour le nettoyage des meubles rembourrés ou essuyez le siège avec un chiffon rincé à l'eau pure et bien essoré.

Le similicuir : Nettoyez à l'eau ou avec un savon doux.

Textiles médicaux : Nettoyez comme décrit ci-dessus. Les textiles médicaux peuvent également être nettoyés avec un désinfectant et de l'alcool.

Cuir : Nettoyez avec la brosse douce de l'apirateur. Évitez les produit de nettoyage.

1.5. MANUEL D'UTILISATION

Le vérin à gaz doit uniquement être remplacé par l'équipe de service de votre distributeur ou une personne compétente.




1.5.1. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Poussez le levier situé à main droite pour régler la hauteur du siège



1.5.2. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE (SALSAS 130 & 400)

Poussez avec votre main le levier situé à gauche pour régler la hauteur du siège.

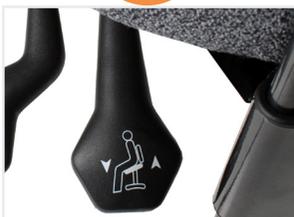

1.5.3. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU SIÈGE

Poussez le levier situé au milieu pour régler l'inclinaison du siège.



1.5.4. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU SIÈGE (SALSAS 130 & 400)

Poussez le levier situé à droite pour régler l'inclinaison du siège.



1.5.5. FREIN

Poussez le levier sur le coté en avant pour freiner le VELA Salsa. Pour débloquer le fauteuil retournez le levier dans sa position verticale.

Note : Desserrez la vis situé en bas du levier du frein pour déplacer le frein, enlevez le bouton en plastic situé dans le trou opposé et insérez le levier du frein. N'oubliez pas de resserrer la vis après.



1.5.6. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER

Utilisez le levier situé derrière le dossier pour régler l'inclinaison du dossier. N'oubliez pas de serrer la poignée après l'avoir ajustée.



1.5.7. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

Poussez le levier arrière à droite pour régler l'inclinaison du dossier.



1.5.8. RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR, LA HAUTEUR

Desserrez la vis sur la barre de l'accoudoir pour régler la hauteur de l'accoudoir. N'oubliez pas de resserrer la vis après.



1.5.9. RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR, L'ÉPAISSEUR

Desserrez la vis situé sous le siège pour régler l'épaisseur de l'accoudeoir. N'oubliez pas de resserrer la vis après.



1.5.10. ROTATION (EN OPTION)

La rotation du siège se fait en tirant sur le levier situé devant à gauche.