

**MANUEL D'UTILISATION FAUTEUIL DOUCHE/WC INOXLINE**

**TOUS REGLAGES ELECTRIQUES**

**Réf 20090 avec dossier filet**

**Réf 20100 avec dossier PU**



## IMPORTANT!

Lorsque vous recevez votre chaise douche INOXLINÉ, faire ce qui suit :

1. Chargez complètement les batteries
2. Faire un reset électrique (voir plus bas)

Les batteries au Lithium sont sensibles au froid, donc faire de même après un long stockage dans un lieu froid.



La prise électrique se trouve sous le capot blanc à l'avant de la chaise. Insérer cette prise sur votre prise murale pour recharger. Le capot blanc doit toujours être réinstallé avant chaque douche. Il se démonte ou se remonte sans besoin d'outils.

Si les 2 vérins ne montent pas simultanément, ceci peut endommager la chaise INOXLINÉ. Activez alors la descente d'urgence (voir plus loin) et descendre au plus bas possible avant de relâcher la pression sur la télécommande.

NB! Ne pas utiliser les fonctions électriques lorsque le jet d'eau est dirigé sur le fauteuil.


NB ! Si la prise électrique a été mouillée durant la douche ou le séchage, la sécher complètement avant toute recharge.

NB! Ne pas utiliser dans un sauna !

	Class I Equipment
IPX6	Ingress Protection Rating X6
	Patient part of type B

Données électriques : i.e. 100240 Vac 50-60 Hz 400 mA/ Out : 24Vdc, 250 V

**A**


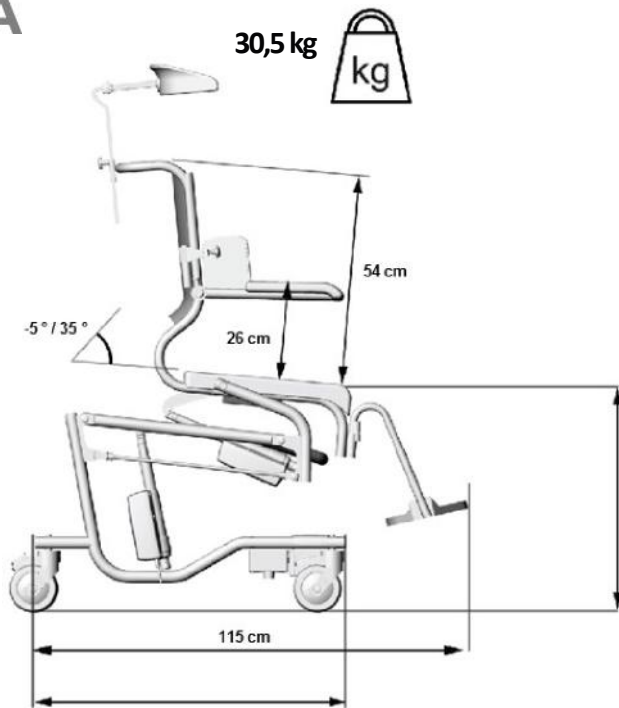


Durée de vie : 10-15 ans, sauf B


Min. 49 cm/Max. 95 cm




**B**

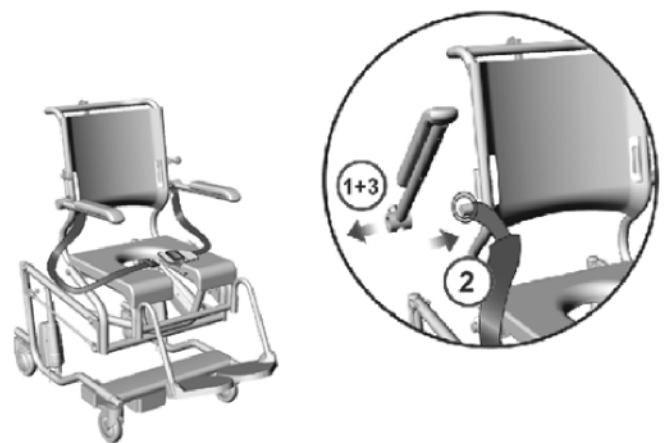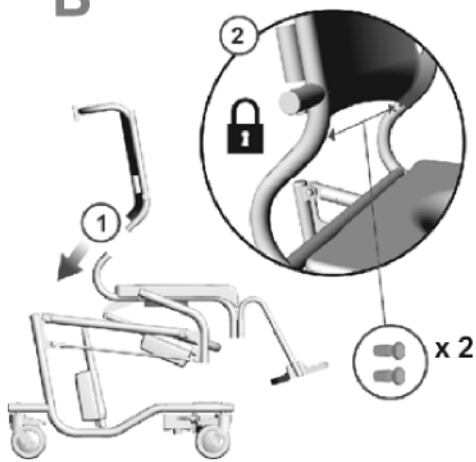

**C**

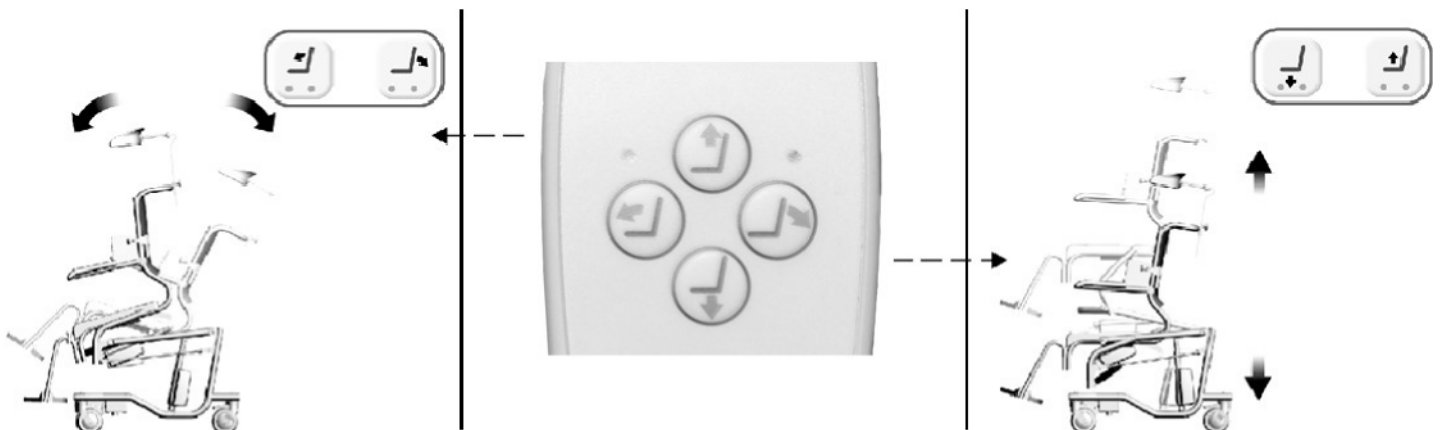

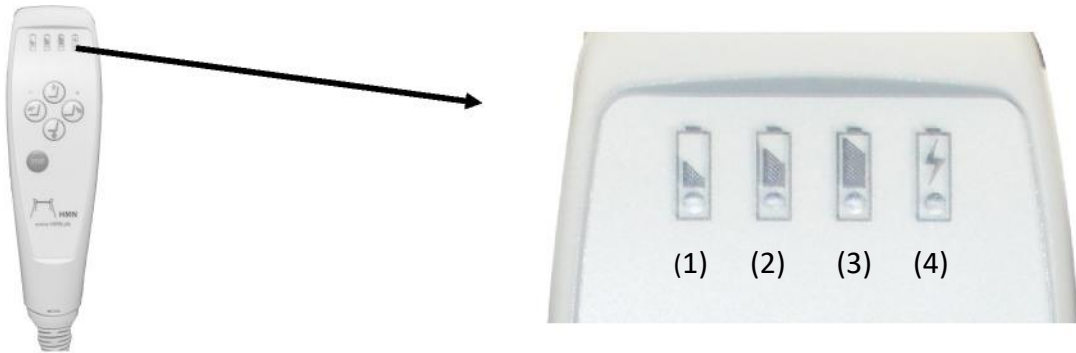


**Diode sur la télécommande :**

1. Si toutes les diodes (1-6) clignotent - ATTENTION – Erreur ! Effectuer un Reset (voir ci-après). Si le problème persiste, stopper tout et contacter le SAV CREE.
2. Si les diodes (5) et (6) sont allumées, cela signifie que l'arrêt d'urgence a été activé.
3. Lors de la recharge, si la diode (4) reste allumée, la recharge est terminée ? Si elle clignote, la recharge est en cours.
4. Mode économie de batterie. Les diodes s'éteignent automatiquement si la télécommande reste inutilisée.

Il est possible de connaître l'état de charge de la batterie à l'aide des diodes de la télécommande (1, 2, 3) de la façon suivante : Diode (1) allumée = 10 - 20 %, Diode (2) = 21 - 40 %, Diode (3) = 41 - 100 %. La chaise doit être rechargée lorsque les diodes (2) ou (1) s'allument. Lors de la recharge, la diode (4) reste allumée, suivie de quelques clignotements pour une courte période. Une recharge complète dure à peu près 12 heures.

NB! Il ne faut pas utiliser la chaise INOXLINE lors de la recharge.

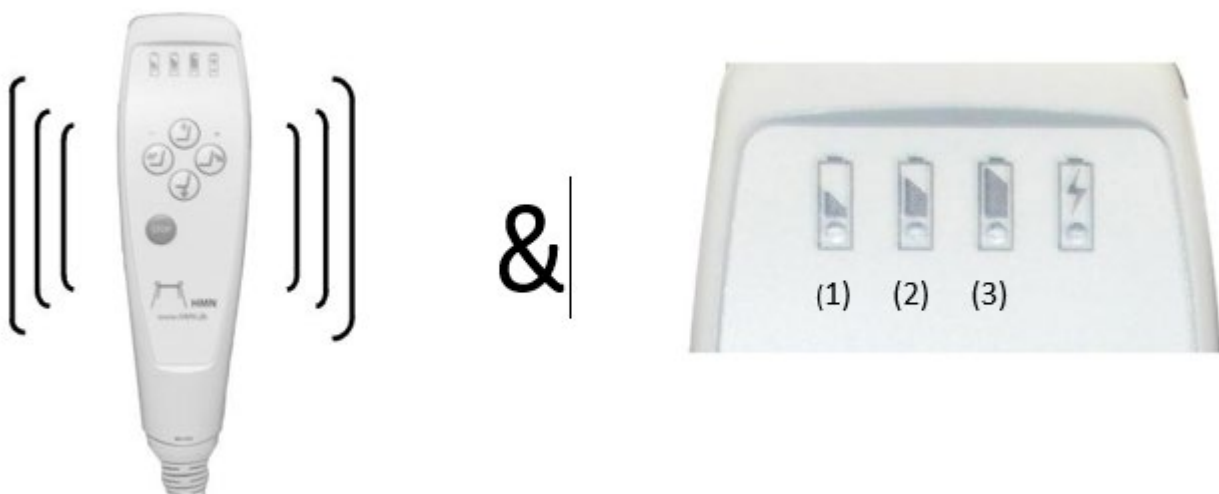

**Manque de puissance :** Lorsque la diode (3) s'éteint ainsi que la diode S, et qu'il ne reste plus que les diodes (2) et / ou (1) allumées, la chaise commence à bipper. Elle manque alors de charge et doit être rechargée (voir plus haut).



**Batteries :** Lorsque vous recevez une chaise INOXLINE, elle a quitté son site de production totalement chargée. Mais une perte de charge peut survenir durant le transport ou le stockage, auquel cas la chaise ne doit pas être utilisée avant une recharge complète (12 heures, jusqu'à l'extinction de la diode de charge).


**Perte de puissance :** Si la chaise n'est pas utilisée plusieurs semaines, elle va perdre de sa puissance à hauteur de 1'A à 2'A par jour à une température comprise entre 10° et 30° Celsius.

Si la température est inférieure à 10°, la batterie se déchargera en moins de 24h00.



**Arrêt d'urgence :** En cas d'urgence, le système électrique de la chaise peut être coupé en pressant le bouton rouge "STOP" jusqu'à ce qu'il bippe et que les diodes (5) + (6) s'allument. Cette fonction sera désactivée en pressant le bouton (7) situé sur le boîtier électrique au bas de la chaise

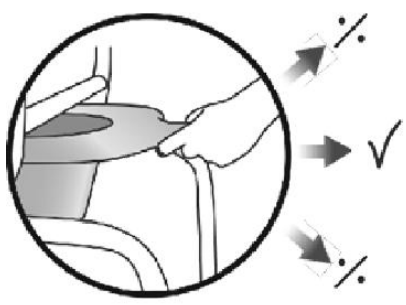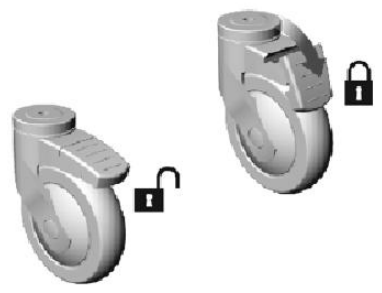

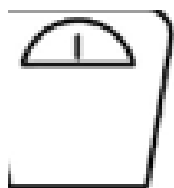


Max 150 kg.

~~0.5%~~ ~~0.5%~~

|  
80°C  
180°F

3 min 3 min

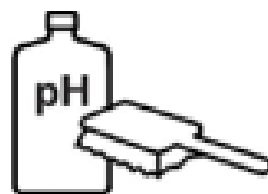

Min 5 - Max 9

Si l'utilisateur ne peut pas poser ses bras sur les accoudoirs, il doit les poser sur ses cuisses pendant la manipulation de la chaise.



G



**Descente d'urgence.** Si la télécommande ne veut pas descendre l'assise, appuyer sur le bouton de descente d'urgence situé sur le boîtier électrique au bas de la chaise jusqu'à arriver en position la plus basse. NB! Cette operation démarre 5 secondes après avoir entendu les 5 bips.  
NB! La diode de puissance clignote lorsque le bouton d'urgence est pressé.




**Faire un reset.** Si toutes les diodes clignotent, il y a une erreur système. Il faut alors appuyer sur le bouton "STOP" de la télécommande jusqu'à ce que les 2 diodes de flèches s'allument. Ensuite presser le bouton d'urgence sur l'arrière du boîtier électrique en bas de la chaise jusqu'à la descente complète de l'assise et le dossier en position la plus en arrière.

A présent, la chaise fonctionne à nouveau.


NB! La chaise ne descendra que 5 secondes après que la commande aie bipé 5 fois.



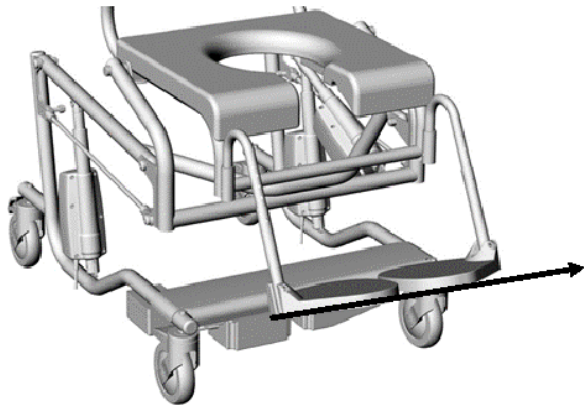

**Diodes boîtier électrique – sous le capot blanc.** Si la diode (1) du boîtier électrique s'allume en vert, la prise de charge est branchée. Si aucune lumière, pas de branchement.



Si la diode (2) s'allume en jaune, la chaise se recharge. Si aucune lumière, la chaise est complètement rechargée.

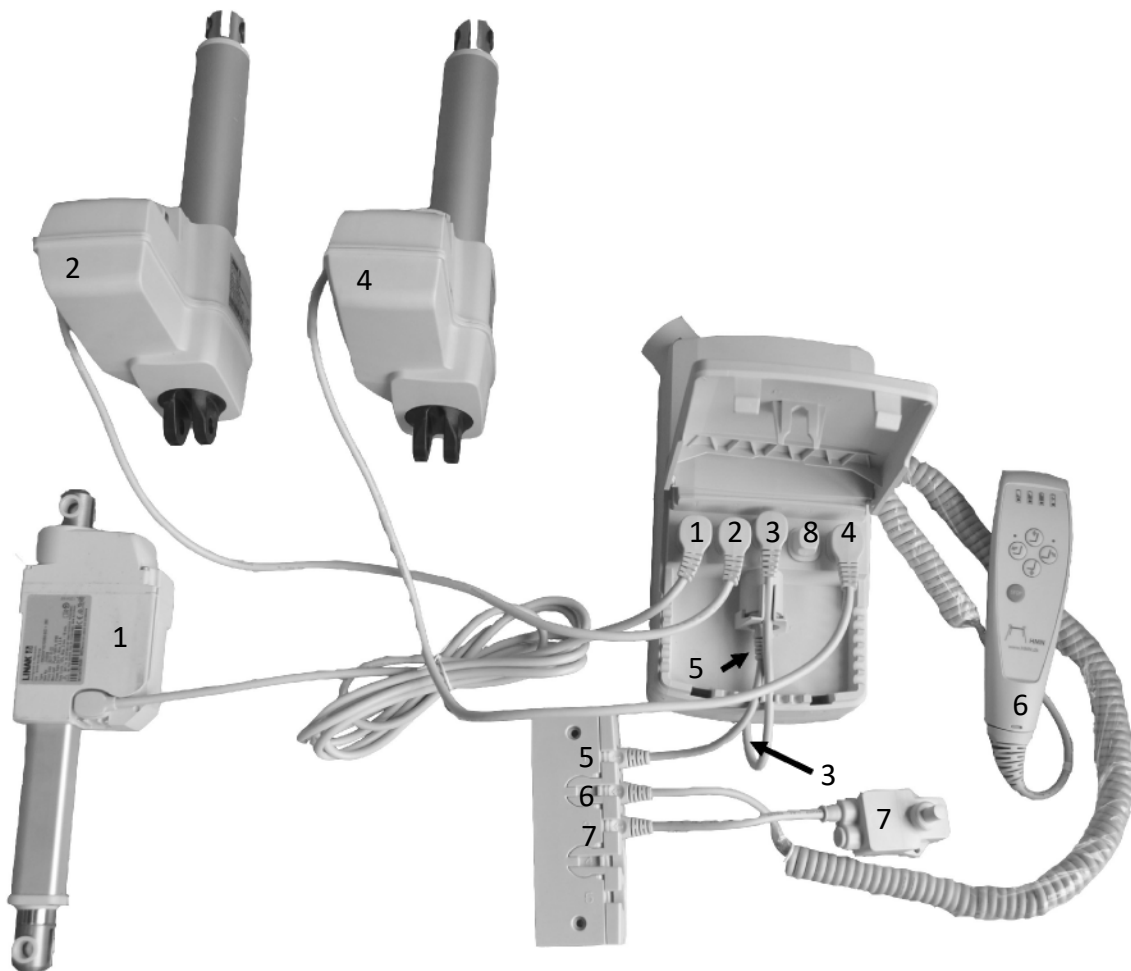

### Connexion des cables.

1. Cable vers vérin arrière (inclinaison)
2. Cable vers vérin de droite (hauteur)
3. Cable vers batterie
4. Cable vers vérin de gauche (hauteur)
5. Cable vers boîte de jonction
6. Cable vers télécommande
7. Cable vers descente d'urgence
8. Branchement aveugle

Réf 20090 : Dossier souple (filet)	Réf 20100 : Dossier polyuréthane
<p><b>Charge Max. 150 kg</b></p> <p><b>Attention !</b> Ne pas utiliser en environnement fortement chloré comme les piscines. 2 ans de garantie sur les pièces mécaniques. 6 mois sur les batteries.</p> <p><b>Plaintes relatives au châssis</b></p> <p>Châssis garanti 5 ans contre toute rupture, si utilisation normale du produit. L'usure normale du produit ou les déchirures ne sont pas garanties.</p>	<p><b>Nettoyage</b></p> <p>Nettoyer et sécher la chaise INOXLINÉ après chaque douche. INOXLINÉ peut être désinfecté avec de l'eau à 85° durant 3 minutes.</p>

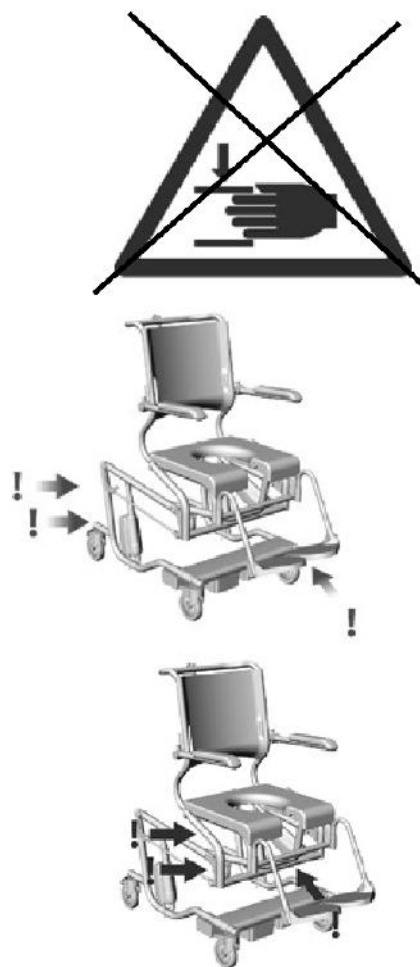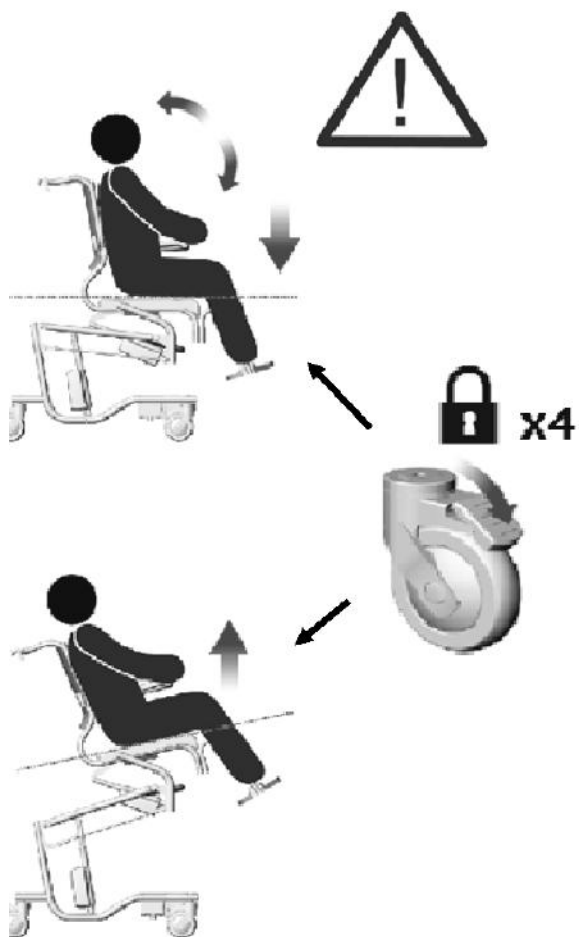



ZI du RECOU  
F 69520 GRIGNY  
Tel. : 04 72 24 08 99 Fax : 04 72 24 25 36  
E-Mail : [cree@cree.fr](mailto:cree@cree.fr)  
[www.cree.fr](http://www.cree.fr)