

Guide utilisateur pour siège de douche/toilette INOXLINE ELECTRIQUE XL 300kg

Référence 20144

Prévu pour une utilisation durant la douche/ le bain / les toilettes



IMPORTANT!


- LORS DU RECHARGEMENT, NE PAS ALLUMER L'INTERRUPTEUR AVANT QUE LE CHARGEUR SOIT CONNECTÉ À LA CHAISE.
- LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE 24 HEURES LA PREMIÈRE FOIS.
- LORSQUE LA BATTERIE EST DECHARGÉE, UN BIP SONORE EMANE DE LA BOÎTE DE COMMANDE LORS DE L'UTILISATION DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES.
- LORSQUE LE BIP SONORE VIENT, VOUS DEVEZ RECHARGER LA BATTERIE CAR ELLE PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉE SI VOUS LA LAISSEZ SE DECHARGER À 100%.
- SI LA BATTERIE EST ALIMENTÉE, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LE MOTEUR EN METTANT LE CHARGEUR DANS LA PRISE MURALE ET LA CHAISE. UNE RECHARGE COMPLETE PREND TYPIQUEMENT 8 HEURES.
- SI LE BOUTON D'ÉCLAIRAGE DU CHARGEUR S'ALLUME VERT UNE FOIS RACCORDÉ, CELA SIGNIFIE UNE DÉFAILLANCE DE LA BATTERIE ET PAR CONSÉQUENT, IL FAUT LA CHANGER.





Lors du montage de l'accoudoir, le verrou à pression est levé, puis l'appui-bras est relevé et poussé sur le côté.



Verrouillez les quatre roues lorsque vous prenez un bain ou une douche. La roue avant droite (verte) peut être verrouillée directionnellement pour faciliter la conduite.

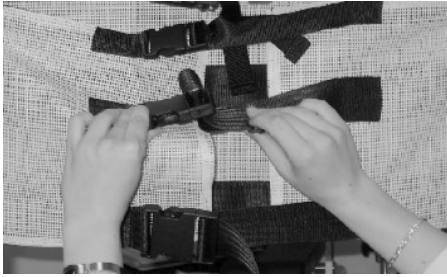


Réglage du dossier (voir photos). Important ! Lavage du dossier max. à 80 degrés.

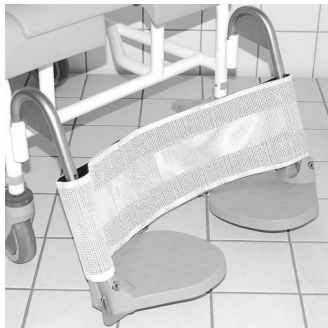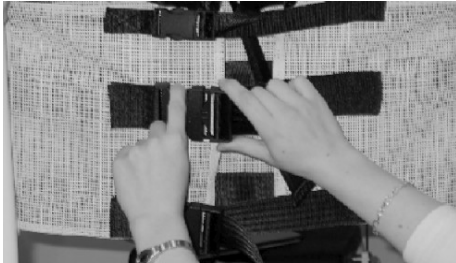

Le support mollet est sécurisé et ajusté par la bande velcro à l'arrière.
Important ! Support mollet lavé à max. 80 degrés.



Le seau est à tirer par le dossier du siège dans le mouvement régulier.

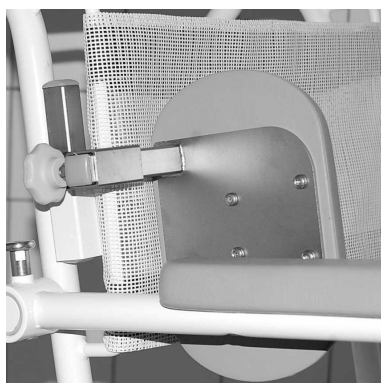

Les supports latéraux sont encliquetés dans les tubes carrés du cadre. Pour ajuster la profondeur, desserrez la vis à réglage manuel et resserrez à la bonne position.




L'appuie-tête est réglable en hauteur en desserrant et en serrant la vis dans la bonne position.


Sachez que l'utilisateur peut tomber en avant en proclive !



Le fauteuil est incliné en appuyant sur le bouton de la commande manuelle vers le haut ou le bas. Si l'utilisateur parvient à se tenir aux accoudoirs, l'assistant doit mettre ses mains sur ses genoux avant que le fauteuil ne s'incline.

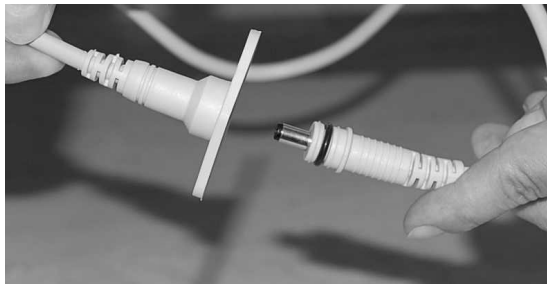

Lors du chargement de la batterie, débranchez le câble d'alimentation du chargeur et insérez le chargeur.

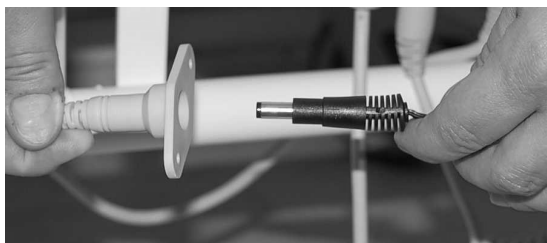


Évitez de vous asseoir sur les 10 derniers centimètres du siège car le fauteuil pourrait basculer vers l'avant.



Ne vous tenez pas sur les repose-pieds.



La chaise est reçue complètement chargée. Une charge complète prend environ 8 heures. Lorsque la batterie est faible, le bip retentit. Lorsque la batterie est en cours de chargement, le voyant du chargeur est orange. Lorsque la batterie est chargée, le voyant du chargeur est vert. Remarque: Si le voyant du chargeur s'allume en vert lors de la connexion, la batterie est défectueuse et doit être changée.

Numéro Art.	
Siège de douche: 20144	
Charge Max. 300 kg	Nettoyage:
2 ans de droits de plainte contre les erreurs de fabrication. 1/2 an sur piles. Conditions de réclamation pour le cadre. HMN accorde une période de droit de 5 ans pour réclamer des droits contre la dégradation du cadre pour toutes les chaises de douche INOXLINE en acier inoxydable. La garantie s'applique à la production et aux pannes de matériaux. Elle ne peut être utilisée que si les produits ont été utilisés normalement. Veuillez noter que l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.	Le produit peut être nettoyé régulièrement sans détergent non abrasif. Lavez et séchez le produit après le nettoyage. Le produit peut être lavé à 85 ° C en 3 minutes. 



ZI du RECOU
F 69520 GRIGNY
Tel. : 04 72 24 08 99 Fax : 04 72 24 25 36
E-Mail : cree@cree.fr
www.cree.fr