

**NOVA**

**CREE**  **FR**



**NOVA** *Tango™*  
200



**NOVA** *Tango™*  
100

# MANUEL D'UTILISATION



## TABLE DES MATIÈRES

<b>1.0. INTRODUCTION</b> .....	3
<b>1.1. SÉCURITÉ</b> .....	4
<b>1.2. GARANTIE</b> .....	4
<b>1.3. DÉBALLAGE DU SIÈGE</b> .....	4
<b>1.4. ENTRETIEN DU SIÈGE VELA TANGO 100/200</b> .....	4
1.4.1. Roues .....	4
1.4.2. Châssis .....	4
1.4.4. Garniture .....	5
<b>1.5. INDICATIONS GÉNÉRALES</b> .....	5
1.5.1. Transport .....	5
1.5.2. Stabilité et équilibre .....	5
1.5.3. Recyclage .....	5
<b>1.6. MANUEL D'UTILISATION VELA TANGO 100/200</b> .....	6
1.6.1. Hauteur de l'assise/Inclinaison du siège/Rotation .....	6
1.6.2. Inclinaison et hauteur du dossier .....	6
1.6.3. Accoudoirs .....	7
1.6.4. Freins .....	7
1.6.5. Équipement supplémentaire .....	7
1.6.5. VELA Tango 200 - dispositif à glissière .....	7
<b>1.7. DONNÉES TECHNIQUES</b> .....	8

## 1M. INTRODUCTION

### **Cher client,**

Nous vous remercions de l'achat du siège VELA Tango 100/200. Nous sommes certains qu'il vous apportera un plaisir quotidien. Le manuel d'utilisation comporte des informations précieuses sur le réglage, l'utilisation, l'entretien, les données techniques, etc.

Ce manuel d'utilisation concerne les siège VELA Tango Standard (Tango 100) et VELA Tango Confort (Tango 200).

### **Important !**

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour une lecture ultérieure. Laissez-le toujours à la disposition de l'utilisateur du siège. Ce manuel d'utilisation doit toujours accompagner le siège.

Vous le trouverez également sur le site web de CREE [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

Pour toute question, veuillez contacter CREE.

Pour obtenir plus d'informations sur les siège VELA Tango 100 Standard et VELA Tango 200 Confort , n'hésitez pas à consulter notre site [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

### **Sécurité**

Ce siège porte la marque CE et respecte toutes les réglementations de PUE.

Ce siège est fabriqué par VELA, Vermund Larsen AIS, Goteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danemark.

Ce siège VELA Tango Standard/Confort (100/200) est un siège d'intérieur destiné aux personnes assises.

VELA se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

## **CREE**

Importateur pour la France,  
CREE

Z.I. du Recou  
F-69520 GRIGNY  
<http://www.cree.fr/>

## **1 SÉCURITÉ GARANTIE**

VELA offre une garantie conformément à la loi sur la vente. La garantie n'est valable que pour l'utilisation de pièces détachées et d'accessoires originaux, ainsi que pour toute modification apportée au siège par un technicien agréé. VELA décline toute responsabilité en cas de dommages causés à l'utilisateur ou au produit et qui seraient intervenus suite :

- à un transport
- à un usage abusif du siège
- à une simple usure du siège
- à une utilisation incorrecte du siège
- à l'utilisation de pièces détachées et d'accessoires non originaux
- à des modifications apportées au siège par des techniciens non agréés

### **1.5.1. TRANSPORT**

Assurez-vous toujours de bloquer le siège VELA Tango avant son transport. Aucune personne ne doit rester assise sur le siège pendant son transport.

- Températures durant le transport : - 40° à +70°

— Humidité : 15 % à 95 %/0

- Pression atmosphérique : ppp à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer

### **DÉBALLAGE DU SIÈGE**

Le siège VELA Tango Standard ou Confort est emballé dans un carton respectant l'environnement et facile à utiliser.

En cas de défauts ou de dommages dus au transport, veuillez immédiatement contacter VELA. N'essayez pas vous-même de réparer les dommages éventuels et ne commencez pas à utiliser le siège.

#### **Le carton contenant le siège doit comprendre les éléments suivants :**

- le siège VELA Tango Standard ou Confort équipé, au besoin, d'accessoires supplémentaires
- ce manuel d'utilisation

### **ENTRETIEN DU SIÈGE VELA Tango Standard (100) / Confort (200)**

Nous recommandons une révision annuelle du siège VELA Tango pour détecter tout défaut ou usure de pièces. Nous vous recommandons aussi de resserrer régulièrement les pièces amovibles.

#### **Roues**

Vérifiez également les roues à intervalle régulier et enlevez les restes éventuels de fils, etc.

#### **Châssis**

Nettoyez à l'eau tiède additionnée, au besoin, de liquide vaisselle au pH neutre.

#### **Garniture**

La housse est en laine. Nettoyez-la à l'aspirateur et à l'aide d'un chiffon mouillé et bien serré. Si vous avez fait l'acquisition de housses d'incontinence, vous pouvez les laver en machine sur cycle délicat.

## **Détachage, lainé**

(Si la housse de votre siège est dans un autre tissu, par ex. en microfibre, veuillez alors contacter l'importateur pour plus d'informations sur le détachage)

Assurez-vous d'enlever la tache le plus rapidement possible. Utilisez toujours un chiffon propre de coton blanc,

Sang : le sang s'enlève à l'eau froide. S'il résiste, utilisez du liquide vaisselle au pH neutre.

Encre : retirez-en le plus possible à l'aide de papier buvard. Nettoyez ensuite avec 20 °A) d'alcool dénaturé. Rincez finalement à l'eau additionnée de liquide vaisselle au pH neutre.

Chocolat, graisse & sucreries : nettoyez à l'eau tiède additionnée de liquide vaisselle au pH neutre.

Herbe & légumes : nettoyez à l'eau tiède additionnée, au besoin, de liquide vaisselle au pH neutre.

Café, thé & lait : retirez-en le plus possible à l'aide de papier buvard. Rincez finalement à l'eau additionnée de liquide vaisselle au pH neutre.

Stylo & cosmétiques : nettoyez à l'alcool à brûler.

Cirage : tamponnez la tache avec précaution à l'aide d'un chiffon imprégné de benzine ou d'alcool à brûler.


Stéarine repassez à chaud sur du papier absorbant. Nettoyez ensuite à l'aide d'essence de térébenthine. Tamponnez finalement à l'eau tiède additionnée de liquide vaisselle au pH neutre. Ou alors : consultez la rubrique Chewing-gum.

Confiture, sirop, fruit & jus de fruit : enlevez-en le plus possible à l'aide d'une cuillère. Nettoyez à l'eau tiède additionnée de liquide vaisselle au pH neutre.

Chewing-gum : refroidissez-le à l'aide de glaçons dans un sac plastique ou d'un accumulateur de froid. Enlevez-le en grattant. Enlevez, avec précaution, des restes éventuels à l'aide de benzine.

Urine : mélangez un volume de vinaigre blanc à deux volumes d'eau. Mettez un chiffon sec autour de la tache lorsqu'elle s'imprègne du mélange. Rincez le mélange vinaigre-eau tour à tour à l'aide d'un chiffon sec et d'un chiffon imprégné d'eau.


Vin & alcool : retirez-en le plus possible à l'aide de papier buvard. Lavez à l'eau additionnée de liquide vaisselle au pH neutre, puis rincez à l'alcool dénaturé dilué.

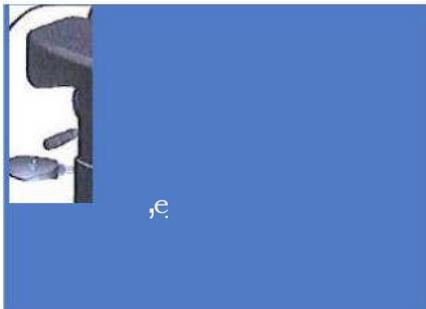

## **1.6. MANUEL D'UTILISATION VELA TANGO Standard /Confort : 100/200**

### **4 1.6.1. HAUTEUR DE L'ASSISE/INCLINAISON DU SIÈGE/ROTATION**

La hauteur du siège VELA Tango se règle par ressort à gaz. Tirez, pour cela, sur la poignée située sur le côté droit.

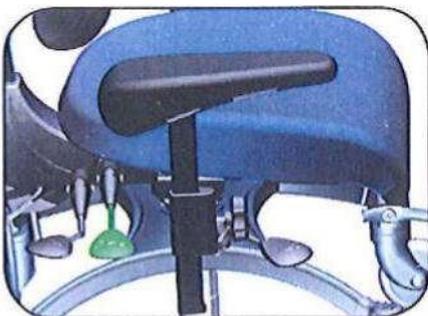

### **4 INCLINAISON DU SIÈGE**

L'inclinaison du siège se règle à l'aide de la poignée située sur le côté arrière droit du siège.



### **4 ROTATION**

La rotation du siège s'effectue en tirant sur la poignée située sur le côté gauche.



### **4 1.6.2. INCLINAISON ET HAUTEUR DU DOSSIER**

Le dossier s'incline à l'aide de la poignée placée sur le côté arrière droit. N'oubliez pas, ensuite, de bien la resserrer.

### **4 HAUTEUR DU DOSSIER**

La hauteur du dossier se règle à l'aide de la poignée située sur le côté arrière droit du siège. N'oubliez pas, ensuite, de bien la resserrer.



### 1.6.3. ACCOUDOIRS

Les accoudoirs sont réglables aussi bien en hauteur qu'en largeur.


- **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR**

La hauteur se règle en desserrant les vis du montant de l'accoudoir. N'oubliez pas, ensuite, de bien resserrer les vis.



- **RÉGLAGE DE LA LARGEUR**


La largeur se règle en desserrant les vis situées sous le siège et en réglant le rail en métal qui retient l'accoudoir. N'oubliez pas, ensuite, de bien resserrer les vis.

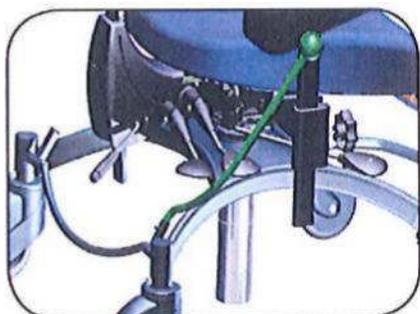

- **1.6.4. FREINS**

Le siège VELA Tango est doté d'un freinage central qui fonctionne en actionnant le levier de frein de droite ou de gauche. Pour modifier la position du levier (du côté droit au côté gauche), retirez le bouchon en caoutchouc et insérez le levier dans l'autre orifice.

Le frein à main se pousse vers l'avant pour bloquer les roues et vers l'arrière pour les débloquer.

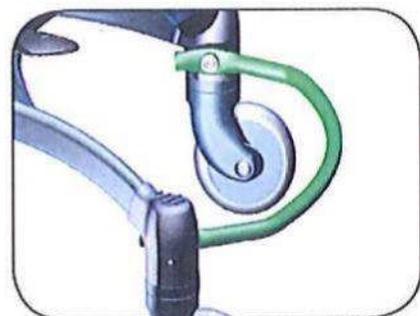

### 1.6.5. ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

#### .4 RENFORT

Appuyez sur le renfort avec le pied pour l'engager ou le libérer. N'utilisez jamais le renfort pour vous installer sur le siège ou en descendre car le siège risquerait de se renverser.

- **POSSIBILITÉ RÉGLAGE DE NIVEAU**

Réglage de niveau à 3 hauteurs de départ, du modèle bas au modèle haut, (consultez le plan du tube extérieur). Seuls un technicien de VELA ou une personne experte dans ce domaine sont habilités à effectuer ce réglage.



- **DISPOSITIF À GLISSIÈRE sur VELA TANGO Confort (200)** .Le dispositif à glissière assure un réglage précis du dossier de façon à procurer un appui lombaire optimal. L'appui lombaire se règle en desserrant la vis du dispositif ce qui permet ensuite d'ajuster la position du dossier.

## 1.7. DONNÉES TECHNIQUES

### CONSTRUCTION :

Châssis cintré en acier profilé permettant à chaque roue un contact au sol, même sur sol irrégulier

Chaque roue est fixée dans la tour à l'aide d'une cheville

Tube extérieur en acier vernis avec rainure pour réglage par intervalle

Réglage de la hauteur par actionneur télescopique

Réglage de la hauteur par	ressort à gaz, 350N
Assise, Y	44 x 44 cm
Inclinaison du siège	-6° / +3°
Profondeur de l'assise	37-44 cm
Dossier, Y	37 x 30 cm
Inclinaison du dossier	-10°/+13°
Coussins d'accoudoir en mousse de polyuréthane	9 x 30 cm
Hauteur d'accoudoir	0-24 cm
Distance entre accoudoirs	37-51 cm
Hauteur de l'assise	38-48 cm 40-55 cm 42-57 cm 47-62 cm 52-67 cm
Réglage par intervalle	-2 / +10 cm
Piètement	55 x 55 cm
Poids	20 kg
Charge	160 kg

**ZI du Recou 69520 GRIGNY**

Tel 04 72 24 08 99 / Fax 04 72 24 25 36

[cree@cree.fr](mailto:cree@cree.fr) / [www.cree.fr](http://www.cree.fr)