



## CATALOGUE POSITIONNEMENT ET MOBILITÉ



*Développer l'espace de liberté...*



# UNE ENTREPRISE ENGAGÉE AU SAVOIR-FAIRE RECONNU

CREE distribue, sur l'ensemble du territoire français, un éventail complet d'équipements qui permettent d'accroître l'autonomie des personnes à mobilité réduite, au domicile et en institution. Ces équipements favorisent également les conditions de travail du personnel soignant.

## UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE À VOTRE SERVICE

Forte de plus de 40 ans d'expérience dans l'étude et la distribution de ces solutions, l'équipe pluridisciplinaire de CREE, composée d'ergothérapeutes et de spécialistes du handicap, vous accompagne depuis le choix du produit jusqu'à son utilisation.

## DES PRODUITS DE QUALITÉ

Gage de son professionnalisme, CREE se porte garant de la qualité des produits sélectionnés auprès de fournisseurs engagés. Toutes nos solutions allient ainsi ergonomie, confort, sécurité, efficacité et esthétique. Toutes sont naturellement labellisées CE.

## UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHAQUE SITUATION

Chacun est différent et les handicaps peuvent être multiples et variés. C'est pourquoi CREE s'engage à trouver les meilleures réponses pour faciliter le quotidien de chaque utilisateur. Les solutions ergonomiques proposées sont donc pensées comme de véritables outils d'indépendance.

## CHAMPS DE COMPÉTENCES

- Ergonomie hospitalière
- Aménagement des services d'ergothérapie
- Contrôle d'environnement
- Matériel de rééducation et de réadaptation pour enfants et adultes
- Capacité reconnue à développer de nouveaux concepts

## DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION SPÉCIALISÉS

CREE est implanté sur l'ensemble du territoire par le biais de plusieurs réseaux : prestataires médicaux et spécialistes en sanitaire, électricité et cuisines. CREE possède une force de vente formée de façon pointue, qui dispense les explications nécessaires et assure des présentations de matériel sur site, partout en France. CREE propose aussi des prestations de service sur mesure en matière d'adaptations spéciales et de mise en service du matériel.

Innovation, Performance, Responsabilité

# PHILOSOPHIE COMMERCIALE

**La société CREE propose depuis 1975 à ses différents interlocuteurs une nouvelle vision de leurs possibilités ou de leur métier, une offre de produits et de services innovante et perpétuellement remise à jour et, surtout, une philosophie du monde du handicap et de l'individu en situation de handicap qui ne le dégrade pas ni ne le marginalise.**

La commercialisation d'aides techniques auprès de personnes en situation de handicap suppose un équilibre difficile entre des prix de vente raisonnables, des produits construits avec des normes de qualité et de sécurité supérieures, des services exceptionnels comparativement au commerce traditionnel, le recours à du personnel très qualifié, et des possibilités de financement souvent réduites pour les utilisateurs.

De fait, notre philosophie commerciale repose sur les points suivants :

**L'ERGONOMIE DE NOS PRODUITS** : Notre entreprise a intégré dès sa création des salariés ergonomes et/ou ergothérapeutes participant au choix et à l'adaptation des produits que nous introduisons sur le marché. De par leur ergonomie, nos produits améliorent les conditions de vie des utilisateurs, et participent également à la qualité de vie de leur entourage,

**LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS** : Nous ne sélectionnons que des solutions de qualité, élaborées et fabriquées en petites séries, au sein d'unités de production à taille humaine ayant apporté un soin tout particulier à concevoir des produits fiables et robustes, allant souvent bien au-delà du simple respect des normes de sécurité en vigueur.

**L'ESTHÉTIQUE DE NOS SOLUTIONS** : Que l'on s'équipe d'une poussette pour y promener son enfant, ou que l'on aménage sa salle de bain ou sa cuisine, CREE porte une attention toute particulière à l'esthétique des solutions proposées.

**LE CONSEIL PERSONNALISÉ** : Secondés par des chefs produits experts en leurs domaines, nos responsables de secteur sont à votre écoute pour vous proposer la solution adaptée à votre demande... ou vous renvoyer vers nos confrères et concurrents si nous ne considérons pas notre solution comme la plus adaptée au besoin exprimé.

**LE PARTENARIAT NÉCESSAIRE AVEC LES PRESCRIPTEURS** : Si notre personnel a pour mission de connaître parfaitement ses produits, seul le prescripteur ou préconisateur médical demeure responsable du choix final d'une aide technique, en adéquation avec le handicap et le besoin de son patient.

**LA POSSIBILITÉ D'ESSAYER AVANT DE CHOISIR** : Un important stock de produits d'essais est disponible, soit à notre siège social (Grigny 69), soit dans l'un de nos quatre dépôts régionaux. Ces essais sont à ce jour totalement gratuits, malgré leur coût élevé en financement du parc et en main d'œuvre. A défaut de prise en charge de ce service par les pouvoirs publics, nous considérons qu'il est de notre responsabilité de vous aider à effectuer le bon choix, cette charge financière étant alors intégrée au tarif public de nos aides techniques, qui peuvent parfois à tort être considérés comme trop élevés.

**LA TRANSPARENCE ENVERS LES UTILISATEURS OU PRESCRIPTEURS** : Sur un site internet que nous espérons aussi ergonomique que nos produits, nous présentons l'ensemble de notre offre, ainsi que nos tarifs publics conseillés.

*Nous travaillons en permanence sur notre positionnement tarifaire, afin que notre offre soit ouverte au plus grand nombre. Mais la qualité est une caractéristique sur laquelle nous ne transigerons pas, quel que soit le niveau de remboursement de nos produits, car elle demeurera notre principale signature.*

Jean-Luc MARCELIN  
Président

*Développer l'espace de liberté...*

# OFFRE CREE ET SOMMAIRE GÉNÉRAL

n°1



**POSITIONNEMENT ET MOBILITÉ**

n°2



**MOBILIER D'ERGOTHÉRAPIE ET DE RÉÉDUCATION**

n°3



**AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE BAIN**

n°4



**AMÉNAGEMENT DES CUISINES**

n°5



**CONTRÔLE D'ENVIRONNEMENT**

# POSITIONNEMENT et MOBILITÉ



- Un bon positionnement est et a toujours été au cœur de notre sélection d'aides à la mobilité, qu'elle se fasse assise ou debout.
- Un bon positionnement permet à l'enfant ou à l'adulte d'être l'acteur de son quotidien et non le spectateur.
- Un bon positionnement est garant de la réussite de ses activités.

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir dans ces pages des solutions qui répondent aux exigences d'ergonomie, de qualité, de sécurité, de confort, de performance et d'innovation que nous nous imposons.

<b>1. Poussettes</b> .....	<b>8</b>
1.1 POUSSETTES À DOSSIER INCLINABLE .....	12
1.2 POUSSETTES MULTIRÉGLABLES ÉVOLUTIVES .....	20
<b>2. Sièges de positionnement</b> .....	<b>26</b>
2.1 DISPOSITIFS DE MAINTIEN POSTURAL .....	27
2.2 SIÈGES DE POSITIONNEMENT MODULABLE ÉVOLUTIF .....	28
<b>3. Aides à la marche et Déambulateurs</b> .....	<b>34</b>
3.1 DÉAMBULATEURS .....	38
3.2 DÉAMBULATEURS VERTICALISATEURS .....	40
<b>4. Fauteuils électriques d'intérieur</b> .....	<b>48</b>
4.1 FAUTEUILS ÉLECTRIQUES D'INTÉRIEUR .....	50
<b>5. Sièges de travail et d'activité</b> .....	<b>54</b>
5.1 GAMME TANGO .....	58
5.2 GAMME SALSA .....	64
5.3 GAMME ENFANTS .....	66
<b>6. Aides à l'intégration sensorielle</b> .....	<b>68</b>
6.1 FAUTEUILS SENSIT® ET POUFS .....	70
6.2 COUVERTURES LESTÉES BALL BLANKET™ .....	72
6.3 GILETS LESTÉS MY FIT® .....	74
6.4 COUSSINS SENSORIELS .....	75





# 1. Poussettes





# Pourquoi proposons-nous plusieurs types de poussettes ?

- Parce que la position assise lors des déplacements doit être parfaite et adaptée à chacun.
- Parce que chaque enfant est unique et que ses besoins en positionnement, maintien et confort le sont tout autant.
- Parce que la liberté et la sécurité des déplacements sont primordiales pour les enfants, leurs familles et les aidants.

## “La sélection d’une poussette n’est pas le fruit du hasard”

CREE, dans son processus, répond toujours à ces questions fondamentales : « A qui est destinée la poussette ? », « Dans quelles conditions cette poussette sera-t-elle utilisée ? ». Toutes les poussettes que nous vous présentons répondent aux exigences que CREE s’impose en termes d’ergonomie, de qualité, de sécurité, de confort, de performance et de design.



Besoin d’un maintien postural léger, de confort pour l’utilisateur et d’ergonomie pour l’accompagnateur ?

### POUSSETTE DOSSIER INCLINABLE

Caractéristiques recherchées

- Accessoires de positionnement souples
- Poussettes compactes au pliage et légères



Besoin d’un bon maintien postural, de confort, d’une grande amplitude de réglage et d’évolutivité ?

### POUSSETTE MULTI-RÉGLABLE ÉVOLUTIVE

Caractéristiques recherchées

- Grande amplitude de réglages
- Nombreux accessoires de positionnement
- Grande amplitude d’inclinaison et de bascule d’assise

Tableau des caractéristiques ..... 10-11

## 1.1 POUSSETTES À DOSSIER INCLINABLE

1.1.1	Corzino .....	12
1.1.2	Piper .....	13
1.1.3	Cruiser Plus .....	14-15
1.1.4	Cruiser Scout .....	16-17
1.1.5	Rodéo Tilt .....	18-19

## 1.2 POUSSETTES MULTIRÉGLABLES ÉVOLUTIVES

1.2.1	Tom 4 Classic .....	20-21
1.2.2	Bug GREYline .....	22-23
1.2.3	Stingray .....	24-25

## POUSSETTES AVEC DOSSIER INCLINABLE



Usager 2 à 5 ans

Référence		22500	02911	
Taille approx. usager (en cm)		120 à 145	87 à 127	
Charge maxi (en kg)		50	34	
Largeur d'assise (en cm)		35 (4-35 avec coussins latéraux)	25,5	
Profondeur d'assise (en cm)		29	15,5-28	
Angle assise dossier (en °)		90/135	85/90/95	
Poids de la poussette (en kg)		14,5	8,3	

Usager 5 à 8 ans

Référence	22501	22500	02912	
Taille approx. usager (en cm)	122 à 144	120 à 145	96 à 137	
Charge maxi (en kg)	45	50	34	
Largeur d'assise (en cm)	30	35 (4-35 avec coussins latéraux)	30,5	
Profondeur d'assise (en cm)	28	29	20-33	
Angle assise dossier (en °)	106/111	90/135	85/90/95	8
Poids de la poussette (en kg)	12	14,5	8,7	

Usager 8 à 12 ans

Référence	22502		02913	
Taille approx. usager (en cm)	131 à 155		112 à 153	
Charge maxi (en kg)	55		45,5	
Largeur d'assise (en cm)	34		35,5	
Profondeur d'assise (en cm)	32		25,5-38	
Angle assise dossier (en °)	110/114		85/90/95	8
Poids de la poussette (en kg)	12,5		9,5	

Usager adolescent

Référence	22503		02914	
Taille approx. usager (en cm)	146 à 168		120 à 160	
Charge maxi (en kg)	75		77	
Largeur d'assise (en cm)	38		40,5	
Profondeur d'assise (en cm)	36		28-40,5	
Angle assise dossier (en °)	110/114		85/90/95	8
Poids de la poussette (en kg)	14		10,3	

Usager adulte

Référence	22504		02915	
Taille approx. usager (en cm)	160 et +...		160 et +...	
Charge maxi (en kg)	75		114	
Largeur d'assise (en cm)	42		45,5	
Profondeur d'assise (en cm)	38		35,5-53,5	3
Angle assise dossier (en °)	110/114		85/90/95	8
Poids de la poussette (en kg)	14		14	

# POUSSETTES MULTIREGLABLES EVOLUTIVES

DESIGNER SCOUT	RODEO TILT	TOM 4 Classic	BUG NC	STINGRAY
----------------	------------	---------------	--------	----------



	<b>22961</b> 90 à 120 34 25,5 18-30,5 0/20 13,2	<b>22650CL</b> 75 à 120 35 18-22-26 24-31 0/180 17	22404 / 22409 / 22406 / 22401 90 à 122 35 20-30 20-30 40 18	<b>228221</b> 59 à 116 40 30 (18-22-26) 18-30 90/120 19
<b>28522</b> 96 à 137 34 30,5 20-33 35/90/95 14,7	<b>22962</b> 107 à 127 34 30,5 23-35,5 0/20 15	<b>02266CL.</b> 95 à 130 35 20-24-26-31 27-35 0/180 18,5	22404 / 22409 / 22406 / 22401 90 à 122 35 20-30 20-30 40 18	<b>228222</b> 75 à 136 40 35 (23-27-31) 25-40 90/120 19
<b>28523</b> 112 à 153 45,5 35,5 25,5-38 35/90/95 15,4	<b>22963</b> 124 à 142 45,5 35,5 28-40,5 0/20 16,8	<b>02267CL.</b> 112 à 147 50 22-26-28-35 32-40 0/160 21	22402 / 22411 / 22408 / 22401 120 à 150 45 25-36 30-40 40 22	<b>228222</b> 75 à 136 40 35 (23-27-31) 25-40 90/120 19
<b>28524</b> 120 à 160 77 40,5 28-40,5 35/90/95 17	<b>22964</b> 132 à 155 77 40,5 33-45,5 0/20 17,7		22402 / 22411 / 22408 / 22401 120 à 150 45 25-36 30-40 40 22	
<b>28525</b> 160 et +... 114 45,5 35,5-53,5 35/90/95 18,2				

# POUSSETTES À DOSSIER INCLINABLE



## Corzino

Code LPPR 4255116 + 4328542 - Code ISO 122707

Réf. 22501 / 22502 / 22503

La poussette canne à dossier inclinable Corzino est une poussette légère et compacte qui favorise les déplacements des enfants à besoins spécifiques. Ces déplacements doivent être limités dans le temps.

Cette poussette existe en 4 tailles. Son système de pliage est ergonomique. Elle est très maniable grâce à ses 2 poignées et les roues avant pivotantes, et supporte jusqu'à 75kg pour la plus grande taille. Châssis garanti 2 ans, finition aluminium brossé. Couleur de la housse bleue.



### CARACTÉRISTIQUES

- Dossier inclinable (2 positions) ;
- Harnais 5 points (rembourré aux épaules) ;
- Housse très confortable (lavable en machine) ;
- Protections latérales montants châssis ;
- Palettes repose pieds 2 parties réglables en hauteur, palettes escamotables ;
- Repose mollets ;
- Roues avant pivotantes - diamètre 175 mm ;
- Grandes roues arrière - diamètre 260 mm.

### ACCESSOIRES POUR CORZINO



REFERENCE	ACCESSOIRES	REFERENCE	ACCESSOIRES
22510 22511	Appui tête • S • M	22518 22519	Panier tissu • T 1 - T 2 • T 3
22512 22513	Bloc d'abduction • S : T 1 - T 2 • M : T 3	22508 22509	Housse anti-pluie (se fixe sur la capote) • T 1 - T 2 • T 3
22517	Capote • TU		

### DIMENSIONS

Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	REF.	AGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	PROFONDEUR ASSISE	LARGEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	HAUTEUR ASSISE ARRIERE SOL	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)
T 1	22501	5-8 ans	122-144	28	30	54	29-42	60	106/111	22
T 2	22502	8-12 ans	131-155	32	34	67	30-44	60	110/114	23
T 3	22503	12-16 ans	146-168	36	38	85	27-43	60	110/114	24
T 4	22504	adultes	160 et +	38	42	88	33-50	60	110/114	21

HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE	DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
103	17,5/26	103	100	53	119	32	37	45	12
104	17,5/26	107	104	58	124	32	39	55	12,5
95	17,5/26	124	100	63	124	35	40	75	14
99	17,5/26	129	109	65	132	37	36	75	14



# Piper

Code LPPR 4255116 + 4328542 - Code ISO 122707

Réf. 22500

Piper est une poussette à dossier inclinable dédiée aux enfants qui ont des besoins spécifiques de positionnement, pour les accompagner dans leurs déplacements quotidiens de courtes durées.

Châssis pliant en aluminium léger. La conception du revêtement du dossier offre la possibilité d'un réglage en hauteur des harnais d'épaules pour un positionnement au plus près des besoins de l'utilisateur. Possibilité d'ajouter des accessoires (cf. bon de commande). Toutes ces caractéristiques font de la Piper une poussette très maniable pour une utilisation urbaine ou sur des chemins légèrement bosselés.

*Nouveauté*



NOIR




## CARACTÉRISTIQUES

- Taille unique ;
- Dossier réglable en inclinaison ;
- Repose-pieds monobloc réglable en hauteur ;
- Harnais 5 points ;
- Frein au pieds ;
- 4 roues démontage rapide ;
- Roues increvables avant 175mm pivotantes avec blocage directionnel ;
- Roues arrière increvables 225 mm ;
- Revêtement lavable en machine à 30° ;
- Poignée de poussée monobloc pliante ;
- Panier filet et verrouillage pour le transport.

## Les + produit

- ✓ Système d'inclinaison de dossier unique très ergonomique et sans à-coups ;
- ✓ Pliage ultra-compact ;
- ✓ Charge maxi 50kgs.

## ACCESSOIRES POUR PIPER

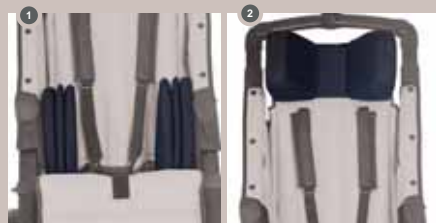

REFERENCE	ACCESSOIRES
22497	Jeu de coussins réducteurs de largeur d'assise <sup>1</sup>
22498	Appui-tête <sup>2</sup>
22495	Bloc d'abduction
22496	Jeu de sangle de pied
22499	Capote

## DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	RÉF.	AGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	PROFONDEUR ASSISE	LARGEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)
T U	22500	2-8 ans	120-145	29	35 (4-35*)	68	25-37,5	90/135	26

HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE	DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
100	15,5/22,5	100	108	59	100	31	30	50	14,5

\*avec coussins latéraux



# Cruiser Plus

Code LPPR 4255116 (av.16 ans) / 4263950 (ap. 16 ans) – Code ISO 122707

Ref. 02911 / 02912 / 02913 / 02914




**Poussette à dossier inclinable de type canne.**

**Une poussette canne confortable pour les enfants et les parents !**

Cruiser Plus se plie et s'ouvre aussi facilement qu'un parapluie, tout en laissant les accessoires en place. Elle est très maniable avec ses roues avant pivotantes. Son faible encombrement et sa légèreté en position pliée facilitent aussi sa manipulation et son stockage dans un coffre de voiture. Cruiser Plus est extrêmement robuste et durable. L'assise, extensible en profondeur, ainsi que l'extension du dossier (accessoire), permettent de suivre la croissance de l'enfant et d'accroître la durée d'utilisation de la poussette. L'angle assise-dossier est également réglable.

## CARACTÉRISTIQUES

- Dossier et assise réglables en tension ;
- Inclinaison du dossier réglable : 85°-90°-95° ;
- Angle d'assise (par rapport à l'horizontal) de 30° ;
- Réglage de la profondeur d'assise ;
- Ceinture 3 points ;
- Repose-pieds : 2 palettes indépendantes réglables en hauteur et inclinaison. Palettes escamotables ;
- Revêtement en Cordura (fibre très résistante) ;
- Poignée de poussée réglable en hauteur pour T1 à T4. ; Attention T5 : 2 poignées de poussée indépendantes et fixes ;
- Châssis gris métal ;
- Roues avant increvables 19 cm Ø ;
- Roues arrière increvables 29 cm Ø, à démontage rapide sauf pour T5 ;
- Freins indépendants au pied.

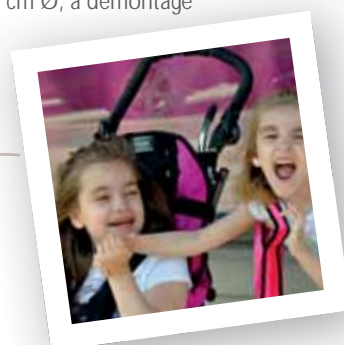

## OPTION TRANSIT (uniquement à la commande de la poussette)



Cruiser Plus peut être choisie en modèle "Transit" crash testé, c'est-à-dire agréée sécurité routière. Elle pourra alors être utilisée comme un siège dans un transport en commun avec un amarrage de sol adéquat (non fourni). Elle apporte ainsi une sécurité maximale dans les véhicules de transport.


Cruiser Plus TRANSIT est équipée en standard :

- d'une extension de dossier ;
- d'un harnais rembourré 5 points ;
- de deux sangles de pieds ;
- et de 4 crochets d'ancrage.

CRUISER PLUS TRANSIT	REF.
• T 1 / T 2	02911T/02912T
• T 3 / T 4	02913T/02914T
• T 5	02915T

## DIMENSIONS Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	REF.	AGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR D'ASSISE/SOL	HAUTEUR DOSSIER (TOTALE)	HAUTEUR ASSISE REPOSE PIEDS	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)	
	T 1	02911	3-5 ans	87-127	25,5	15,5-28	58	53	13-53	85/90/95	30
	T 2	02912	5-8 ans	96-137	30,5	20-33	61	56	13-63	85/90/95	30
	T 3	02913	8-12 ans	112-153	35,5	25,5-38	56	64	10-56	85/90/95	30
	T 4	02914	12-16 ans	120-160	40,5	28-40,5	58,5	71	10-56	85/90/95	30
	T 5	02915	adultes	adultes	45,5	35,5-53,5	66	64	20-58	85/90/95	30

## Les + produit

- ✓ Le dossier et l'assise de la poussette Cruiser Plus bénéficient de la **technologie SELF TENSIO™\*** ;
- ✓ Grand nombre d'**accessoires de positionnement souple** pour un maintien personnalisé ;
- ✓ **Châssis pliable façon canne** pour un encombrement minimum.

### Coloris



BLEU



NOIR



VERT SAPIN



ROUGE



VIOLET



ROSE FUSHIA

\*Conception qui permet au châssis de s'ouvrir et aux sangles de se tendre lorsque l'utilisateur s'installe. Le revêtement est alors ajusté et apporte un réel maintien au niveau du bassin.

## ACCESSOIRES POUR CRUISER PLUS



ACCESSOIRES	REF.	
<b>Appui-tête</b>		1
• T 1 / T 2	02141 / 02142	
• T 3 / T 4	02208 / 02143	
• T 5	02200	
<b>Repose nuque</b>		2
• T U	02762	
<b>Extension de dossier</b>		3
• T 1 (15 cm) / T 2 (20 cm)	02067 / 02145	
• T 3 (20 cm) / T 4 (20 cm)	02146 / 02248	
• T 5 (20 cm)	02250	
<b>Réducteur de siège (réduit 5 cm en largeur et 2,5 cm en profondeur)</b>		4
• T 1 - T 2	02251	
• T 3 - T 4 - T 5	02252	
<b>Cales latérales simples</b>		5
• T 1 / T 2	02129 / 02130	
• T 3 / T 4	02213 / 02131	
• T 5	02197	
<b>Harnais en H rembourré (uniquement avec ceinture 3 points)</b>		6
• T U	02117	
<b>Gilet de maintien</b>		7
• T 1 / T 2	02121 / 02122	
• T 3 / T 4	02212 / 02123	
• T 5	02196	
<b>Tablette transparente (avec fixations)</b>		8
• T 1 / T 2	02171 / 02190	
• T 3 / T 4	02155 / 02156	
• T 5	02147	
<b>Sangles d'écartement des jambes</b>		9
• T 1 / T 2	02137 / 02138	
• T 3 / T 4	02139 / 02140	
• T 5	02199	
<b>Support de mollets</b>		10
• T U	02934	
<b>Sangles de pieds</b>		
• T U	02113	
<b>Capote standard</b>		11
• T 1 / T 2	02157 / 02158	
• T 3 / T 4	02217 / 02159	
• T 5	02107	
<b>Capote design sans fenêtre</b>		
• T 1 / T 2	28604 / 28605	
• T 3 / T 4	28606 / 28607	
• T 5	28608	
<b>Capote design avec fenêtre</b>		12
• T 1 / T 2	28609 / 28610	
• T 3 / T 4	28611 / 28612	
• T 5	28613	
<b>Housse anti pluie (se fixe sur la capote)</b>		13
• T 1 - T 2 - T 3	23120	
• T 4 - T 5	23121	
<b>Sac de transport</b>		
• T 1 - T 2 - T 3		
• T 4 - T 5	02144	
<b>Panier sous assise</b>		14
• T 1 - T 2	02758	
• T 3 - T 4	02759	
• T 5	02760	
<b>Moustiquaire</b>		
• T 1 - T 2 - T 3	28602	
• T 4 - T 5	28603	
<b>OPTIONS (À LA COMMANDE)</b>	REF.	
<b>Dossier anatomique et Siège renforcé</b>		
• T 1 / T 2	29150 / 29160	
• T 3 / T 4	29170 / 29180	
• T 5	29190	
<b>Siège renforcé seul</b>		
• T 1 / T 2	02109 / 02110	
• T 3 / T 4	02111 / 02112	
• T 5	02106	
<b>Roues avant 19 cm / arrière 31,7 cm increvables sculptées TT</b>		
• T 1 - T 2 - T 3 - T 4 (sauf T 5)	02970	
<b>Roues avant 19 cm / arrière 31,7 cm pneumatiques sculptées TT</b>		
• T 1 - T 2 - T 3 - T 4 (sauf T 5)	02971	
<b>Levier de basculement</b>		
• T 1 - T 2 - T 3 - T 4 - T 5	02936	
<b>Repose-pieds réglable en inclinaison</b>		
• T 1 / T 2 - T 3	02092 / 02093	
• T 4 - T 5	02094	
<b>Système de blocage pivot roues av. 2''</b>		
• T 2 - T 3 - T 4 - T 5	02754	
<b>Freins à main</b>		
• T 1 - T 2 - T 3 - T 4 (sauf T 5)	02939	




HAUTEUR  
POIGNÉE DE  
POUSSEE




LONGUEUR  
HORS TOUT



LARGEUR  
HORS TOUT

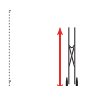


LONGUEUR  
PLIÉE

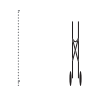

LARGEUR PLIÉE  
(SANS ROUES)



HAUTEUR  
PLIÉE

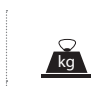

CHARGE  
MAXI



CHARGE MAXI  
TRANSIT



POIDS  
TOTAL

71-109	122	56	119	38	43	34	30	12
74-117	122	60	122	38	43	34	30	12
71-114	124	65	122	41	43	45,5	45,5	13
78-122	132	70	135	41	43	77	77	14
N/A	140	72,4	127	38	43	114	77	14



# Cruiser Scout

Code LPPR 4255116 + 4314853 (av.16 ans) / 4263950 (ap. 16 ans) - Code ISO 122707

Réf. 28522 / 28523 / 28524 / 28525

Poussette à dossier inclinable de type canne.

## Une poussette tout terrain, et tout confort, pour enfants et adultes !

La poussette Cruiser option Scout est une poussette pliable de type « canne », dite « sportive ». Avec ses larges roues sculptées tout terrain (gonflables pour plus de confort), qui adhèrent parfaitement au sol, elle est conçue pour les promenades à la campagne. Son frein à main sécurise utilisateur et accompagnateur dans les terrains accidentés. Elle offre un très bon maintien. Et pour encore plus de confort, de nombreux accessoires de maintien peuvent être ajoutés en option. Cette poussette est également pratique : son pliage compact, facile et rapide lui permet de tenir dans la plupart des coffres de voiture. Scout fera le bonheur des parents et des usagers, qui apprécieront ses performances aussi bien en intérieur qu'en extérieur !



## CARACTÉRISTIQUES

### identiques à la Cruiser Plus

- Dossier et assise réglables en tension ;
- Inclinaison du dossier réglable : 85°-90°-95° ;
- Angle d'assise (par rapport à l'horizontal) de 30° ;
- Réglage de la profondeur d'assise ;
- Ceinture 3 points ;
- Repose-pieds : 2 palettes indépendantes réglables en hauteur et inclinaison. Palettes escamotables ;
- Revêtement en Cordura (fibre très résistante) ;
- Poignée de poussée réglable en hauteur pour T1 à T4,
- Attention T5 : 2 poignées de poussée indépendantes et fixes ;
- Châssis gris métal ;
- Freins à main.

### En standard sur Cruiser Scout

- Dossier anatomique ( inclinaison fixe de 20° au niveau des épaules) ;
- Revêtement siège renforcé et repose-bras escamotables ;
- Roues tout chemin crantées ( avant increvables : 20 cm Ø/ arrière pneumatiques 30cm Ø) ;
- Freins à mains accompagnant.

## OPTION TRANSIT

(uniquement à la commande de la poussette)



Cruiser Scout existe en modèle "Transit". Elle aura alors subi avec succès les crash-tests qui lui permettent d'être utilisée comme siège dans un transport en commun avec un amarrage de sol adéquat (non fourni).

Cruiser Scout TRANSIT est équipée en standard :

- d'une extension de dossier ;
- d'un harnais rembourré 5 points ;
- de deux sangles de pieds ;
- et de 4 crochets d'ancrage.

CRUISER PLUS TRANSIT

REF.


- T 2 / T 3
- T 4 / T 5

28522T / 28523T  
28524T / 28525T

## DIMENSIONS

Bon de commande des options /accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	REF.	AGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR D'ASSISE/SOL	HAUTEUR DOSSIER (TOTALE)	HAUTEUR ASSISE REPOSE PIEDS	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)	
	T 2	28522	5-8 ans	96-137	30,5	20-33	61	56	13-63	85/90/95	30
	T 3	28523	8-12 ans	112-153	35,5	25,5-38	56	64	10-56	85/90/95	30
	T 4	28524	12-16 ans	120-160	40,5	28-40,5	58,5	71	10-56	85/90/95	30
	T 5	28525	adultes	adultes	45,5	35,5-53,5	66	64	20-58	85/90/95	30



## Les + produit

- ✓ Le dossier et l'assise de la poussette Cruiser Scout bénéficient de la **technologie SELF TENSIO™\*** ;
- ✓ Grand nombre d'**accessoires de positionnement souple** pour un maintien personnalisé ;
- ✓ **Châssis pliable façon canne** pour un encombrement minimum ;
- ✓ Freins à disque

### Coloris



BLEU



NOIR



VERT SAPIN



ROUGE







VIOLET



ROSE FUSHIA

\*Conception qui permet au châssis de s'ouvrir et aux sangles de se tendre lorsque l'utilisateur s'installe. Le revêtement est alors ajusté et apporte un réel maintien au niveau du bassin.

## ACCESSOIRES POUR CRUISER SCOUT

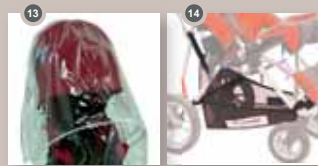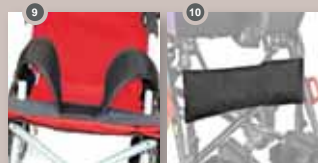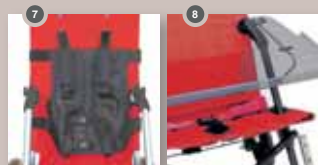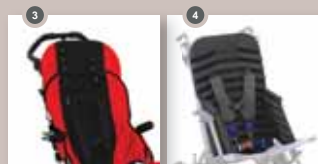

ACCESSOIRES	REF.
Appui-tête	
• T 2 / T 3	02141 / 02142
• T 4 / T 5	02208 / 02143 02200
Repose nuque	
• T U	02762
Extension de dossier	
• T 2 (20 cm) / T 3 (20 cm)	02145 / 02146
• T 4 (20 cm) / T 5 (20 cm)	02248 / 02250
Réducteur de siège	
• T 2	02251
• T 3 - T 4 - T 5	02252
Cales latérales simples	
• T 2 / T 3	02130 / 02213
• T 4 / T 5	02131 / 02197
Harnais en H rembourré (uniquement avec ceinture 3 points)	
• T U	02117
Gilet de maintien	
• T 2 / T 3	02122 / 02212
• T 4 / T 5	02123 / 02196
Tablette transparente	
• T 2 / T 3	02190 / 02155
• T 4 / T 5	02156 / 02147
Sangles d'écartement des jambes	
• T 2 / T 3	02138 / 02139
• T 4 / T 5	02140 / 02199
Support de mollets	
• T U	02934
Sangles de pieds	
• T U	02113
Capote standard	
• T 2 / T 3	02158 / 02217
• T 4 / T 5	02159 / 02107
Capote design sans fenêtre	
• T 2	28605
• T 3 / T 4	28606 / 28607
• T 5	28608

Capote design avec fenêtre	
• T 2	28610
• T 3 / T 4	28611 / 28612
• T 5	28613
Housse anti pluie (se fixe sur la capote)	
• T 2 - T 3	23120
• T 4 - T 5	23121
Sac de transport	
• T U	02144
Panier filet sous assise	
• T 2	02758
• T 3 - T 4	02759
• T 5	02760
Moustiquaire	
• T 2 - T 3	28602
• T 4 - T 5	28603
OPTIONS (A LA COMMANDE)	REF
Repose-pied inclinable	
• T 2 / T 3	02093 / 2093
• T 4 / T 5	02094 / 02094
Roues tout terrain increvables (à rajouter à la réf. de la poussette)	
• T U	02749
Levier de basculement	
• T U	02937
Cruiser Scout avec ceinture 2 points	sur demande
Blocage directionnel roues avant	
• T U	02754



HAUTEUR  
POIGNÉE DE  
POUSSEE

LONGUEUR  
HORS TOUT

LARGEUR  
HORS TOUT

LONGUEUR  
PLIÉE

LARGEUR  
PLIÉE  
(SANS ROUES)

HAUTEUR  
PLIÉE

CHARGE  
MAXI

CHARGE MAXI  
TRANSIT

POIDS  
TOTAL

74-117  
71-114  
78-122  
N/A

122  
124  
132  
140

60  
65  
70  
72,4

122  
122  
135  
127

38  
41  
41  
38

43  
43  
43  
43

34  
45,5  
77  
114

30  
45,5  
77  
77

14,7  
15,4  
17  
18,2



# Rodéo Tilt

Code LPPR 4255116 + 4330036 (av.16 ans) / 4263950 (ap. 16 ans) - Code ISO 122707

Ref. 22961 / 22962 / 22963 / 22964

La poussette la plus adaptée pour le confort des enfants et des parents !

**Rodéo Tilt est un nouveau type de poussette permettant la bascule globale du siège. Très maniable avec ses roues avant pivotantes, elle est parfaitement ergonomique aussi bien pour les enfants que pour les parents.**

Cette poussette se plie et s'ouvre très facilement, tout en laissant les accessoires en place. Elle est également très robuste et durable.

L'assise, extensible en profondeur, ainsi que l'extension du dossier (accessoire), permettent de suivre la croissance de l'enfant et d'accroître la durée d'utilisation de la poussette. En option, l'angle assise-dossier est également réglable. De manière standard, le repose jambe est réglable en inclinaison jusqu'à l'horizontal. En option, elle peut être équipée d'un porte bouteille à O2 et d'un porte appareil de ventilation.



## CARACTÉRISTIQUES

- Bascule intégrale de l'assise de 5° à 45° ;
- Réglage de la profondeur d'assise ;
- Repose-bras escamotables ;
- Ceinture 2 points ;
- Repose-pieds : 1 palette monobloc réglable en hauteur et inclinaison. ;
- Revêtement en Cordura (fibre très résistante) ;
- Poignée de poussée réglable en hauteur ;
- Châssis gris métal ;
- Roues arrière increvables 29 cm Ø, à démontage rapide ;
- Roues avant increvables 19 cm Ø ;
- Frein central au pied.



## OPTION TRANSIT (uniquement à la commande de la poussette)



Rodéo Tilt peut être choisie en modèle "Transit" crash testé, c'est à dire, agréée sécurité routière. Elle pourra alors être utilisée comme un siège dans un transport en commun avec un amarrage de sol adéquat (non fourni). Elle apporte ainsi une sécurité maximale dans les véhicules de transport.

Rodéo Tilt Transit est équipée en standard :

- d'une extension de dossier ;
- d'un harnais rembourré 5 points ;
- de deux sangles de pieds ;
- et de 4 crochets d'ancrage.

CRUISER PLUS TRANSIT

REF.

- T 1 / T 2
- T 3 / T 4

22961T / 22962T  
22963T / 22964T

## DIMENSIONS

Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	REF.	AGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR D'ASSISE/SOL	HAUTEUR DOSSIER TOTALE	INCLINAISON REPOSE PIEDS (°)	HAUTEUR ASSISE REPOSE PIEDS
T 1	22961	3-5 ans	90-120	25,5	24-31,75	51	53,3	+/-20	23-35,5
T 2	22962	5-8 ans	107-127	30,5	28-35,5	53	56	+/-20	23-35,5
T 3	22963	8-12 ans	124-142	35,5	33-40,5	56	61	+/-20	28-40,5
T 4	22964	12-14 ans	132-155	40,5	30,5-45,5	56	63,5	+/-20	30,5-45,5

## Les + produit

- ✓ Revêtement déhoussable sans outils ;
- ✓ Grand nombre d'accessoires de positionnement souple pour un maintien personnalisé ;
- ✓ Châssis pliable façon canne pour un encombrement minimum.

### Coloris



BLEU



NOIR



VERT SAPIN



ROUGE





VIOLET



ROSE FUSHIA

## ACCESSOIRES POUR RODÉO TILT

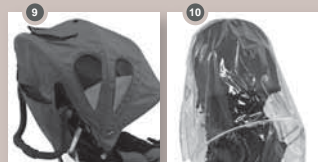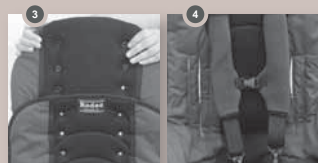

ACCESSOIRES	REF.
<b>Appui-tête</b>	
• T 1 / T 2	22976 / 22977
• T 3 / T 4	22978 / 22979
<b>Repose nuque</b>	
• T U	02762
<b>Extension de dossier</b>	
• T 1 / T 2	02067 / 02145
• T 3 / T 4	02146 / 02248
<b>Cales latérales escamotables</b>	
• T 1 / T 2	22896 / 22897
• T 3 / T 4	22898 / 22899
<b>Harnais en H rembourré (uniquement avec ceinture 3 points)</b>	
• T U	02117
<b>Ceinture 3 points</b>	
• T U	02209
<b>Gilet de maintien</b>	
• T 1 / T 2	23001 / 23002
• T 3 / T 4	23003 / 23004
<b>Tablette avec fixation</b>	
• T 1 / T 2	22955 / 22956
• T 3 / T 4	22957 / 22958
<b>Sangle d'écartement des jambes</b>	
• T 1 / T 2	22972 / 22973
• T 3 / T 4	22974 / 22975
<b>Sangle de mollets</b>	
• T U	22987
<b>Sangles de pieds</b>	
• T U	02113
<b>Capote standard</b>	
• T 1 / T 2	23105 / 23106
• T 3 / T 4	23107 / 22954
<b>Capote design sans fenêtre</b>	
• T 1 / T 2	28614 / 28615
• T 3 / T 4	28616 / 28617
<b>Capote design avec fenêtre</b>	
• T 1 / T 2	28618 / 28619
• T 3 / T 4	28620 / 28621
<b>Housse anti pluie (se fixe sur la capote)</b>	
• T 1 - T 2 - T 3	23120
• T 4	23121
<b>Support bouteille O2</b>	
• T U	23005

### Plateau support appareil respiration assistée

- T 1 / T 2 23006 / 23007
- T 3 / T 4 23008 / 23009

### Moustiquaire

- T 1 - T 2 - T 3 28602
- T 4 28603

### OPTIONS (À LA COMMANDE)

REF

### Dossier inclinable

- T1 / T2 22965 / 22966
- T3 / T4 22967 / 22968

### Protections latérales filet

- T1 / T2 22992 / 22993
- T3 / T4 22994 / 22995

### Roues avant 19 cm / arrière 31,7 cm increvables sculptées TT


02970

### Roues avant 19 cm / arrière 31,7 cm pneumatiques sculptées TT

02971

### Frein à main

- T3 / T4 22970/22971

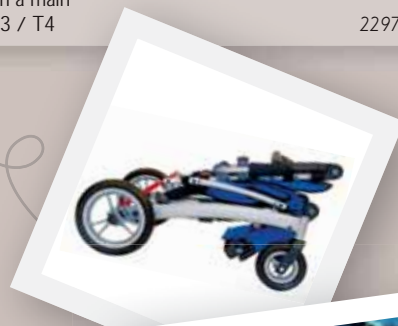

ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	INCLINAISON GLOBALE SIÈGE (°)	HAUTEUR HARNAIS	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	CHARGE MAXI TRANSIT	POIDS TOTAL
0-20	5-45	33-48,3	109	77,5	53	85	53	44,5	34	30	13,2
0-20	5-45	38-53	109	89	58,5	86	58,5	43	34	30	15
0-20	5-45	40,5-56	112	89	63,5	86	63,5	45,5	45,5	45,5	16,8
0-20	5-45	45,5-61	114	91,5	63,5	101,5	68,5	45,5	77	63,6	17,7

# POUSSETTES MULTIRÉGLABLES ÉVOLUTIVES



## Tom 4 Classic

Code LPPR 4261051 av. 16 ANS - Code ISO 122707

Réf. TOM 4 Classic 22650CL / 02266CL. / 02267CL.

Tom 4 Classic est une poussette multi-réglable et évolutive, conçue pour le confort des enfants à mobilité réduite, ainsi que celui de leurs parents. Pour améliorer ce confort, de nombreux accessoires de maintien sont disponibles.

Cette poussette s'adapte parfaitement à chaque enfant et suit sa croissance, tout en étant très maniable, pliable et robuste. De plus, le siège est amovible et peut être positionné soit dans le sens de la marche de la poussette, soit face au conducteur de la poussette. Elle existe en trois tailles et a de nombreux équipements en standard tels que l'agrément sécurité routière ISO7176/19, les amortisseurs, la poignée de poussée réglable, et le réglage de la largeur indépendamment des coussins latéraux.

### CARACTÉRISTIQUES

- Dossier réglable en hauteur ;
- Assise réglable en profondeur ;
- Assise réglable en largeur à l'aide de coussins latéraux ;
- Dossier réglable en inclinaison 0° à 180° ;
- Bascule intégrale de l'assise de 0° à 27° ;
- Ceinture 2 points ;
- Barre d'appui thoracique ;
- Repose-pieds, palette monobloc réglable en hauteur et inclinaison ;
- Revêtement vert avec cercles gris foncé. (SEULS CE COLORIS EST DISPONIBLE) ;
- Poignée de poussée réglable ;
- Châssis noir, crash testé en standard ;
- Roues avant increvables 20 cm Ø ;
- Roues arrière increvables 30 cm Ø ;
- Frein individuel au pied.



Coloris

### Les + produit

- ✓ Revêtement déhoussable sans outils ;
- ✓ Grand nombre d'accessoires pour maintien postural très personnalisé.

### DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions  
en cm

RÉF.

âge

AGE  
APPROXIMATIF  
USAGERTAILLE  
APPROXIMATIVE  
USAGERLARGEUR  
ASSISEPROFONDEUR  
ASSISEHAUTEUR  
DOSSIERHAUTEUR  
ASSISE REPOSE-  
PIEDSHAUTEUR  
ASSISE/SOLANGLE ASSISE  
DOSSIER (°)ANGLE ASSISE  
HORIZONTAL (°)

Dimensions en cm	RÉF.	AGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	HAUTEUR ASSISE/SOL	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)
Tom 4 Classic Mini	22650CL	2-4 ans	75-120	18/22/26	24-31	44-61	14-28	50	0-180	+/- 27
Tom 4 Classic	02266CL.	5-8 ans	95-130	20/24/26/31	27-35	51-65	20-35	60	0-180	+/- 27
Tom 4 Classic Maxi	02267CL.	8-12 ans	112-147	22/26/28/35	32-40	56-67	24-40	60	0-160	+/- 25



**Tom 4 duo**  
**Poussette double**  
Réf. 02268 Disponible sur demande



**ACCESSOIRES POUR TOM 4 CLASSIC**



\* Le châssis d'intérieur est réglable en hauteur de 97 à 120 cm et permet l'inclinaison du siège de 0-27°



ACCESSOIRES	REF.
Appui-tête	
• T S	02296
• T M	02270
Repose nuque	
• T S	22720
• T M	02272
Cale de tête	
• T XS	22890
• T S	22796
• T M	02289
Cales latérales de corps	
• T S	22797
• T M	02275
• T L	22750
Cale d'abduction	
• T S	02277
• T M	02276
Harnais gilet	
• T XS	22820
• T S	02281
• T M	02282
Harnais en H	
• T XS	22799
• T S	22792
• T M	02280
Harnais 5 points	
• T S	22800
• T M	22801
Tablette	02290
Sangles de pied	02283
Capote	02278
Housse anti pluie (se fixe sur la capote)	
• T M	02284
• T L	02285
Sac thermique	
• T S	22870
• T M	02287
• T L	02288
Panier tissu Tom 4	02294
Châssis d'intérieur *	02286
Interface CSI (permet de fixer une coquille à la place du siège)	sur demande
Protections latérales enveloppantes	22790
Protections latérales	02293
Sangle abdominale	
• T S	22842
• T M	22843
• T L	22844



HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
101/115	61	86	93	61	55	35	17,5
101/115	61	86	93	61	55	35	18,5
103/118	65	92	96	65	63	50	21



# Bug GREYline

Code LPPR 4261051 4314853 4357319 - Code ISO 122707

Réf. Voir tableau



**La seule poussette dont l'inclinaison globale du siège est incorporée dans le siège et non dans la base !**

La poussette Bug GREYline est très maniable. Elle convient à des enfants de 6 mois à 16 ans : très évolutive, elle s'adapte à la croissance de l'enfant. Les réglages d'inclinaison globale et d'inclinaison du dossier sont particulièrement ergonomiques, simples et continus, sans aucune secousse. Le siège Bug peut être placé sur 2 châssis différents : extérieur ou intérieur. Grâce à l'inclinaison globale intégrée dans le siège (et non dans le châssis), le siège Bug peut être posé sur n'importe quelle surface plane, lors d'un transfert, sans modifier les réglages de posture.

## CARACTÉRISTIQUES

- Dossier réglable en hauteur et dossier réglable en inclinaison 90° à 130° ;
- Assise réglable en profondeur et en largeur ;
- Bascule intégrale de l'assise ;
- Coussin de confort appui-tête ;
- Poignée de poussée réglable en hauteur ;
- Repose-pieds, palette monobloc réglable en hauteur et inclinaison ;
- Roues arrière increvables châssis 1-2 : 25cm Ø ; châssis 3-4:30 cm Ø ;
- Roues avant increvables 17 cm Ø ;
- Blocage directionnel des roues avant ;
- Amortisseurs sur les montants arrière du châssis ;
- Frein individuel au pied ;
- Châssis aluminium noir ;
- Ceinture 2 points 45° et panier filet en standard (offerts cette année) ;
- Tissu plus respirant.

## RÉFÉRENCES et Coloris




Nouvelles couleurs de revêtement  
Nouvelle couleur de châssis

Gris foncé



	Gris foncé			
Taille S	22404	22406	22420	22422
Taille M	22402	22408	22421	22423

Gris clair

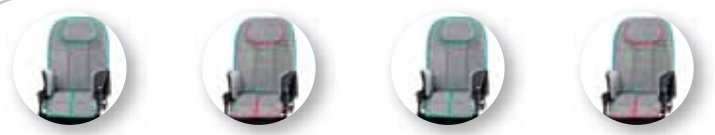

	Gris clair			
Taille S	22409	22401	22424	22426
Taille M	22411	22403	22425	2242

## DIMENSIONS

Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	TAILLE USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR D'ASSISE/SOL	HAUTEUR DOSSIER	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)	HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE
T S	90-122	20-30	20-30	53	52-62	40	18-30	0-35	78-107
T M	120-150	25-36	30-40	53	60-75	40	30-40	7-30	89-122

## Les + produit

- ✓ Inclinaison et bascule de l'assise en continu grâce aux systèmes d'inclinaison et de bascule d'assise très ergonomiques (vérin à gaz) ;
- ✓ Revêtement déhoussable sans outils et lavable ;
- ✓ Grand nombre d'accessoires pour un maintien postural très personnalisé ;
- ✓ Assise reversible en taille S.

### ACCESSOIRES POUR BUG NC



ACCESSOIRES	RÉF.	
Appui-tête multi réglable avec supports pariétaux et occipital	22141 / 22241	1
• T S / T M		
Appui-tête réglable avec supports pariétaux	22137 / 22237	2
• T S / T M		
Appui-tête ergonomique multi réglable avec supports pariétaux et occipital	22295 / 22296 22294	3
• T S / T M		
• T L (cas spécial ex : hydrocéphalie)		
Appui-tête formé	22410 22407	
• T S		
• T M		
Cales latérales	22135 / 22235	4
• T S / T M		
Cales latérales enveloppantes	22143 / 22243	5
• T S / T M		
Cale d'abduction réglable en profondeur	22033 / 22015	6
• T S / T M		
Cale d'abduction réglable en profondeur et en écartement	22297 / 22298	
• T S / T M		
Ceinture en Y 4 points	22260 / 22261	7
• T S / T M		
Harnais gilet 4 points	22138 / 22238	8
• T S / T M		
Harnais gilet 5 points	22140 / 22240	9
• T S / T M		
Harnais 5 points	22438 / 22439	
• T S / T M		
Barre d'appui thoracique de maintien	22027 / 22028	
• T S / T M		
Tablette transparente	22134 / 22234	10
• T S / T M		
Tablette blanche spéciale pour repas (matériel hygiénique)	22034 / 22035	11
• T S / T M		
Sangles d'écartement des jambes	02430 / 22440	12
• T S / T M		
Sangles de pieds	22434 / 22435	13
• T S / T M		
Protection repose pied	22266 / 22267	
• T S / T M		
Pack Plein air (capote et housse pluie)	22280 / 22281 22282 / 22283	
• T S rose / T S vert menthe		
• T M rose / T M vert menthe		
Capote	22128 / 22123 22124 / 22405	14
• T S rose / T S vert menthe		
• T M rose / T M vert menthe		
Housse anti pluie (se fixe sur la capote)	22132 / 22232	15
• T S / T M		
Ombrelle	22126 22125	
• T U gris foncé		
• T U gris clair		
Sac thermique	22130 / 22230	16
• T S / T M		
Support appareil de respiration	22270 / 22271	17
• T S / T M		
Porte bouteille	22273	18
• T U		
Planche roulette	22272	19
• T U		
Kit 4 points d'ancrage	22043	20
• T U		
Kit frein à main	22268 / 22060	
• T S / T M		

Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar
DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS SIÈGE	POIDS DU CHÂSSIS
17/25	102	69-92	57	81	57	29	35	8,5	9,5
17/30	112	82-106	62	94	62	36	45	11,5	10,5



# Stingray

Code LPPR 4261051 4314853 - Code ISO 122707

Réf. 2282x1 / 2282x2 (Autres versions : voir bon de commande détaillé)



La rencontre du confort et de l'esthétisme !

**Stingray propose 2 tailles de siège pour 1 même châssis : plus économique pour suivre la croissance de l'enfant.**

Stingray a été conçue pour des enfants ayant besoin de confort et d'un bon maintien postural. Grâce à son châssis carbone, elle offre un design agréable et moderne, tout en apportant fonctionnalité et légèreté. Cette poussette est très pratique : son siège pivote facilement et instantanément de 180°, avec l'enfant déjà installé. L'enfant peut ainsi être placé face à la route ou face à l'accompagnant, de manière rapide et efficace. Stingray offre également un confort d'installation optimal, grâce à de nombreux accessoires qui permettent la personnalisation du siège, et sa grande maniabilité lui confère un réel confort d'utilisation.



## CARACTÉRISTIQUES

- Dossier réglable en hauteur ;
- Assise réglable en profondeur et en largeur ;
- Dossier réglable en inclinaison 90 à 120° ;
- Bascule intégrale de l'assise ;
- Coussin de confort appui-tête ;
- Ceinture 2 points ;
- Repose-pieds, palette monobloc réglable en hauteur et inclinaison ;
- Poignée de poussée réglable en hauteur ;
- Châssis carbone ;
- Amortisseurs réglables sur les montants arrière du châssis ;
- Roues avant increvables 19 cm Ø ;
- Blocage directionnel des roues avant ;
- Roues arrière increvables 29 cm Ø ;
- Frein individuel au pied châssis 4 roues.

### Coloris



## Les + produit

- ✓ Assise pivotante à 180° même avec l'enfant en place dans la poussette ;
- ✓ Inclinaison et bascule de l'assise en continu grâce aux systèmes d'inclinaison et de bascule d'assise très ergonomiques (vérin à gaz) ;
- ✓ Revêtement déhoussable sans outils et lavable ;
- ✓ Grand nombre d'accessoires pour un maintien postural très personnalisé.

## DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	REF.	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	LARGEUR ASSISE	LARGEUR ENTRE ACCOUDOIRS	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR D'ASSISE/SOL	HAUTEUR DOSSIER	LARGEUR INTERNE DOSSIER	LARGEUR EXTERNE DOSSIER
T 1	2282X1YYZ*	59-116	30	18-22-26	18-30	52	41-55	30	45
T 2	2282X2YYZ*	75-136	35	23-27-31	25-40	52	50-65	36	52

\* Dans la référence, remplacer X,YY et Z par les codes suivants, en fonction des caractéristiques choisies : X : Roues pneumatiques = 1 , Roues increvables = 2 YY : Frein standard = FS, Frein central = FC, Frein à main = FM  
Bleu = B, Rouge = R, Vert = V, Rose = P et Gris = G



Pivote à 180°



## OPTIONS

- Roues increvables (standard) ou roues pneumatiques ;
- 2 roues avant pivotantes 19 cm et 2 roues arrière 29 cm à démontage rapide (standard) ou 4 roues 29 cm tout terrain (sans démontage rapide) ;
- 3 types de frein (indépendants de la pression des pneus) : frein standard : FS (frein individuel/roue), frein central par barre au pied : FC ou frein à main : FM. Possibilité de choisir frein central et frein à main : FCFM.

## ACCESSOIRES POUR STINGRAY



ACCESSOIRES	REF.	
Appui-tête coussin *		1
• T 1 / T 2	22919 / 22920	
Appui-tête anatomique		2
• T 1 / T 2	22924 / 22925	
Appui-tête anatomique multiréglable		
• T 1 / T 2	22933 / 22934	
Cales latérales de tronc		3
• T 1 H = 10 x P = 10 cm	22907	
• T 2 H = 12,5 x P = 13,5 cm	22908	
Cale d'abduction		4
• T 1 / T 2	22909 / 22910	
• T 3	22911	
Harnais en X néoprène		5
• T 1 / T 2	09057 / 09058	
Harnais 5 points		
• T 1 / T 2	22940 / 22941	
Harnais gilet		6
• 6 tailles	sur demande	
Tablette transparente		7
• T 1 L = 46 x P = 41 cm	22912	
• T 2 L = 51 x P = 48 cm	22913	
Barre d'appui thoracique		8
• T 1 L = 36 cm	22914	
• T 2 L = 41 cm	22915	
Capote*		9
• T 1 / T 2	22901 / 22902	
Housse anti pluie (se fixe sur la capote)		10
• T 1 / T 2	22926 / 22927	
Sac thermique		11
• T 1 / T 2	22928 / 22929	
Sac à dos		12
• T 1 / T 2	22916 / 22917	
Panier filet (sous assise)		
• T U	22918	
Porte bouteille oxygène		13
• T U	22944	
Support appareil de ventilation		14
• T U	22945	
Kit de transport		
• T U	22900	
Cale anti glissement (36 x 16 x 2,5 cm)		15
• T U	22903	

HAUTEUR ASSISE  
REPOSE-PIEDS14-32  
14-45ANGLE ASSISE  
DOSSIER (°)90-120  
90-120ANGLE ASSISE  
HORIZONTAL  
(°)0-20  
0-20HAUTEUR  
POIGNÉE  
DE POUSSÉE100,103,106  
100,103,106DIAMÈTRE  
ROUES AV/ARR19/29  
19/29LONGUEUR  
HORS  
TOUT74  
74LARGEUR  
HORS  
TOUT59  
59LONGUEUR  
PLIÉE90  
90LARGEUR  
PLIÉE  
(SANS ROUES)59  
59HAUTEUR  
PLIÉE49  
49CHARGE  
MAXI40  
40POIDS  
CHÂSSIS13,5  
13,5POIDS  
SIÈGE5,5  
5,5

## 2. Sièges de positionnement

### Pourquoi proposons-nous des sièges de positionnement ?

- Des sièges auto, parce que voyager en sécurité est une obligation.
- Des sièges de positionnement parce que assoir un enfant lui permet de participer aux activités quotidiennes. Parce que la position assise favorise les fonctions corporelles; comme la digestion et la respiration. Parce que cette position maximise l'indépendance et la communication.



#### 2.1 DISPOSITIF DE MAINTIEN POSTURAL

2.1.1	Cocoon .....	27
-------	--------------	----

#### 2.2 SIÈGES DE POSITIONNEMENT MODULABLES ÉVOLUTIFS

2.2.1	XPanda .....	28-29
2.2.2	Châssis Hobas pour XPanda .....	30
2.2.3	Tom 4 sur base d'intérieur .....	31
2.2.4	Bug NC sur base d'intérieur .....	32
2.2.5	Stingray sur base d'intérieur .....	33

# DISPOSITIF DE MAINTIEN POSTURAL



## Cocoon


Réf. voir tableau

Nous connaissons tous la grande satisfaction des moments partagés avec la famille et les amis.

Trouver une assise confortable pour une personne ayant besoin de maintien personnalisé n'est pas facile.

Le Cocoon apporte LA solution : une assise nomade unique qui se focalise sur la simplicité d'utilisation, la polyvalence et la facilité de transport.

Le Cocoon est 2 en 1 car il s'utilise aussi bien sur une chaise qu'à même le sol selon l'activité de l'utilisateur.

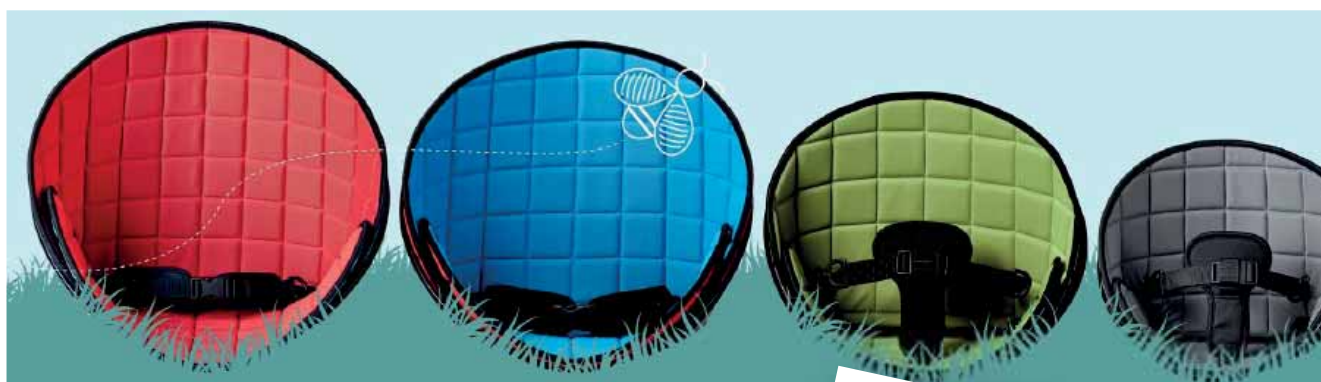

## CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation sur une chaise (à l'aide des 2 sangles fournies) ou à même le sol ;
- Assemblage facile sans outils ;
- Coussin amovible ;
- Harnais 3 points ;
- Nettoyage facile ;
- Housse réversible ;
- 2 poignées pour un transport facile.



## RÉFÉRENCES

TAILLES	COLORIS	REF.
Taille 1	ROUGE & BLEU	30441
	GRIS & VERT	30442
Taille 2	ROUGE & BLEU	30443
	GRIS & VERT	30444
Taille 3	ROUGE & BLEU	30445
	GRIS & VERT	30446
Taille 4	ROUGE & BLEU	30447
	GRIS & VERT	30448

## Coloris



ROUGE & BLEU

GRIS & VERT

## DIMENSIONS

Dimensions en cm	LARGEUR BASSIN	HAUTEUR ÉPAULE-BASSIN	POIDS MAX. UTILISATEUR
Taille 1	15-21	33-38	15
Taille 2	21-24	38-42	22
Taille 3	24-27	42-47	29
Taille 4	27-38	47 et +	70



# SIÈGES DE POSITIONNEMENT MODULABLES ÉVOLUTIFS



## X Panda

Code LPPR 1269336

Réf. 09001 / 09002 / 09003 / 09101



Siège dynamique, multi réglable et évolutif.

**X Panda remplace avantageusement les “coquilles moulées”.**  
Il s'adapte parfaitement à la morphologie de l'enfant,  
suit sa croissance et reste donc parfaitement adapté durant  
des années.

Il existe en 4 tailles et convient à des enfants à partir de 6 mois (taille 1) jusqu'à 16 ans (taille 4). Il peut également être réutilisé par d'autres enfants puisqu'il est réglable en tous points ! Chaque taille se décline en 3 largeurs. Le dossier dynamique laisse l'utilisateur libre de ses mouvements et lui permet de s'étirer en poussant sur le dossier contre une résistance légère, puis de retrouver sa position initiale. Cette extension peut être bloquée à tout moment, par exemple durant les repas. Le siège offre aussi un bon maintien de la position du bassin.

### Coloris



VERT POMME



ROUGE



BLEU



NOIR

FUSHIA  
(sauf T4)

### CARACTÉRISTIQUES

- Chaque taille de siège est réglable sur 10 cm en largeur, profondeur et hauteur pour grandir avec l'enfant ;
- Dossier inclinable qui permet de modifier l'angle d'assise ;
- Assise avec supports de cuisses réglables individuellement en profondeur et en abduction pour ajuster l'abduction (même de façon asymétrique) selon la morphologie de l'utilisateur ;
- Mouvement dynamique du dossier, réglable pour convenir à tout utilisateur ;
- Angle d'abduction de chaque jambe de 0° à 15°.

Le siège X Panda est livré en standard avec :

- un coussin d'assise ;
- un coussin de dossier ;
- une ceinture en Y ;
- un jeu de 2 cales d'assise pour un positionnement personnalisé ;

Le siège X Panda doit être posé sur un châssis support.

### RÉFÉRENCES

	COUSSINS SUPPLÉMENTAIRES					
	COUSSINS DE DOSSIER			COUSSINS D'ASSISE		
	S	M	L	S	M	L
T 1	09000	09006	09009	09012	09015	09018
T 2	09004	09007	09010	09013	09016	09019
T 3	09005	09008	09011	09014	09017	09020
T 4	09100	09106	09109	09112	09115	09118

### DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM



Dimensions en cm

TAILLE	RÉF.*	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER TOTALE	LARGEUR DOSSIER	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	LARGEUR HORS TOUT (avec abduction max)	POIDS	CHARGE MAXI	POIDS de l'utilisateur en transport
T 1	09001-S/M/L	16/20/24	16-26	27-37	23	-5°+30°	31/35/39	6,5	45	45
T 2	09002-S/M/L	20/24/28	22-33	32-42	28	-5°+30°	38/42/46	8,5	50	50
T 3	09003-S/M/L	26/31/36	26-39	35-47	33	-5°+30°	47/52/57	13	60	57
T 4	09101-S/M/L	36/40/46	33-53	49-68	35+5	-5°+30°	59/65/71	13	80	57

\*Préciser à la commande la largeur d'assise (S, M ou L), en plus de la taille choisie.

Catalogue Positionnement et Mobilité 2019 *Developper l'espace de liberté*



Dossier dynamique



## ACCESSOIRES POUR X PANDA

ACCESSOIRES	RÉF.
<b>Appui-tête anatomique</b>	
• T 1	55017
• T 2 - T 3	55018
• T 4	55019
<b>Supports d'épaule (20cm)</b>	
• T 1 - T 2	55115
• T 3 - T 4	55116
<b>Cales latérales escamotables 10 x 10 cm (paire)</b>	
• T U	09056
<b>Réglage rapide pour cales latérales escamotables</b>	
• T U	09099
<b>Cales latérales fixes</b>	
• T S : L = 15 x H = 6,5 cm	09035
• T L : L = 19 x H = 9 cm	09034
<b>Cale d'abduction</b>	
• T 0 / T 1	09067 / 09068
• T 2 / T 3	09069 / 09070
• T 4	09071
<b>Harnais en X (néoprène)</b>	
• T 1 / T 2	09057 / 09058
• T 3 - T 4	09059
<b>Accoudoirs réglables</b>	
• T 1 / T 2	09037 / 09038
• T 3 / T 4	09039 / 09137
<b>Tablette (se pose sur accoudoirs)</b>	
• T 1	09042
• T 2 - T 3	09043
• T 4	09142
<b>Repose bras pour tablette</b>	
• T U	09044
<b>Jeu de 2 cales d'assise</b>	
• T 1 (6 cm)	09045
• T 1 - T 2 (8 cm)	09046
• T 1 - T 2 - T 3 (10 cm)	09047
• T 2 - T 3 (12 cm)	09048
• T 3 (15 cm)	09049
• T 4 (18 cm)	09145





# Châssis roulants Hobas porte siège X Panda

Code LPPR 1279027 et 4233570

Réf : voir tableau

Les châssis roulants porte siège X Panda sont équipés d'un adaptateur coulissant permettant de supporter en toute sécurité le siège multi-réglable évolutif X Panda, ou tout autre siège ou coquille.

## CARACTÉRISTIQUES

- Inclinaison du siège sur 40° par vérin à gaz ;
- Châssis réglables en hauteur sur une grande amplitude, de 30 cm du sol jusqu'à la hauteur d'une table à manger, ce qui permet leur adaptation lors de toutes les activités de la vie quotidienne, aussi bien à la maison qu'à l'école ou encore en institution ;
- Châssis pouvant être choisis avec vérin électrique ou avec vérin à gaz ou hydraulique ;
- Adaptateur pour XPanda livré en standard sur les 2 types de châssis ;
- La référence du repose-pied doit être ajoutée à la référence du châssis choisi.

## ACCESSOIRES POUR CHÂSSIS HOBAS

ACCESSOIRES	RÉF.
Poignée de poussée (pour châssis d'intérieur uniquement)	
• T U	09027
Adaptateur standard pour coquille sur châssis Hobas	
• T U	09080
Plaque pour fixation de siège (dans l'adaptateur réf.09080)	
• T U	02329-2
Repose-pied monobloc	
• T 1 / T 2	09050 / 09051
• T 3 - T 4	09052
Repose-pied séparé	
• T 1 / T 2	09053 / 09054
• T 3 - T 4	09055
Kit 4 points d'ancrage (pour châssis d'extérieur uniquement)	
• Hobas gaz et électrique	09095
• Hobas hydraulique	09096



Dimensions en cm

## CHÂSSIS HOBAS D'INTÉRIEUR

Code LPPR 1279027

Utilisé pour l'école ou le domicile, ce châssis est équipé de 4 roulettes blocables individuellement. Le châssis d'intérieur peut aussi recevoir un siège de poussette Stingray (avec adaptateur). Poignée de poussée en option.

RÉF.	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	HAUTEUR HORS TOUT	INCLINAISON PLAQUE DE SIÈGE (*)	POIDS	CHARGE MAXI	
Châssis HOBAS d'intérieur GAZ pour X-PANDA T1/2*	09021	69	56	17-60	-10/+30°	12,5	45-50
Châssis HOBAS d'intérieur GAZ pour X-PANDA T.3*	09022	78	62	25-61	-10/+30°	14	60
Châssis HOBAS d'intérieur hydraulique pour X-PANDA T3 et plus petit*	09093	78	62	22-58	-10/+30°	16,5	60
Châssis HOBAS d'intérieur ELECT pour X-PANDA T1/2*	09023	69	56	17-60	-10/+30°	13	45-50
Châssis HOBAS d'intérieur ELECT pour X-PANDA T3 et plus petit*	09024	78	62	25-62	-10/+30°	16,5	60
Châssis HOBAS d'intérieur ELECT pour X-PANDA T4 et plus petit*	09123	78	62	26-55	-10/+30°	17	80

\* utilisateur + siège + accessoires



Dimensions en cm

## CHÂSSIS HOBAS D'EXTÉRIEUR

Utilisé pour le déplacement en extérieur, ce châssis est également agréé pour le transport en véhicule à moteur (en ajoutant l'accessoire « kit 4 points d'ancrage »). Ce châssis est équipé de roues Ø30 cm à l'arrière et d'un frein central. Le châssis d'extérieur est également équipé d'un système anti basculement. Poignée de poussée incluse.

RÉF.	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	HAUTEUR HORS TOUT	INCLINAISON PLAQUE DE SIÈGE (*)	POIDS	CHARGE MAXI	
Châssis HOBAS d'extérieur GAZ pour X-PANDA T1/2*	09025	96	62	26-70	-10/+30°	17,5	43 (45-50 hors transport)
Châssis HOBAS d'extérieur GAZ pour X-PANDA T3 et plus petit*	90250	111	62	33-64	-10/+30°	20	60 (60 hors transport)
Châssis HOBAS d'extérieur hydraulique pour X-PANDA T3 et plus petit*	09092	111	62	43-59	-10/+30°	20,5	43 (60 hors transport)
Châssis HOBAS d'extérieur ELECT pour X-PANDA T1/2*	09065	96	62	26-70	-10/+30°	18	43 (45-50 hors transport)
Châssis HOBAS d'extérieur ELECT pour X-PANDA T3 et plus petit*	09066	111	62	33-64	-10/+30°	20,5	43 (60 hors transport)

\* utilisateur + siège + accessoires



# Siège Tom 4 sur base d'intérieur

Code LPPR 1269336

Réf : voir tableau

## CARACTÉRISTIQUES

- Dossier réglable en hauteur ;
- Assise réglable en profondeur ;
- Assise réglable en largeur à l'aide de coussins latéraux ;
- Dossier réglable en inclinaison 0° à 180° ;
- Bascule intégrale de l'assise de 0° à 27° ;
- Ceinture 2 points ;
- Barre d'appui thoracique ;
- Repose-pieds, palette monobloc réglable en hauteur et inclinaison ;
- Revêtement vert et gris foncé. (SEULS CES COLORIS SONT DISPONIBLES).

## Les + produit

- ✓ Une seule assise pour 2 utilisations ;
- ✓ Revêtement déhoussable sans outils et lavable ;
- ✓ Grand nombre d'accessoires pour un maintien postural très personnalisé.



Siège Tom 4 Classic

## DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	RÉF. (AVEC ROUES AV. PIVOTANTES)	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	HAUTEUR ASSISE/SOL	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)
Siège Tom 4 Mini Classic	22650CL	2-4 ans	75-120	18/22/26	24-31	44-61	14-28	50	0-180	+/- 27
Siège Tom 4 Classic	02266CL	5-8 ans	95-130	20/24/26/31	27-35	51-65	20-35	60	0-180	+/- 27
Siège Tom 4 Maxi Classic	02267CL	8-12 ans	112-147	22/26/28/35	32-40	56-67	24-40	60	0-160	+/- 25




## Châssis d'intérieur à hauteur variable, pour siège Tom 4

Code LPPR 1279027 et 4233570

Réf. Voir tableau

### Châssis pour siège Tom 4

Dimensions en mm	TAILLE	RÉF*	LONGUEUR TOTALE	LARGEUR TOTALE	HAUTEUR HORS TOUT	POIDS TOTAL (kg)	CHARGE MAXI (kg)
Châssis pour siège Tom 4	Standard	29201	880	460	970	15	35
	Maxi	29202	880	460	970	17	50
	SuperMaxi	29203	880	460	970	17,5	75

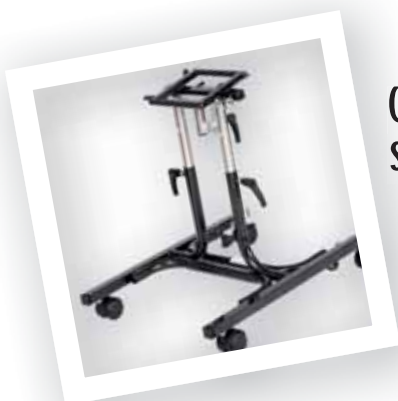



# Siège Bug GREYline sur base d'intérieur

Code LPPR 1269336 - Réf : voir tableau



## CARACTÉRISTIQUES

- Dossier réglable en hauteur ;
- Assise réglable en profondeur et en largeur ;
- Dossier réglable en inclinaison 90° à 130° ;
- Bascule intégrale de l'assise ;
- Coussin de confort appui-tête ;
- Ceinture 2 points ;
- Repose-pieds, palette monobloc réglable en hauteur et inclinaison.

## Les + produit

- ✓ Une seule assise pour 2 utilisations ;
- ✓ Inclinaison et bascule de l'assise en continu (vérin à gaz) ;
- ✓ Grand nombre d'accessoires pour un maintien postural très personnalisé.

## RÉFÉRENCES et Coloris

	REF.	
Gris foncé	Bordures Vert	Bordures Rose
Taille S	22042	22047
Taille M	22049	22054

	REF.	
Gris clair	Bordures Vert	Bordures Rose
Taille S	22041	22044
Taille M	22048	22053

## DIMENSIONS

Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	TAILLE	TAILLE USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR D'ASSISE/SOL	HAUTEUR DOSSIER	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)
Siège Bug GREYline	T S	90-122	20-30	20-30	53	52-62	40	18-30	0-35
	T M	120-150	25-36	30-40	53	60-75	40	30-40	7-30



# Châssis d'intérieur à hauteur variable, pour siège Bug GREYline

Code LPPR 1279027 et 4233570

Réf. 22022 / 22032

Le châssis d'intérieur est un bon complément de la poussette.

**Il permet une installation optimale de l'enfant à l'école comme à la maison.**

Le siège se retire aisément de son châssis d'extérieur et peut-être placé sur le châssis d'intérieur, afin d'offrir une chaise haute (hauteur d'assise 73 cm) ou une chaise basse (hauteur d'assise 47 cm).

- Course de réglage 40 cm ;
- Equipé de 4 roues avec freins Ø 10 cm ;
- Réglage en hauteur par vérin à gaz actionné par une pédale.



Dimensions en cm	TAILLE	REF.	HAUTEUR ASSISE/SOL	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
Châssis pour siège Bug GREYline	T S	22022	35-61	56	79	35	14,5
	T M	22032	35-61	62	83	45	14,5





# Siège Stingray sur base d'intérieur

Code LPPR 1269336

Réf : voir tableau

## CARACTÉRISTIQUES

- Dossier réglable en hauteur ;
- Assise réglable en profondeur et en largeur ;
- Dossier réglable en inclinaison 90 à 120° ;
- Bascule intégrale de l'assise ;
- Coussin de confort appui-tête ;
- Ceinture 2 points ;
- Repose-pieds, palette monobloc réglable en hauteur et inclinaison ;

## Les + produit

- ✓ Une seule assise pour 2 utilisations ;
- ✓ Inclinaison et bascule de l'assise en continu (vérin à gaz) ;
- ✓ Revêtement déhoussable sans outils et lavable ;
- ✓ Grand nombre d'accessoires pour un maintien postural très personnalisé.

## DIMENSIONS

Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur

[www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	TAILLE	RÉF.	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	LARGEUR ASSISE	LARGEUR ENTRE ACCOUDOIRS	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR D'ASSISE/SOL	HAUTEUR DOSSIER	LARGEUR INTERNE DOSSIER	LARGEUR EXTERNE DOSSIER	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTALE (°)
	T1	22911X	59-116	30	18-22-26	18-30	52	41-55	30	45	14-32	90-120	0-20
	T2	22922X	75-136	35	23-27-31	25-40	52	50-65	36	52	14-45	90-120	0-20

\* Dans la référence, remplacer le X, par les lettres suivantes, en fonction de la couleur choisie : Bleu = B, Rouge = R, Vert = V, Rose = P et Gris = G.



## Châssis d'intérieur pour siège Stingray réglable par vérin à gaz

Code LPPR 1279027 et 4233570

Réf. 22937 / 22938



Utilisé pour l'école ou le domicile, ce châssis est équipé de 4 roulettes blocables individuellement.

Poignée de poussée en option.

Dimensions en cm	TAILLE	RÉF.	HAUTEUR ASSISE/SOL	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
	1-2	22937	35-61	56	69	70	13,2
	3-4	22938	26-62	56	78	45	14,4

### 3. Aides à la marche et Déambulateurs



# Pourquoi proposons-nous plusieurs types d'aides à la marche ?

- Parce que la liberté de déplacement est essentielle.
- Parce que la sécurité lors des déplacements des enfants et des adultes doit primer.
- Parce que chaque personne est unique et que ses besoins en maintien, en positionnement, en confort et en verticalisation pendant la marche le sont tout autant.
- Parce que se tenir debout et être autonome favorise le bien-être physique et moral.

CREE répond aux différents besoins et propose de nombreuses options visant à personnaliser au maximum les aides à la marche par rapport à la pathologie, à la morphologie, à l'environnement et à l'activité quotidienne et professionnelle de la personne en situation de handicap. De ce fait CREE distingue 2 types d'aides à la marche : les déambulateurs et les déambulateurs verticalisateurs.

## DEAMBULATEURS

Besoin d'une assistance légère pour les déplacements (en rampant pour les tout-petits, en marchant pour les plus grands), en toute sécurité et dans le plus grand confort.

## DEAMBULATEURS VERTICALISATEURS

Besoin de maintien et de sécurité pour l'acquisition de la marche.

Tableau des caractéristiques ..... 36-37

### 3.1 DÉAMBULATEURS

3.1.1 Crocodile ..... 38-39

### 3.2 DÉAMBULATEURS VERTICALISATEURS

3.2.1 Grillo G2 ..... 40 à 43

3.2.2 Mustang ..... 44-45

3.2.3 Dynamico intérieur ..... 46

3.2.4 Dynamico extérieur ..... 47

*Nouveauté*



## DEAMBULATEURS

### CROCODILE



## DEAMBULATEURS VERTICAUX

### GRILLO G2 antérieur



### GRILLO G2 postérieur



Usager 8 à 24 mois

Référence	02375	29901	29903
Taille approx. usager (en cm)	115	90-135	90-135
Charge maxi (en kg)	30	45	45
Hauteur anneau pelvien (en cm)	-	49-84	49-84
Hauteur sous axillaire (en cm)	-	-	-

Usager 3 à 5 ans

Référence	02375	29901	29903
Taille approx. usager (en cm)	115	90-135	90-135
Charge maxi (en kg)	30	45	45
Hauteur anneau pelvien (en cm)	-	49-84	49-84
Hauteur sous axillaire (en cm)	-	-	-

Usager 6 à 8 ans

Référence	02375	29901	29903
Taille approx. usager (en cm)	115	90-135	90-135
Charge maxi (en kg)	30	45	45
Hauteur anneau pelvien (en cm)	-	49-84	49-84
Hauteur sous axillaire (en cm)	-	-	-

Usager 8 à 12 ans

Référence	02376 (-N)	29902	29904
Taille approx. usager (en cm)	150	110-160	110-160
Charge maxi (en kg)	45	90	90
Hauteur anneau pelvien (en cm)	-	54-100	54-100
Hauteur sous axillaire (en cm)	-	-	-

Usager adolescent

Référence	02376 (-N)	29902	29904
Taille approx. usager (en cm)	150	110-160	110-160
Charge maxi (en kg)	45	90	90
Hauteur anneau pelvien (en cm)	-	54-100	54-100
Hauteur sous axillaire (en cm)	-	-	-

Usager adulte

Référence	02370	29960	29961
Taille approx. usager (en cm)	180	150-190	150-190
Charge maxi (en kg)	80	110	110
Hauteur anneau pelvien (en cm)	-	63-117	63-117
Hauteur sous axillaire (en cm)	-	-	-

# LISATEURS

## MUSTANG



## DYNAMICO INTERIEUR



## DYNAMICO EXTERIEUR



**29731**

-  
30  
-  
38-65

**02500**

-  
40  
44-60  
52-70

**29731**

-  
30  
-  
38-65

**02500**

-  
40  
44-60  
52-70

**29702**

-  
40  
-  
60-80

**02510**

-  
55  
66-82  
77-95

**02516**

-  
55  
71-87  
82-100

**29703**

-  
60  
-  
70-95

**02520**

-  
70  
77-102  
89-116

**02526**

-  
70  
82-107  
94-121

**29704**

-  
80  
-  
87-130

**02530**

-  
85  
85-112  
92-126

**02536**

-  
85  
90-117  
97-131

**02538**

-  
100  
98-120  
108-143

**02537**

-  
100  
103-125  
113-148

# DÉAMBULATEURS



## Crocodile

Code LPPR 1285619 - Code ISO 120606

Réf. 02375 / 02376 / 02376-N / 02370



Déambulateur / aide à la marche

**Crocodile est un déambulateur inversé : il se place derrière l'enfant ; ce qui facilite son accès aux différentes activités.**

Les poignées ajustables peuvent être réglées individuellement afin d'adapter le déambulateur à l'enfant, offrant ainsi un maintien et une stabilité maximum. Léger, Crocodile est facile à manœuvrer et très sécurisant. Grâce à son châssis pliant, le transport et le rangement sont également facilités. Crocodile existe en 3 tailles et convient aux enfants âgés de 2 à 17 ans.

### CARACTÉRISTIQUES



- Cadre pliable en aluminium et ABS ;
- Poignées multi réglables en largeur et en hauteur ;
- Châssis du haut ajustable en hauteur ;
- Revêtement mousse sur le cadre haut ;
- Roues avant pivotantes avec stabilisateur directionnel ;
- Roues increvables à l'avant et à l'arrière ;
- Frein progressif sur roues arrières ;
- Butées anti-recul.



### DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	TAILLE	REF	TAILLE USAGER	LARGEUR ENTRE POIGNÉES	HAUTEUR CADRE HAUT	HAUTEUR POIGNÉES	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉ	HAUTEUR PLIÉ	DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
Crocodile	T 1	02375	115	27-55	49-66	39-70	72	62	72	31	15/20	30	5,5
	T 2	02376 02376-N	150	32-60	65-82	55-88	84	69	86	27	15/20	45	6,5
	T 3	02370	180	35-69	77	70-100	87	69	100	29	15/20	80	12

Coloris .....



JAUNE  
TAILLE 1



ORANGE  
TAILLE 2




NOIR  
TAILLES 2/3  
(RÉF. 02376-  
N/02370)

Crocodile Taille 3



ACCESSOIRES POUR CROCODILE

ACCESSOIRES	RÉF.
Dossier	
• T1 - T2 / T3	02382 / 02382*
Dossier courbe réglable	
• T3	02367*
Barre transversale supplémentaire	
• T3	02366
Jeu de butée de poignées	
• T3	02373
Cales de hanches	
• T1 - T2/ T3	02383 / 02383
Supports d'avant-bras	
• T1 / T2	23790 / 23791
• T3	02369
Siège escamotable	
• T1 / T2	02384 / 02385
• T3	02374
Culotte	
• T1 / T2	02377 / 02378
Frein à main	
• T1 - T2	02372
Kit anti-bascule	
• T1 - T2 / T3	02381 / 02368
Sac	
• T1 - T2 / T3	02386 / 023702*

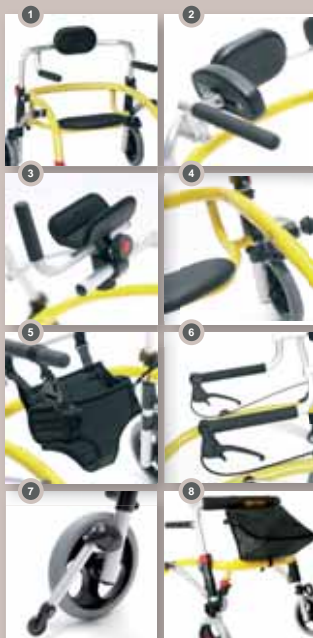

Frein progressif

\* Ces références doivent obligatoirement être commandées avec la réf.02366

# DÉAMBULATEURS VERTICALISATEURS



## Grillo G2

*Nouveauté*

Grillo G2 est un déambulateur verticalisateur conçu pour les enfants et les adolescents qui commencent à marcher et qui ont besoin d'une aide pour acquérir leur schéma de marche.

**Le Grillo existe en antérieur ou en postérieur et existe en 3 versions dans chacun des modèles : PT, P ou PA.**

Grillo G2 grandit avec l'enfant, il permet des réglages extrêmement précis avec l'utilisateur en position sans modifier son centre de gravité. Son harnais pelvien soutient l'utilisateur en cas de nécessité sans générer de pression. Il permet une posture adaptée à l'utilisateur tout en lui assurant sécurité, stabilité et équilibre. Grillo G2 est utilisable en intérieur ou en extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES

- Réglages rapides qui ne nécessitent pas d'outils ;
- 2 supports ergonomiques indépendants selon version : support thoracique et support pelvien réglables (hauteur, profondeur, circonférence) ;
- Un seul chassis pour 2 usages : antérieur et postérieur ;
- Graduations sur tous les supports réglables ;
- Système de pliage simple et rapide, sans enlever les accessoires ;
- Roues avant pivotantes avec blocage directionnel ;
- Roues arrière avec système anti-recul, frein parking et système de freinage progressif (4 niveaux possibles) ;
- Disponible en 4 tailles **Mini** **S** **M** **L** ;
- Harnais pelvien livré en standard.

### VERSIONS

Grillo G2 Antérieur  
Version PT



Grillo G2 Antérieur  
Version P



Grillo G2 Antérieur  
Version PA



Grillo G2 Postérieur  
Version PT



Grillo G2 Postérieur  
Version P



Grillo G2 Postérieur  
Version PA






# Grillo G2 Antérieur

Code LPPR 1266846 + 1238152 + 1207507 - Code ISO 120609

Réf. Voir tableau

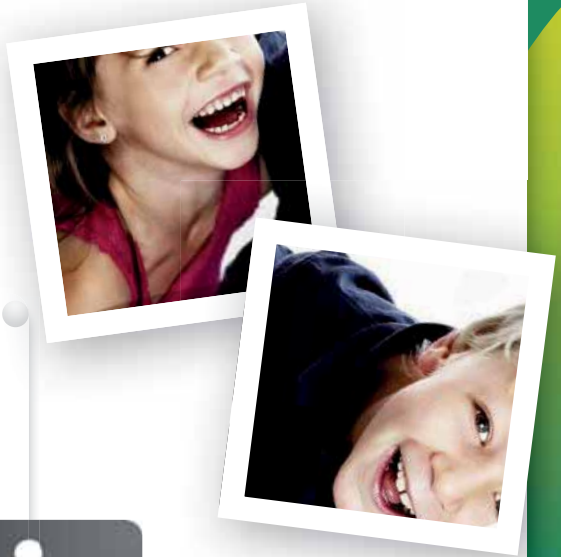

## Grillo antérieur existe en 3 versions :

- **PT** : Avec support **P**elvien , support **T**horacique, harnais pelvien et guidon.
- **P** : Avec support **P**elvien, harnais pelvien et guidon.
- **PA** : Avec support **P**elvien, supports de br**A**s et harnais pelvien.



## RÉFÉRENCES

GRILLO G2 ANTERIEUR	REF.
Version PT	
Taille Mini	29890
Taille S	29901
Taille M	29902
Taille L	29960
Version P	
Taille Mini	29892
Taille S	29967
Taille M	29968
Taille L	29969
Version PA	
Taille Mini	29891
Taille S	29911
Taille M	29912
Taille L	29966



Dimensions en cm	TAILLE	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE USAGER*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN (A)	HAUTEUR ANNEAU THORACIQUE (B)	PÉRIMÈTRE ANNEAUX PELVIEN (A) ET THORACIQUE (B)	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
Grillo G2 Antérieur	T Mini	18 mois -3 ans	75-100	42-61	51-75	53-79*	73	57	35	13,5
	T S	3-8 ans	90-135	49-84	69-100	55-80*	75	65	45	16,2
	T M	8-14 ans	110-160	54-100	76-125	67-130*	91	76	90**	19,5
	T L	adulte	150-190	63-117	85-146	84-120*	101	82	110	23

\* Important : les mesures A et B ne doivent pas être supérieures à la fourchette recommandée pour les supports.

\*\* Si le poids de l'utilisateur est supérieur ou égal à 60kg, dans la version comprenant le support thoracique, l'utilisation du harnais pelvien est fortement recommandée.

# Grillo G2 Postérieur

Code LPPR 1266846 + 1238152 - Code ISO 120609

Réf. Voir tableau



Taille S

## Grillo postérieur existe en 3 versions :

- **PT** : Avec support **P**elvien , support **T**horacique, harnais pelvien et poignées.
- **P** : Avec support **P**elvien, harnais pelvien et poignées.
- **PA** : Avec support **P**elvien, supports de br**A**s et harnais pelvien.



## RÉFÉRENCES

GRILLO G2 POSTERIEUR	REF.
Version PT	
Taille Mini	29893
Taille S	29917
Taille M	29918
Taille L	29962
Version P	
Taille Mini	29895
Taille S	29915
Taille M	29916
Taille L	29913
Version PA	
Taille Mini	29894
Taille S	29919
Taille M	29920
Taille L	29961



Grillo G2 Postérieur


Dimensions en cm	TAILLE	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE USAGER*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN (A)	HAUTEUR ANNEAU THORACIQUE (B)	PÉRIMÈTRE ANNEAUX PELVIEN (A) ET THORACIQUE (B)	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
Grillo G2 Postérieur	T Mini	18 mois -3 ans	75-100	42-61	51-75	53-79*	73	57	35	13,5
	T S	3-8 ans	90-135	49-84	69-100	55-80*	75	65	45	16,2
	T M	8-14 ans	110-160	54-100	76-125	67-130*	91	76	90**	19,5
	T L	adulte	150-190	63-117	85-146	84-120*	101	82	110	23

\* Important : les mesures A et B ne doivent pas être supérieures à la fourchette recommandée pour les supports.

\*\* Si le poids de l'utilisateur est supérieur ou égal à 60kg, dans la version comprenant le support thoracique, l'utilisation du harnais pelvien est fortement recommandée.

## ACCESSOIRES COMMUNS POUR GRILLO G2 ANTÉRIEUR et POSTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR GRILLO	REF.	
Selle escamotable		1
• T S	29996	
• T M	29997	
• T L	29998	
Paire frein au pied		
• T U	29952	
Paire lest		
• T S	29950	
• T M et L	29951	
Poignée de poussée aidant		2
• T U	29810	
Harnais pelvien ( <i>Toujours avec support</i> )		3
• T S	29940	
• T M	29941	
• T L	29965	
Support pelvien		4
• T S	29936	
• T M	29937	
• T L	29975	
Support thoracique		5
• T S	29938	
• T M	29939	
• T L	29976	
Séparateur de jambes		6
• T S	29905	
• T M	29906	
• T L	29949	

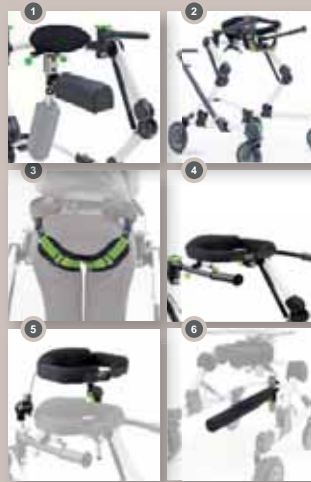

Facilement pliable

## ACCESSOIRES POUR GRILLO ANTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR GRILLO ANTÉRIEUR	REF.
Supports de bras	
• T S	29932
• T M	29933
• T L	29954
Guidon	
• T S	29907
• T M	29908
• T L	29989

## ACCESSOIRES POUR GRILLO POSTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR GRILLO POSTÉRIEUR	REF.
Jeu de poignées	
• T U	29909
Siège amovible	
• T S	29924
• T M et L	29943
Support lombaire	
• T S	29930
• T M	29931
Support de bras	
• T S	29934
• T M	29935
• T L	29925

## ACCESSOIRES POUR GRILLO ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR Taille Mini

ACCESSOIRES POUR TAILLE MINI SEULEMENT	REF.
Séparateur de jambes	29610
Support thoracique	29611
Harnais pelvien	29612
Guidon	29613
Jeu de poignées	29614
Supports de bras	29616
Poignée de poussée aidant	29617
Paire frein au pied	29618



Taille Mini



# Mustang

Code LPPR 1266846 + 1238152 + 1207507

Réf. Voir tableau

Mustang est une aide à la verticalisation et à la déambulation utilisable antérieurement et postérieurement.

Il convient aux enfants handicapés ayant besoin d'une assistance supplémentaire dans leurs déplacements quotidiens.

Le Mustang apporte un soutien confortable pour le haut du corps tout en offrant un support au niveau du bassin. La position droite, pouvant être légèrement inclinée vers l'avant, stimule la marche et encourage l'enfant à participer aux activités de la vie quotidienne. Le Mustang peut être utilisé par exemple par des enfants IMC ou autres enfants ayant un déficit au niveau de l'équilibre et des fonctions motrices. Il a été conçu comme un simple déambulateur antérieur, mais peut aussi être utilisé comme un système postérieur d'entraînement à la marche, en fonction du niveau de capacité de l'enfant. Mustang convient à des enfants entre 2 et 18 ans.

Afin d'apporter une aide sur mesure à l'utilisateur, 4 tailles de châssis sont disponibles, sur lesquels 3 tailles de support de buste au choix se fixent.



Mustang avec roues 8"

## CARACTÉRISTIQUES



- Equipé de 4 roues blocables individuellement ;
- Très stable ;
- Barre de support central réglable en inclinaison ;
- Forme en U facilitant accès et transfert ;
- Châssis pliant (facilite transport et rangement) ;
- Pour une meilleure personnalisation, le support de buste (antérieur ou postérieur) est à ajouter à la référence du châssis ;

- Suspension intégrée ;
- Roues équipées de stabilisateurs directionnels ;
- Roues à friction réglable ;
- Système anti recul.



Mustang Taille 1 avec roues 4"

## Coloris



JAUNE  
TAILLE 1



ROUGE  
TAILLES 2  
et 3



BLANC  
TAILLE 2  
et 3



NOIR  
TAILLES 2,  
3 et 4

## DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	TAILLE	HAUTEUR SELLE /SOL (selle = accessoire)	HAUTEUR SOUS AXILLAIRE	LARGEUR INTERNE BASE	INCLINAISON BARRE CENTRALE	RAYON DE GIRATION	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS SANS ACCESSOIRE
	T 1	17-35 ou 26-44	40-65	38	0-30°	46	65	82	52	30	10
	T 2	24-41 ou 33-50	60-85	45	0-30°	55	85	90	58	40	14
	T 3	45-68	70-105	50	0-25°	60	105	100	65	60	18
	T 4	62-84	87-130	56	0-25°	65	130	110	70	80	19

## RÉFÉRENCES


### Références châssis

CHÂSSIS	COULEURS.	ROUES	REF.
Taille 1	jaune	8"	29731
		4"	029801
Taille 2	gris	8"	29702
		4"	29732
	rouge	8"	29712
		4"	29733
	blanc	8"	29722
		4"	29734
Taille 3	gris	8"	29703
	rouge	8"	29713
Taille 4	blanc	8"	29723
	gris	8"	29704

### Références support de buste

SUPPORT DE BUSTE	CIRCONFÉRENCE INTERNE EN CM.	REF.
Taille S	47-64	029800
Taille M	67-78	029805
Taille L	87-114	029806

La référence du châssis du Mustang doit toujours être associée à une référence de support de buste :

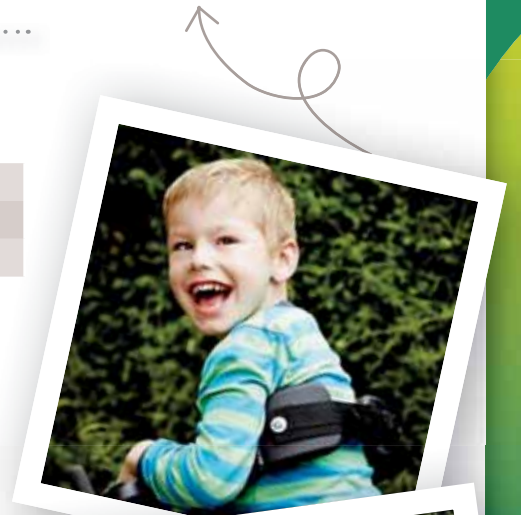

❖ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

## ACCESSOIRES POUR MUSTANG

ACCESSOIRES	REF.
Appui-tête avec fixation * • T U	sur demande avec tige et support
Dossier* • S • L	029809 029810
Support de bassin* • S • L	029811 029812
Support de bassin* spécial pour recevoir un appui-tête • T 1 - T 2 • T 3 - T 4	029813 029814
Coussin abdominal • T U	029817
Coussin d'extension de support de buste (H = 11 x l = 5,5 cm) • T U	029816
Repose bras avec poignées (position antérieure) • S • M	029820 029821
Support d'avant bras position antérieure • S / M • L	029822 / 029823 029824
Support d'avant bras position postérieure • S / M • L	029825 / 029826 029827
Guidon (position antérieure) • S • L	029818 029819
Selle • T 1 - T 2 • T 3 - T 4	029807 029808
Culotte de sécurité • T 1 • T 2	029837 029838
Séparateur de jambes • T 1 / T 2 • T 3 / T 4	029828 / 029829 029830 / 029831

Guide de chevilles • T 1 / T 2 • T 3 / T 4	029832 / 029833 029834 / 029835
Housse rembourrée pour support de buste • S / M • L	029841 / 029842 029843
Poche de rangement • T 1 - T 2 • T 3 - T 4	029839 029840
Poignée de guidage • T 1 - T 2	029836

\*uniquement avec selle





# Dynamico intérieur

Code LPPR 1266846 + 1238152 + 1207507 - Code ISO 120609

Réf. 02500 / 02510 / 02520 / 02530 / 02538

Dynamico est une aide à la verticalisation et à la déambulation qui entoure l'enfant ou l'adulte, réglable sans outils en quelques secondes.

Dynamico est équipé d'une culotte réglable (style "Youpala"), servant essentiellement de sécurité anti-chute. Grâce à sa large base, Dynamico est très stable. Il existe également en version extérieur.



## CARACTÉRISTIQUES

- Anneaux thoracique et pelvien réglables en hauteur (seuls les anneaux T2 et T3 sont interchangeables) ;
- Equipé en standard d'un soutien pelvien et d'un soutien thoracique amovibles ; Culotte en standard ;
- Soutiens thoracique et pelvien (revêtus mousse) s'ouvrant par l'arrière pour l'installation de l'enfant ou de l'adulte ;
- 4 roues Ø 8 cm, équipées de freins de stationnement et de pare-chocs permettant la protection des murs ;
- Disponible en 5 tailles.

Coloris



JAUNE  
TAILLES  
1, 2 et 3



NOIR  
TAILLES  
4 et 5



## ACCESSOIRES POUR DYNAMICO D'INTÉRIEUR

ACCESSOIRES (UNIQUEMENT DYNAMICO D'INTÉRIEUR)	RÉF.
Supports d'avant-bras* • T 1 / T 2 - T 3 / T 4 - T 5	02507 / 02517 / 02527
Guidon réglable* • T 1 / T 2 / T 3 • T 4 - T 5	02504 / 02514 / 02524 02534
Tablette • T 1 - T 2 - T 3 / T 4 - T 5	02506 / 02513
Selle d'abduction • T 2 / T 3 / T 4	02518 / 02528 / 02548
Séparateur de jambes • T 1 / T 2 / T 3 • T 4 / T 5	02505 / 02515 / 02525 02535 / 02541
Freins réglables pour roues avant (paire) • T U	02502
Blocage de direction sur roues arrière • T U	02503
Lest* • T 2 / T 3 / T 4 • T 5	02511 / 02521 / 02531 02539



\*Utilisable aussi sur Dynamico extérieur

## DIMENSIONS

EN CM

Dimensions en cm	TAILLE	RÉF	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	HAUTEUR SOUS AXILLAIRE*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN	PÉRIMÈTRE ANNEAU THORACIQUE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS	POIDS DU LEST (ACCESSOIRE)
Dynamico d'intérieur	T 1	02500	3-5 ans	52-70	44-60	65	79	66	40	12	3,7
	T 2	02510	6-8 ans	77-95	66-82	75	84	66	55	14,6	5
	T 3	02520	8-11 ans	89-116	77-102	85	88	66	70	15,6	6,2
	T 4	02530	12-14 ans	92-126	85-112	110	95	71	85	17	7,4
	T 5	02538	adulte	108-143	98-120	120	106	77	100	19,7	8,7

\* hauteur so-aisselle de l'utilisateur en position debout : mesure principale à prendre en compte lors du choix de la taille du Dynamico.



# Dynamico extérieur

Code LPPR 1266846 + 1238152 + 1207507 - Code ISO 120609

Réf. 02516 / 02526 / 02536 / 02537

Dynamico est une aide à la verticalisation et à la déambulation qui entoure l'enfant ou l'adulte, réglable sans outils en quelques secondes.

Dynamico est équipé d'une culotte réglable (style "Youpala"), servant essentiellement de sécurité anti-chute. Grâce à sa large base, Dynamico est très stable. Il existe également en version utilisable en intérieur ou sur sol lisse.



## CARACTÉRISTIQUES

- Anneaux thoracique et pelvien réglables en hauteur (seuls les anneaux T2 et T3 sont interchangeables) ;
- Equipé en standard d'un soutien pelvien et d'un soutien thoracique amovibles ;
- Soutiens thoracique et pelvien (revêtus mousse) s'ouvrant par l'arrière pour l'installation de l'enfant ou de l'adulte ;
- 2 roues avants Ø 18 cm et 2 roues arrières Ø 30 cm ;
- Equipées de freins de stationnement et de pare-chocs (roues-avant) permettant la protection des murs ;
- Disponible en 4 tailles.

### Coloris




JAUNE  
TAILLES  
1, 2 et 3



NOIR  
TAILLES  
4 et 5

## ACCESSOIRES POUR DYNAMICO D'EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES (UNIQUEMENT DYNAMICO D'INTÉRIEUR)	RÉF.
Supports d'avant-bras* • T 1 / T 2 - T 3 / T 4 - T 5	02507 / 02517 / 02527
Guidon réglable* • T 1 / T 2 / T 3 • T 4 - T 5	02504 / 02514 / 02524 02534
Lest* • T 2 / T 3 / T 4 • T 5	02511 / 02521 / 02531 02539

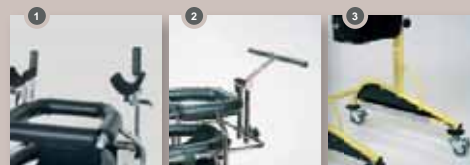

## DIMENSIONS

EN CM

Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

Dimensions en cm	TAILLE	RÉF	âge	HAUTEUR SOUS AXILLAIRE*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN	PÉRIMÈTRE ANNEAU THORACIQUE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
			ÂGE APPROXIMATIF USAGER							
Dynamico d'extérieur	T2	02516	6-8 ans	82-100	71-87	75	93	74	55	17,9
	T3	02526	8-11 ans	94-121	82-107	85	97	74	70	19,3
	T4	02536	12-14 ans	97-131	90-117	110	104	78	85	20,4
	T5	02537	adulte	113-148	103-125	120	114	82	100	22,7

## 4. Fauteuils roulants






# Pourquoi proposons-nous des fauteuils roulants ?

- Parce que chacun doit rester actif et autonome pour se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Parce qu'il est important de pouvoir rester actif au sein de son entreprise, dans sa vie privée et ses loisirs.

Les utilisateurs restent souvent assis une grande partie de la journée sur leur fauteuil roulant électrique. CREE a sélectionné les fauteuils Blues 100 et Blues 300, pour apporter une solution globale à leurs besoins.

## 4.1 FAUTEUILS ÉLECTRIQUES D'INTÉRIEUR

4.1.1	Vela Blues 100 .....	50-51
4.1.2	Vela Blues 300 .....	52-53

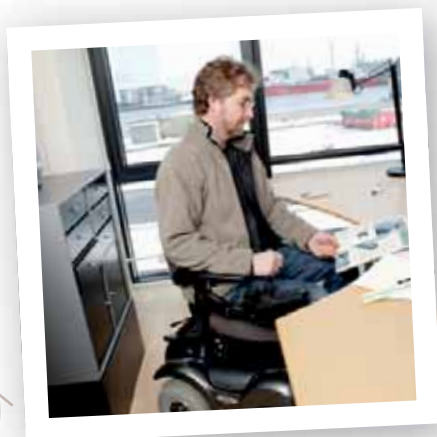

# FAUTEUILS ÉLECTRIQUES D'INTÉRIEUR



## Vela Blues 100

Code LPPR 4130136 (AA1) et 4122757 (AA2) - Code ISO 122127

Réf. 44000 (AA1) et 44001 (AA2)

Le Vela Blues 100 est le fauteuil électrique ultra compact avec lift idéal pour une utilisation intérieure.

**Ses nombreuses configurations et fonctionnalités en font le fauteuil le plus complet de sa catégorie.**

Du siège de travail motorisé au fauteuil multipositions, le Blues 100 répond à toutes les exigences en matière de fauteuil roulant électrique d'intérieur.

Disponible avec sièges type Tango ou SW, pouvant recevoir dossiers, repose-pieds et bascule d'assise électriques ainsi que de nombreux accessoires de positionnement le Blues 100 s'adapte au plus grand nombre d'utilisateurs : enfants, adultes et personnes âgées.

### CARACTÉRISTIQUES

=> en version AA1 :

- Siège Ergonomique Type Tango, sellerie en tissu (microfibres "Phoenix") ou en Skaï. Coloris au choix ;
- Lift électrique 15 ou 20 cm, hauteur de siège au choix ;
- Accoudoirs amovibles, réglables en largeur et en écartement. Peuvent se positionner à hauteur du coussin d'assise pour servir de support aux transferts latéraux ;
- Repose pieds escamotables, réglables en hauteur ;
- Electronique P&G VR2, Joystick escamotable, boîtier de commande direct des fonctions (attribution des fonctions par boutons poussoirs ou leviers au choix) ;
- Ceinture 2 points ;

=> En +, sur version AA2 :

- Bascule d'assise électrique ;
- Dossier confort (type CY 43 x 45 cm) ;
- Appui-tête (type SW) ;
- Repose-jambes à angle réglable mécaniquement.



### Les produit

- ✓ Ultra compact et manoeuvrable ;
- ✓ Multiples configurations de siège ;
- ✓ Formes et accessoires ergonomiques pour une bonne position assise ;
- ✓ Peut être adapté à des enfants et des adultes.

# Pour le Vela Blues 100 siège Tango



## Coloris .....

-  SKAI NOIR  
code 052
-  SKAI GRIS  
CLAIR  
code 057
-  NOIR  
code 671
-  BLEU  
code 672
-  GRIS CLAIR\*  
Code 673
-  ROUGE  
Code 674
-  GRIS  
ANTHRACITE  
Code 675
-  BLEU  
PETROLE\*  
Code 676
-  VIOLET\*  
Code 677
-  ORANGE\*  
Code 678
-  BRUN\*  
Code 679

# Pour le Vela Blues 100 siège SW

## Coloris .....

-  SKAI NOIR  
code 604
-  BORDEAUX  
code 607
-  BLEU COBALT  
Code 601
-  GRIS CHINÉ  
Code 600
-  BLEU FONCÉ  
Code 610
-  ROUGE  
Code 602
-  GRIS  
Code 609



## DIMENSIONS .....

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	REF.	LARGEUR ASSISE	PROFON- DEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER TOTALE*	HAUTEUR ASSISE/SOL (avec lift, cou- sin compris)	LONGUEUR HORS TOUT (avec repose- pieds)	LARGEUR HORS TOUT	PUISSANCE DES MOTEURS	VITESSE/ AUTO- NOMIE BATTERIES 22 AH	FRANCHISSE- MENT *	DIAMÈTRE ROTATION (sans repose- pieds)	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL **
Vela Blues 100 AA1 et AA2	44000 44001	35 à 50	jusqu'à 50	30 à 50	43 - 58 45 - 60 50 - 70 51 - 66	66 (82)	56	130	4,3 km/h / 19 km	3,5 cm	99 (88)	110	62

\* Dépend des capacités de l'utilisateur \*\* Selon équipement



## Vela Blues 300

Code LPPR 4122757 - Code ISO 122127

Réf. 44003

Le Vela Blues 300 est un fauteuil compact d'intérieur avec assise pivotante à 180°.

**Selon le sens dans lequel est positionné le siège, le fauteuil est utilisable soit en mode « propulsion », soit en mode « Traction ». Le changement de mode de conduite est automatique.**

Cette fonction particulière offre de nombreux avantages dans les espaces étroits, au domicile comme au travail en évitant de nombreuses manœuvres pour entrer et sortir d'une pièce, ou s'installer face à une table en bloquant le siège à 90°.

Le Vela Blues 300 est aussi une aide aux transferts grâce son lift électrique de 20cm, et apporte un maximum de confort avec son assise type SW équipée d'une bascule d'assise électrique, de repose-jambes et d'un dossier inclinables.

Son riche équipement et ses nombreuses possibilités (positionnement, commandes spéciales) lui permettent de s'adapter à tous types d'utilisateurs, enfants, adultes ou personnes âgées.

### CARACTÉRISTIQUES .....

- Lift électrique 20 cm ;
- Siège Ergonomique Type SW, sellerie en tissu (microfibres "Zoom"). Coloris au choix ;
- Bascule d'assise électrique ;
- Dossier inclinable par vérin à gaz ;
- Appui tête multiréglable type SW ;
- Ceinture 2 points ;
- Siège pivotant à 190° avec inversion automatique de la conduite de roues motrices AR (propulsion) à roues motrices AV (Traction). Blocage de la rotation à 90° ;
- Accoudoirs amovibles, réglables en largeur et en écartement. Peuvent se positionner à hauteur du coussin d'assise pour servir de support aux transferts latéraux ;
- Plaques repose-pieds monobloc AV et AR relevables ;
- Repose jambes séparés réglable en inclinaison, escamotables, palettes repose pieds réglables en hauteur ;
- Electronique P&G VR2, Joystick escamotable, boîtier de commande direct des fonctions (attribution des fonctions par boutons poussoirs ou leviers au choix).



### Les produit





- ✓ Rotation d'assise à 180° ;
- ✓ Inversion automatique propulsion / traction ;
- ✓ Peut être adapté à des enfants et des adultes.



Coloris revêtement sièges SW.....

-   
NOIR  
Code 604
-   
BORDEAU  
Code 607
-   
BLEU COBALT  
Code 601
-   
GRIS CHINÉ  
Code 600
-   
BLEU FONCÉ  
Code 610
-   
ROUGE  
Code 602
-   
GRIS  
Code 609

Coloris châssis .....

-   
BLEU MÉTALLISÉ
-   
ROUGE MÉTALLISÉ
-   
NOIR MÉTALLISÉ
-   
GRIS ANTHRACITE MÉTALLISÉ



**DIMENSIONS** .....  Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	Dimen- sions en cm	REF.	LARGEUR ASSISE	PROFON- DEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER TOTALE*	HAUTEUR ASSISE/SOL (avec lift, coussin compris)	LONGUEUR HORS TOUT (avec repose pieds)	LARGEUR HORS TOUT	PUISSANCE DES MOTEURS	VITESSE/ AUTO- NOMIE BATTERIES 22 AH	FRANCHISSE- MENT *	DIAMÈTRE ROTATION (sans repose-pieds)	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL **
Vela Blues 300		44003	35 à 50	jusqu'à 50	30 à 50	48 - 68	71 (100)	61	180	8Km/h / 19Km	4cm	106	125	77

\* Dépend des capacités de l'utilisateur \*\* Selon équipement

## 5. Sièges de travail et d'activité



# Pourquoi proposons-nous plusieurs types de sièges de travail et d'activité ?

## “Des sièges de travail et d'activité adaptés à vos besoins”

Les sièges d'activité se distinguent des sièges de bureau ou autres chaises classiques, de par leurs performances en matière de mobilité et d'aide au transfert, mais aussi de par leur ergonomie développée spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou les personnes en situation de handicap.

### MOBILITÉ

Les sièges d'activité sont conçus autour d'un piètement 4 branches dégageant un maximum d'espace pour les pieds, et d'un système de roulettes ayant un coefficient de friction minimal. Cet ensemble permet aux personnes de se mouvoir aisément en position assise dans l'environnement d'utilisation.

### TRANSFERT

Les sièges d'activité en version “électrique” offrent des amplitudes d'élévation pouvant aller jusqu'à 30 cm ! Cette amplitude hors norme permet aux utilisateurs de se mettre debout sans effort et en toute sécurité.

### ERGONOMIE ET POSITIONNEMENT

Les sièges d'activité offrent un large choix en matière d'assises et de dossiers et peuvent être équipés de nombreux accessoires de positionnement. Ils apportent une alternative nouvelle aux solutions plus classiquement proposées.

Tableau des caractéristiques ..... 56-57

## 5.1 GAMME TANGO

5.1.1	Tango gaz 50 .....	58 à 60
5.1.2	Tango gaz 100 .....	58 à 60
5.1.3	Tango électrique 100 .....	58 à 60
5.1.4	Tango gaz XL 300 .....	61
5.1.5	Tango électrique XL 300 .....	61
5.1.6	Tango gaz 500/510 .....	62-63
5.1.7	Tango électrique 500/510 .....	62-63

## 5.2 GAMME SALSA

5.2.1	Salsa gaz .....	64-65
-------	-----------------	-------

## 5.3 GAMME ENFANTS

5.3.1	Hip Hop 50 .....	66-67
-------	------------------	-------

*Nouveauté*  
*Nouveauté*

# SIÈGES DE TRAVAIL ET D'ACTIVITÉ

## Gamme Tango



Tango gaz  
50

Tango  
gaz 100

Tango  
électrique  
100

Tango gaz  
XL 300



### RÉFÉRENCE

40000

40001

40004

40012



HAUTEUR D'ASSISE  
POSSIBLE\* (cm)  
COURSE 15 ou 20 CM

41-56/45-60

38-48/40-55/42-57  
47-62/52-67/47-6740-60/42-62  
44-64/46-6644-59/Fixe : 42 min.  
ou plus au choix

HAUTEUR D'ASSISE  
POSSIBLE\* (cm)  
COURSE 30 CM

-

-

45-75/47-77  
49-79/51-81

-



DIMENSIONS D'ASSISE  
(Lxl – cm)

44 x 44

44 x 44

44 x 44

58 x 48



DIMENSIONS DU  
DOSSIER (Lxl – cm)

37 x 30

37 x 30

37 x 30

38 x 43



INCLINAISON DU  
DOSSIER

-10°/+13°

-10°/+13°

-15°/+12°

-



INCLINAISON D'ASSISE

-

-6°/+3°

-6°/+3°

-



ROTATION D'ASSISE

-

90° blocable

-

-



CHARGE MAXIMUM  
(kg)

125

160

160

175

\*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.



	Gamme Salsa	Gamme Enfants
--	-------------	---------------



Tango électrique XL 300

Tango gaz 500

Tango électrique 500

Salsa

Hip Hop 50



40013	46000	46002	40028	40020
42-57 49-69	47-67/49-69/51-71 53-73/55-75	40-60/42-62 44-64/46-66	38-48/45-60 50-70/60-86	38-48/43-58
-	-	45-75/47-77 49-79/51-81	-	-
58 x 48	44 x 44	44 x 44	46 x 35	De 32 x 35 à 40 x 47
38 x 43	39 x 39 ou 39 x 49 ou 39 x 51	39 x 39 ou 39 x 49 ou 39 x 51	38 x 22	De 22x 18 à 28 x 35
-	-4°/+22°	-4°/+22°	-10°/+13°	-20°/+20°
-	-10°/+7°	-10°/+7°	12°	-
-	90° blocable	90° blocable	180°/blocable 90°	-
200	160	160	125	60

# GAMME TANGO

Code ISO 180903



Les sièges d'activité Tango sont des sièges conçus pour des personnes en situation de handicap nécessitant à la fois confort assis et sécurité lors de leurs déplacements et transferts.

La famille des sièges Tango se distingue en 2 gammes principales :



## Tango GAZ

Le réglage de la hauteur de siège Tango se fait à l'aide d'un vérin à gaz.

À l'aide d'une simple pression sur la palette de commande située sous l'assise, le siège suit le mouvement de l'utilisateur jusqu'à la hauteur désirée.

### CARACTÉRISTIQUES

- Assises et dossiers ergonomiques en plusieurs tailles ;
- Hauteurs de sièges réglables par vérin à gaz, plusieurs plages de hauteurs et courses disponibles ; vérins repositionnables\* ;
- Fonction commandée par manette sous assise ;
- Inclinaison et rotation d'assise commandées par manettes\* ;
- Bascule de siège complète (seulement sur Tango 500/510) ;
- Dossier réglable en inclinaison par manette sous assise, et en hauteur par levier ;
- Accoudoirs réglables en hauteur, en écartement, amovibles, ajustables à hauteur du siège en "plaque de transfert" ;
- Accoudoirs escamotables (seulement sur Tango 500/510) ;
- Piètement 4 branches compact, avec roues de diamètre 10 cm sur roulements et bandages anti-frictions ;
- Dispositif de freinage sur roues arrières par levier réversible droit ou gauche ;
- Sellerie tissus microfibre ou skaï (plusieurs coloris au choix).

#### Coloris

\*Sauf Tango gaz 50



SKAI  
NOIR  
052



SKAI GRIS  
CLAIR  
057



NOIR  
671



BLEU  
672



GRIS  
CLAIR\*  
673



ROUGE  
674



GRIS  
ANTHRACITE  
675



BLEU  
PÉTROLE\*  
676



VIOLET\*  
677



BLEU  
ORANGE\*  
678



BRUN\*  
679



## Tango ÉLECTRIQUE

Le réglage de la hauteur de siège est assuré par un vérin électrique via un interrupteur situé sous l'accoudoir.

Le siège d'activité devient alors un outil d'aide au transfert autorisant des élévations « record » grâce à l'amplitude de 30 cm proposée.

### CARACTÉRISTIQUES

- Assises et dossiers ergonomiques en plusieurs tailles ;
- Hauteurs de sièges réglables par vérin électrique. Plusieurs plages de hauteurs et courses disponibles, jusqu'à 30 cm ! Vérins repositionnables. Commande par interrupteurs pré-installés sous accoudoirs à droite et à gauche ;
- Rotation d'assise commandée par manette (seulement sur Tango 100E/500E/510E) ;
- Inclinaison d'assise commandée par manette ;
- Bascule de siège complète (seulement sur Tango 500E/510E) ;
- Dossier réglable en inclinaison par manette sous assise, et en hauteur par levier ;
- Accoudoirs réglables en hauteur, en écartement, amovibles, ajustables à hauteur du siège en "plaque de transfert" ;
- Accoudoirs escamotables (seulement sur Tango 500E/510) ;
- Piètement 4 branches compact, avec roues de diamètre 10 cm sur roulements et bandages anti-frictions ;
- Dispositif de freinage sur roues arrières par levier réversible droit ou gauche ;
- Sellerie tissus microfibre ou skaï (plusieurs coloris au choix).

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)



## Tango gaz 50

GAZ

Réf. 40000

Simple et fonctionnel, le Tango gaz 50 offre les essentiels en matière de mobilité et d'installation ergonomiques.

Economique, il n'en est pas moins performant grâce à ses 2 hauteurs de siège et les configurations de siège qu'il propose.



## Tango gaz 100

GAZ

Réf. 40001

Le standard multi-réglable et multi-configurable, avec ses 6 hauteurs d'assises et ses nombreux accessoires de confort et positionnement (goutière hémiplegique, repose-jambes, appui-tête...).

Le Tango gaz 100 s'adapte aussi bien en milieu professionnel qu'à la maison. Il se décline avec des solutions d'assises et de dossiers développées pour optimiser le confort. Spécialement adapté aux stations assises prolongées, ce siège d'activité offre une grande modularité tant au niveau des réglages que des accessoires.

Voir les autres configurations possibles sur le [bon de commande](http://www.cree.fr) [www.cree.fr](http://www.cree.fr) dont l'assise Coxit.



### DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

REF.	HAUTEURS D'ASSISE POSSIBLES*	DIMENSIONS D'ASSISE* (LxI)	LARGEUR ACCOU-DOIRS*	HAUTEUR ACCOU-DOIRS	DIMENSIONS DOSSIER* (Lxh)	INCLINAISON DOSSIER	INCLINAISON ASSISE	ROTATION D'ASSISE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	POIDS (kg)	CHARGE MAX. (kg)	PUISSANCE DU VERIN*
Tango gaz 50 40000	41-56/45-60	44 x 44	37-51	0-24	37 x 30	-10°/+13°	-	-	55	55	20	125	350 N
Tango gaz 100 40001	38-48/40-55/42-57 47-62/52-67/47-67	44 x 44	37-51	0-24	37 x 30	-10°/+13°	-6°/+3°	90° blocable	55	55	20	160	350 N
Exemple de configuration possible -	38-48/40-55/42-57 47-62/52-67/47-67	47 x 49	41-55	0-24	43 x 45	-20°/+6°	-6°/+3°	90° blocable	55	55	23	160	500 N

\*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.



# Tango électrique 100

**ÉLECTRIQUE**

Réf. 40005

Les Tango 100 s'adaptent aussi bien en milieu professionnel qu'à domicile.

**Le standard multi-réglable et multi-configurable avec ses 8 hauteurs d'assise et ses nombreux accessoires.**

Il se décline avec des solutions d'assises et de dossiers développées pour optimiser le confort. Spécialement adaptés aux stations assises prolongées, ces sièges d'activité offrent une grande modularité tant au niveau des réglages que des accessoires. Voir les autres configurations possibles sur le **bon de commande** [www.cree.fr](http://www.cree.fr)



**Multi-réglable et multi-configurable !**



**EXISTE EN PACK :**



Combinaison hauteur et frein électriques

**Voir bons de commande**

[www.cree.fr](http://www.cree.fr)




**Autre configuration possible**



## DIMENSIONS

**Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur** [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

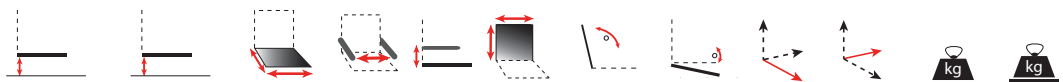

REF.	HAUTEURS D'ASSISE COURSE 20 CM	HAUTEURS D'ASSISE COURSE 30 CM	DIMENSIONS D'ASSISE* (Lxl)	LARGEUR ACCOU-DOIRS*	HAUTEUR ACCOU-DOIRS	DIMENSIONS DOSSIER* (Lxh)	INCLINAISON DOSSIER	INCLINAISON ASSISE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	POIDS (kg)	CHARGE MAX. (kg)
Tango électrique 100 40005	43-63/45-65 47-67/49/69	48-78/50-80 52-82/54-84	44 x 44	37-48	0-24	37 x 30	-15°/+12°	-6°/+3°	55	55	28	160
Exemple de configuration possible	40-60/42-62 44-64/46-66	45-75/47-77 49-79/51-81	47 x 49	37-48	0-24	43 x 45	-15°/+12°	-6°/+3°	55	55	28	160

\*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.



## Tango XL 300

GAZ

Code ISO 180903 - 180912

Réf. 40012



## Tango XL 300

ÉLECTRIQUE

Code ISO 180903 - 180912

Réf. 40013



### CARACTÉRISTIQUES

- Réglage en hauteur du siège en continu par vérin à gaz ou électrique (réglable sur 15 cm), par manette
- Réglage du dossier en profondeur et en hauteur
- Accoudoirs escamotables vers le bas, réglables en hauteur et en largeur (par clé Allen)
- Dispositif de freinage sur roues arrière par levier réversible droit ou gauche
- Châssis renforcé avec roues de diamètre 10 cm sur roulement à billes ⇒ Donnent une très grande mobilité au siège
- Sellerie tissus microfibre ou skai (plusieurs coloris au choix)

### Coloris

\*Sauf Tango gaz 50



### DIMENSIONS

✦ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

REF.	HAUTEURS D'ASSISE POSSIBLES*	DIMENSIONS D'ASSISE* (LxI)	LARGEUR ACCOU-DOIRS*	HAUTEUR ACCOU-DOIRS	DIMENSIONS DOSSIER* (Lxh)	INCLINAISON DOSSIER	INCLINAISON ASSISE	ROTATION D'ASSISE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	POIDS (kg)	CHARGE MAX. (kg)	PUISANCE DU VERIN*
Tango gaz XL 300 40012	44-59 Fixe : sur devis	58 x 48	48-62	0-24	38 x 43	-	-	-	58	58	32	175	500N
Tango électrique XL 300 40013	42-57 49-69	58 x 48	48-62	0-24	38 x 43	-	-	-	58	58	32	200	-

\*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.



## Tango 500 / 510

Réf. voir tableau

*Nouveauté*

Les Tango 500/510 sont disponibles en version gaz ou électrique.

Il se distinguent par de nouvelles solutions ergonomiques et intègrent de nombreuses fonctionnalités comme la bascule de l'ensemble du siège (-10° en proclive et +8° en bascule arrière et jusqu'à +15° pour la version 510). Les accoudoirs escamotables libèrent l'accès latéral et permettent d'effectuer des transferts en toute sécurité.

De nouveaux dossiers font leur apparition :

- L'innovant dossier segmenté « ALB » sur le Tango 500. ALB signifie « Activ Lumbar Backrest » ou « Dossier avec Appui Lombaire Actif », disponible en 3 tailles, et dont l'articulation commandé par vérin à gaz permet de gérer l'appui lombaire à sa guise de façon dynamique
- Les dossiers hauts du Tango 510, avec le type T3, dossier ergonomique typé fauteuil de direction ou le type ES aux formes ergonomiques enveloppantes.



### RÉFÉRENCES


SENSCIRCLE®	REF.
Tango gaz 500	46000
Tango gaz 510	46001
Tango électrique 500	46002
Tango électrique 510	46003

### Le + produit

Bascule complète du siège



Réglage dynamique de l'appui lombaire

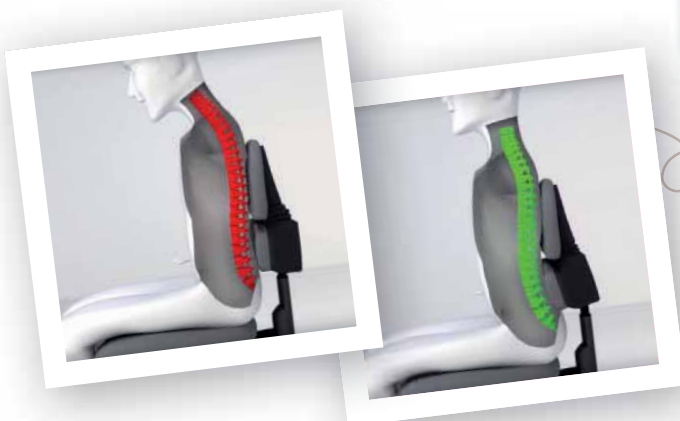



## Tango gaz 500 / 510

GAZ

Réf. 46000 / 46001

Les Tango gaz 500/510 réglables en hauteur par vérins à gaz se distinguent par de nouvelles solutions ergonomiques.

### DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

	REF.	HAUTEURS D'ASSISE POSSIBLES*	DIMENSIONS D'ASSISE* (Lxl)	LARGEUR ACCOU-DOIRS*	HAUTEUR ACCOU-DOIRS	DIMENSIONS DOSSIER* (Lxh)	INCLINAISON DOSSIER	INCLINAISON ASSISE	ROTATION D'ASSISE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	POIDS (kg)	CHARGE MAX. (kg)	PUISSANCE DU VÉRIN*
Tango gaz 500	46000	42-57/44-59 46-61/48-63 47-67/49-69/51-71 53-73/55-75	44 x 44	42-54	0-22	39 x 39 39 x 49 39 x 51	-4°/+22°	-10°/+7°	90° blocable	55	55	26	160	350 N
Tango gaz 510	46001	42-57/44-59 46-61/48-63 47-67/49-69/51-71 53-73/55-75	44 x 44	42-54	0-22	38 x 50 43 x 47	-4°/+22°	-10°/+7° -10°/+15°	90° blocable	55	55	27	160	350 N

\*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.



## Tango électrique 500 / 510

ÉLECTRIQUE

Réf. 46002 / 46003

Les Tango électriques 500/510 se règlent en hauteur électriquement, proposant des courses allant jusqu'à 30 cm.

### EXISTE EN PACK ÉLECTRIQUE :



Combinaison hauteur et frein électriques

◆ Voir bons de commande

### DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

	REF.	HAUTEURS D'ASSISE COURSE 20 CM	HAUTEURS D'ASSISE COURSE 30 CM	DIMENSIONS D'ASSISE* (Lxl)	LARGEUR ACCOU-DOIRS*	HAUTEUR ACCOU-DOIRS	DIMENSIONS DOSSIER* (Lxh)	INCLINAISON DOSSIER	INCLINAISON ASSISE	ROTATION D'ASSISE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	POIDS (kg)	CHARGE MAX. (kg)
Tango électrique 500	46002	40-60/42-62 44-64/46-66	45-75/47-77 49-79/51-81	44 x 44	42-54	0-22	39 x 39 39 x 49 39 x 51	-4°/+22°	-10°/+7°	90° blocable	55	55	33	160
Tango électrique 510	46003	40-60/42-62 44-64/46-66	45-75/47-77 49-79/51-81	44 x 44	42-54	0-22	38 x 50 43 x 47	-4°/+22°	-10°/+7° -10°/+15°	90° blocable	55	55	34	160

\*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.

# GAMME SALSA

Code ISO 180903



## Salsa gaz

GAZ

Réf. 40028

Gamme de tabourets assis/debout avec (ou sans) dossier, avec (ou sans) accoudoirs, permettant une posture dynamique pour tout type d'activité.

**Les tabourets Salsa ont été conçus pour avoir une position assise de type assis/debout. Le piètement à 4 branches, très stable, facilite la propulsion podale, et le dispositif central de freinage sécurise les transferts.**

Ils sont polyvalents et particulièrement recommandés pour un travail sur un plan de travail réglable en hauteur ou plus haut que 80 cm. Ils offrent un large choix de configurations pour répondre à tout type de situation.



### Coloris



BLEU



NOIR



VERT SAPIN



ROUGE



VIOLET



ROSE FUSHIA

## CARACTÉRISTIQUES

- Réglage en hauteur de l'assise en continu par vérin à gaz  
*(avec des plages de réglages modifiables)*
- Châssis 4 branches équipé de roues de diamètre 10 cm à faible coefficient de frottement  
⇒ Offre plus d'espace pour les pieds et une plus grande mobilité facilitant le déplacement assis
- Dispositif de freinage sur roues arrières par levier réversible droit ou gauche
- Bascule d'assise
- Dossier inclinable réglable en hauteur
- Rotation de l'assise sur 180° blocable par ¼ de tour
- Accoudoirs réglables en hauteur, en écartement, amovibles, ajustables à hauteur du siège en "plaque de transfert"
- Sellerie tissu microfibre ou skai *(plusieurs coloris au choix)*





**DIMENSIONS** ..... Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

REF.	HAUTEURS D'ASSISE POSSIBLES*	DIMENSIONS D'ASSISE* (LxI)	LARGEUR ACCOU-DOIRS*	HAUTEUR ACCOU-DOIRS	DIMENSIONS DOSSIER* (LxI)	INCLINAISON DOSSIER	INCLINAISON ASSISE	ROTATION D'ASSISE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	POIDS (kg)	CHARGE MAX. (kg)	PUISSANCE DU VERIN*
Salsa 100 40028	38-48/45-60 50-70/60-86	46 x 35	30-48	0-24	38 x 22	-10°/+13°	12°	180° blocable 90°	55	53	17	125	350 N

\*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.

# GAMME ENFANTS

Code ISO 180903



## Hip Hop 50

GAZ

Réf. 40020

Sièges d'activité modulaires multi-réglables évolutifs pour une utilisation à l'école ou à la maison.

**Le siège d'activité Hip Hop 50 est un siège ergonomique pour des enfants actifs à l'école et au domicile. Sa simplicité d'utilisation le rend accessible aux plus petits et son évolutivité les accompagnera durant une longue période de croissance.**

Ce fauteuil est parfait pour des enfants nécessitant un maintien postural, grâce aux nombreux accessoires de positionnement disponibles. Il s'adapte ainsi à des enfants ayant une mobilité limitée, une force musculaire réduite, une infirmité motrice cérébrale, ou encore des troubles de l'équilibre.



Sellerie tissus  
confort en velours !

Coloris

BLEU  
581NOIR  
582ROUGE  
583

### CARACTÉRISTIQUES

- Réglage de la hauteur (10 ou 15 cm) au choix (manette sous siège) ;
- Assises et dossiers ergonomiques en plusieurs tailles ;
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison ;
- Accoudoirs réglables en hauteur et en écartement ;
- Piètement 4 branches compact, avec roues de diamètre 10 cm sur roulements et bandages anti-frictions ;
- Dispositif de freinage sur roues arrières par levier réversible droit ou gauche ;
- Sellerie tissus confort (type microfibre velours, plusieurs coloris au choix).



## VARIANTES DU HIP HOP 50



## DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

REF.	HAUTEURS D'ASSISE POSSIBLES*	DIMENSIONS D'ASSISE* (Lxl)	LARGEUR ACCOU-DOIRS*	HAUTEUR ACCOU-DOIRS	DIMENSIONS DOSSIER* (Lxh)	INCLINAISON DOSSIER	INCLINAISON ASSISE	ROTATION D'ASSISE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	POIDS (kg)	CHARGE MAX. (kg)	PUISSANCE DU VÉRIN*
Hip Hop 50 40020	38-48 43-58	De 32 x 35 à 40 x 47	De 26 x 34 à 34 x 48	0-17	De 22 x 18 à 28 x 35	-20°/+20°	-	-	55	53	19	60	250N

\*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.

## ACCESSOIRES POUR HIP HOP 50



- 1 Repose tête
- 2 Cales de bassin
- 3 Cales latérales de corps
- 4 Cale d'abduction
- 5 Harnais en H
- 6 Ceinture en Y
- 7 Cales de cuisses
- 8 Cales de genoux

\*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.

## 6. Aides à l'intégration sensorielle



### 6.1 FAUTEUILS SENSIT® ET POUFS

6.1.1	SenSit ® .....	70-71
6.1.2	SenSit ® Straight .....	70-71
6.1.3	Poufs .....	70-71

### 6.2 COUVERTURES LESTÉES BALL BLANKET™

6.2.1	Ball Blanket™ Classic .....	72-73
6.2.2	Ball Blanket™ Flex .....	72-73
6.2.3	Ball Blanket™ Calm .....	72-73

# Pourquoi proposons-nous des aides à l'intégration sensorielle ?

## L'intégration sensorielle par le mouvement apaisant.

L'idée de base derrière les produits Protac émane de plusieurs théories relatives à l'intégration sensorielle. Ces dernières sont basées sur ce que l'on connaît de l'interaction entre les sensations corporelles et la manière dont ces sensations affectent le comportement et la vie au quotidien.

Nous faisons appel à nos 5 sens ; nous voyons, entendons, touchons, sentons et goûtons.

Selon la théorie de l'intégration sensorielle nous possédons en fait 7 sens.

Nous nous servons également du sens proprioceptif (le sens de la position et des limites de notre corps, ce qui est moi et ce qui n'est pas moi) et vestibulaire (équilibre) via le toucher.

Intuitivement, nous utilisons le mouvement pour nous procurer le retour au calme :

Si nous nous sentons tendus, nous choisissons d'aller nous promener pour nous apaiser.

Si nous sommes stressés, nous allons remuer sur notre chaise ou taper au sol avec l'un de nos pieds.

Ces deux exemples quotidiens démontrent que nous utilisons le mouvement pour nous calmer. Ce que nous résumerons en mouvement apaisant.

Dans la gamme PROTAC, le poids et la répartition des balles opposent une résistance permanente et « en mouvement » aux articulations et aux muscles. Notre sens tactile envoie alors un message au système nerveux, que le cerveau enregistre comme mouvement.

## C'est le mouvement apaisant.

### 6.3 GILETS LESTÉS MYFIT®

6.3.1 MyFit® 25 mm ..... 74

6.3.2 MyFit® 38 mm ..... 74

### 6.4 COUSSINS SENSORIELS

6.4.1 KneedMe® ..... 75

6.4.2 GroundMe® ..... 76

6.4.3 SensCircle® ..... 77

*Nouveauté*

# FAUTEUILS SENSIT® ET POUFS



## SenSit®

Réf. Voir tableau

Fauteuil constitué de balles qui permet à l'utilisateur de percevoir physiquement une grande partie de son corps tout en augmentant les sensations de confort et de sécurité.

C'est un produit idéal pour la relaxation et le retour au calme.



## RÉFÉRENCES

### Références Fauteuils SenSit®

FAUTEUILS SENSIT® - TAILLE UTILISATEUR < 180 CM	RÉF.
Fauteuil SenSit® gris	30900
Fauteuil SenSit® blanc cassé	30906
Fauteuil SenSit® noir	30908
Fauteuil SenSit® rouge	30910
Fauteuil SenSit® bleu	30914
Fauteuil SenSit® citron vert	30916
Fauteuil SenSit® mastic	30918
FAUTEUILS SENSIT® - TAILLE UTILISATEUR > 180 CM	RÉF.
Fauteuil SenSit® gris	30902
Fauteuil SenSit® blanc cassé	30920
Fauteuil SenSit® noir	30922
Fauteuil SenSit® rouge	30924
Fauteuil SenSit® bleu	30928
Fauteuil SenSit® citron vert	30930
Fauteuil SenSit® mastic	30932

### Références Poufs SenSit®

POUFS SENSIT®	RÉF.
Pouf SenSit® gris	30904
Pouf SenSit® blanc cassé	30934
Pouf SenSit® noir	30936
Pouf SenSit® rouge	30938
Pouf SenSit® bleu	30945
Pouf SenSit® citron vert	30947
Pouf SenSit® mastic	30946

## Les bénéfiques

- ✓ Entoure l'utilisateur ;
- ✓ Calmant et relaxant ;
- ✓ Renforce le sentiment de sécurité.

## Coloris





## SenSit® Straight

Réf. Voir tableau

Le fauteuil SenSit® Straight se base sur le même principe que le SenSit®.

Il offre en plus :

- un dossier haut et rigide pour un maintien plus soutenu ;
- des rebords d'assise renforcés ;
- une poignée sur l'arrière du dossier pour basculer le fauteuil et faciliter le transfert.

SenSit® Straight est recommandé pour les personnes plus âgées ou ayant besoin d'un maintien et d'un positionnement plus importants.



## RÉFÉRENCES .....

### Références Fauteuils SenSit® Straight

PROTAC SENSIT® STRAIGHT	REF.
Fauteuil SenSit® dossier bleu	30955
Fauteuil SenSit® dossier citron vert	30956
Fauteuil SenSit® dossier mastic	30952
Fauteuil SenSit® dossier gris	30954

### Références Poufs SenSit®

POUFS SENSIT®	REF.
Pouf SenSit® bleu T.U	30945
Pouf SenSit® citron vert T.U	30947
Pouf SenSit® mastic T.U	30946
Pouf SenSit® gris T.U	30904

## Les bénéfiques

- ✓ Entoure l'utilisateur ;
- ✓ Calmant et relaxant ;
- ✓ Renforce le sentiment de sécurité ;
- ✓ Permet de changer de position ;
- ✓ Assure une posture assise confortable ;
- ✓ Hauteur adaptée aux plus âgés ; très facile de se lever.

## Coloris .....



## COUVERTURES LESTÉES BALL BLANKET™



### Ball Blanket™

Réf. Voir tableau

Pour maintenir la conscience du corps, la pression doit constamment varier. Les couvertures Ball Blanket™ agissent sur la peau en soumettant une légère pression constante. La peau ainsi constamment stimulée peut « remettre » à jour les informations du cerveau quant à la conscience corporelle.

**Les couvertures Ball Blanket™ sont recommandées comme outils d'intégration sensorielle pour favoriser un sommeil réparateur. Elles contribuent à lutter contre les troubles du sommeil, l'agitation et l'anxiété chez les enfants, les adultes et les personnes âgées. Quelle que soit l'origine de ces symptômes.**

Les couvertures Ball Blanket™ sont compartimentées en poches ou chaînes et remplies avec des granulés, des balles en EVA ou du polystyrène.

Elles existent en 4 tailles : prématuré, bébé, junior et adultes.

Le poids, la taille et la nature du remplissage de la couverture dépendent des besoins de chaque utilisateur.

Les couvertures Ball Blanket™ sont lavables en machines.

### Les bénéfiques

- ✓ Renforce la proprioception ;
- ✓ Relaxe ;
- ✓ Améliore le sommeil ;
- ✓ Donne de l'énergie.





## RÉFÉRENCES .....

Les couvertures Ball Blanket™ se déclinent en 3 catégories :

### Protac Ball Blanket™ Classic

- Remplie avec des granulés ou des balles en EVA compartimentés dans des pochettes.
- Spécialement développée pour les personnes atteintes de démence ou ayant des douleurs, les balles ne bougent pas beaucoup et ne font pas trop de bruit.

PROTAC BALL BLANKET™ CLASSIC	REF.
COUVERTURE COTON/EVA JUNIOR- 3,5KGS-100X140CM	30700
COUVERTURE COTON/EVA ADULTE- 7KGS- 140X200CM	30702
COUVERTURE COTON/EVA ADULTE- 8KGS- 140X220CM	30704
COUVERTURE COTON/EVA ADULTE -10KGS- 140X200CM	30706
COUVERTURE COTON/GRANULES ADULTE -5KGS- 140X200CM	30755



Existe en version IGNIFUGEE/EVA, COTON/EVA-POLY, IGNIFUGEE/EVA-POLY, COTON/POLYSTYREN, IGNIFUGEE/POLYSTYREN. Contactez-nous.

### Protac Ball Blanket™ flexible

- Remplie de balles en EVA de Ø 50 mm compartimentées dans des pochettes.
- Offre une stimulation proprioceptive et tactile optimales car les balles peuvent bouger à l'intérieur de la housse et sont en contact permanent avec la peau.

PROTAC BALL BLANKET™ FLEXIBLE	REF.
COUVERTURE COTON/EVA FLEX JUNIOR-3,5KGS-100X140CM	30800
COUVERTURE COTON/EVA FLEX ADULTE-7KGS- 140X200CM	30802
COUVERTURE COTON/EVA FLEX ADULTE-10KGS- 140X200CM	30804
COUVERTURE COTON/EVA FLEX ADULTE -8KGS- 140X220CM	30806



Existe en version IGNIFUGEE/EVA FLEX, COTON/EVA-POLY FLEX, IGNIFUGEE/EVA-POLY FLEX. Contactez-nous.

### Protac Ball Blanket™ Calm

- Remplie de balles en EVA positionnées en longues lignes cousues afin qu'elles bougent moins à l'intérieur de la couverture.
- Procure ainsi une stimulation sensorielle différente des autres couvertures à balles.

PROTAC BALL BLANKET™ CALM	REF.
COUVERTURE COTON/EVA CALM JUNIOR-3,5KGS-100X140CM	30824
COUVERTURE COTON/EVA CALM ADULTE-4KGS- 140X200CM	30826
COUVERTURE COTON/EVA CALM ADULTE-7KGS- 140X200CM	30828
COUVERTURE COTON/EVA CALM ADULTE -10KGS- 140X200CM	30830



Existe en version IGNIFUGEE/EVA CALM. Contactez-nous.

# GILETS LESTÉS MYFIT®



**MyFit®**  
Réf. Voir tableau

Gilet « antistress » alourdi par les balles en EVA, qui renforce le contact entre la peau et le vêtement.

## Les bénéfiques

- ✓ Renforce la conscience corporelle ;
- ✓ Effet calmant, combat le stress, l'hyperactivité et l'anxiété ;
- ✓ Favorise l'apprentissage et la concentration ;
- ✓ Un simple système de laçage assure la meilleure stimulation sensorielle ;
- ✓ Système d'ouverture avec Velcro sur l'épaule, spécialement étudié pour les personnes physiquement faibles ou limitées dans leurs mouvements.



## RÉFÉRENCES

MYFIT® BALLES 25 MM (POIDS GILET - TOUR DE BUSTE)	REF.
MyFit® ENFANT (1 kg - 56-66 cm)	30580
MyFit® JUNIOR (1,2 kg - 67-77 cm)	30582
MyFit® XXS (1,7 kg - 69-79 cm)	30584
MyFit® XS (2 kg - 78-86 cm)	30586
MyFit® S (2,5 kg - 87-95 cm)	30588
MyFit® M/L (3 kg - 96-106 cm)	30590
MyFit® XL/2XL (3,5 kg - 107-115 cm)	30592
MyFit® 3XL/4XL (4 kg - 116-124 cm)	30594

MYFIT® BALLES 25 MM OUVERTURE ÉPAULE (POIDS GILET - TOUR DE BUSTE)	REF.
MyFit® XS (2 kg - 78-86 cm)	30505
MyFit® S (2,5 kg - 87-95 cm)	30507
MyFit® M/L (3 kg - 96-106 cm)	30509
MyFit® XL/2XL (3,5 kg - 107-115 cm)	30511

MYFIT® BALLES 38 MM (POIDS GILET - TOUR DE BUSTE)	REF.
MyFit® ENFANT (1,5 kg - 56-66 cm)	30550
MyFit® JUNIOR (2,5 kg - 67-77 cm)	30552
MyFit® XXS (2,8 kg - 69-79 cm)	30553
MyFit® XS (3 kg - 78-86 cm)	30554
MyFit® S (3,5 kg - 87-95 cm)	30556
MyFit® M/L (4 kg - 96-106 cm)	30558
MyFit® XL/2XL (4,5 kg - 107-115 cm)	30560
MyFit® 3XL/4XL (5 kg - 116-124 cm)	30562



# COUSSINS SENSORIELS



## KneedMe®

Réf. 36640

Coussin de genoux composé de balles lourdes, aidant à calmer les personnes stressées.

### Les bénéfiques

- ✓ Améliore la proprioception ;
- ✓ Favorise le calme et le sentiment de sécurité ;
- ✓ Augmente l'attention et la concentration ;
- ✓ Favorise la coopération.



### RÉFÉRENCES

KNEEDME® ADULTE (POIDS COUSSIN - DIMENSIONS COUSSIN)	RÉF.
KneedMe® BLEU ADULTE (4 kg)	30654
KneedMe® VERT CITRON ADULTE (4 kg)	30656
KneedMe® MASTIC ADULTE (4 kg)	30658

KNEEDME® ENFANT - ADOLESCENT (POIDS COUSSIN - DIMENSIONS COUSSIN)	RÉF.
KneedMe® BLEU ADO. (3,2 kg - 65*42 cm)	30648
KneedMe® VERT CITRON ADO. (3,2 kg - 65*42 cm)	30643
KneedMe® GRIS FONCE ADO. (3,2 kg - 65*42 cm)	30646

### Coloris





# GroundMe®

Réf. 30544 / 30546

Coussin de sol rempli de balles en EVA, qui procure un bon positionnement et une bonne stabilité. Il est utilisable en coussin d'assise pour les enfants et en coussin de pieds, non chaussés, pour les adultes.

## Les bénéfiques

- ✓ Aide à se recentrer sur soi ;
- ✓ Calme les mouvements agités des pieds ;
- ✓ Favorise une bonne posture assise ;
- ✓ Favorise le calme et la concentration ;
- ✓ Encourage l'apprentissage ;
- ✓ Convient comme coussin pour les pieds/coussin de confort dans les chaises roulantes.



## RÉFÉRENCES

GROUNDME®	RÉF.
GroundMe® épaisseur 10 cm - Gris foncé	30544
GroundMe® épaisseur 20 cm - Gris foncé	30546

## Coloris



GRIS FONCÉ    BLEU    CITRON VERT    MASTIC

Sur demande, possibilité autre couleur que gris foncé





# SensCircle®

Réf. 30400 / 30401 / 30402 / 30403

*Novauté*

Le SensCircle est un multicoussin qui procure l'apaisement, par sa conception et sa souplesse qui délimite le corps.

**Il se compose de 9 parties et peut se plier et s'enrouler pour permettre au patient de se positionner, se reposer, se calmer, se protéger.**

Il a été créé dans le but d'aider les personnes souffrant de déficience physique et mentale. Il peut être utilisé par les enfants, les adultes et les personnes âgées.



## Les bénéfiques

- ✓ Rassure ;
- ✓ Enveloppant et relaxant ;
- ✓ Stimulant sensoriel ;
- ✓ Flexible et pratique.



## RÉFÉRENCES

SENSCIRCLE®	REF.
SensCircle ® citron vert	30400
SensCircle ® bleu	30401
SensCircle ® mastic	30402
SensCircle ® blanc cassé	30403

Coloris



# NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

## pour vous accompagner dans votre projet



- Une équipe de 5 responsables de secteurs réactifs et formés pour vous apporter les solutions les plus adaptées à vos demandes :

Mme Alexandra DA SILVA pour le Nord  
06 87 13 48 09 – a.dasilva@cree.fr

Mme Solenna FRINGANT pour le Sud-Ouest  
06 4 99 37 08 – s.fringant@cree.fr

Mme Emilie SERVAIS pour l'Ouest  
06 11 76 39 80 - e.servais@cree.fr

Mr Nils BOYER pour le Sud  
07 87 62 20 28 – n.boyer@cree.fr

Mr Mickaël NICOLAS pour l'Est  
06 87 13 30 05 – m.nicolas@cree.fr



- Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l'objectif premier est votre satisfaction.

Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appelant le standard au **04 72 24 08 99**.

- Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d'utilisation du matériel pour le client :

Prêt de matériel, assistance aux démonstrations et essai de produits, aide à l'élaboration de cahiers des charges en équipement domotique et sanitaire, mises en service, SAV... sont autant de compétences maîtrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

### Service Accueil

Solange BELIGNY  
cree@cree.fr  
04 72 24 08 99

### Devis

Nathalie MAYAUD  
n.mayaud@cree.fr  
04 72 24 19 81  
et Yvette PASSAT  
y.passat@cree.fr  
04 72 24 19 38

### Commandes

David ESPEITTE  
commandes@cree.fr  
04 72 49 30 51

### Livraisons

Ludovic DUBOS  
l.dubos@cree.fr  
04 72 24 11 75

### SAV

Youssef CHERID  
sav@cree.fr  
04 72 24 15 24





*Développer l'espace de liberté...*

*Photos et contenu non contractuels. CREE se réserve le droit de toutes modifications.*

Catalogue Positionnement et Mobilité - Juillet 2019

Avenue de Champlevert • Z.I du Recou • 69520 GRIGNY France  
Tél. 04 72 24 08 99 • Fax 04 72 24 25 36 • cree@cree.fr

