


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LA VISIÈRE DE PROTECTION

Etape 01 Retirez le film protecteur des deux côtés de la feuille transparente.



Etape 05 Montez le centre de la feuille au centre de la visière.

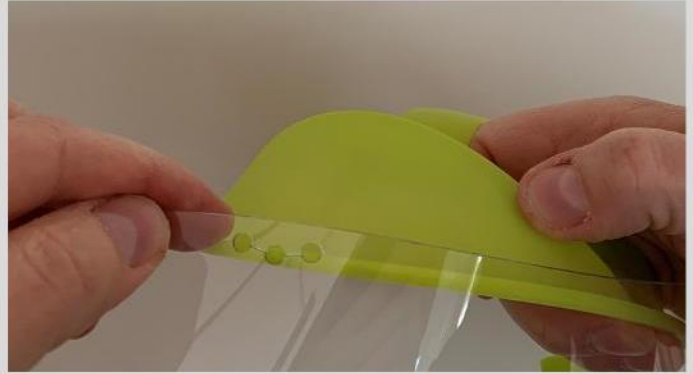


Etape 02 Tenez la feuille à un angle de 90 degrés et fixez-la sur le côté gauche de la visière.



Etape 06
Fixez l'élastique à l'arrière.



Etape 03 Rabattre la feuille.

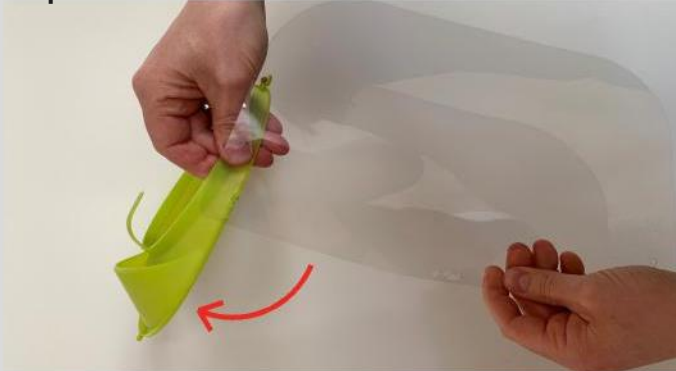

La visière est prête à l'emploi.



Etape 04 Fixez l'autre côté de la feuille à la visière. Pour ajuster l'angle de la feuille, utilisez le trou supérieur, central ou inférieur sur les côtés gauche et droit.



Information techniques

- Visière: PP Nature + Green MB (matériau de qualité alimentaire)
- Feuille transparente: PET
- Nettoyez avec de l'eau savonneuse et un chiffon en microfibre.
- Supporte jusqu'à 60 degrés de chaleur.
- L'utilisation prolongée de produits de nettoyage à base d'alcool teintera la feuille.