



BRAVO-TWIST  
Manuel d'emploi de l'application  
"GYENNO SPOON"



1. Télécharger GYENNO SPOON
2. RGPD
3. Enregistrement
4. Associer la Bravo-Twist à l'application GYENNO SPOON
5. Association de l'appareil
6. Connexion Wifi
7. Chargement de l'appareil
8. Données sur les tremblements
9. Télécharger les données sur les tremblements
10. Observation des données
11. Témoins Lumineux

# 1. Téléchargez GYENNO Spoon APP





Apple Store



ANDROID






Google Play Store

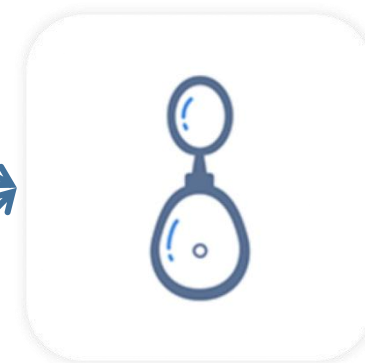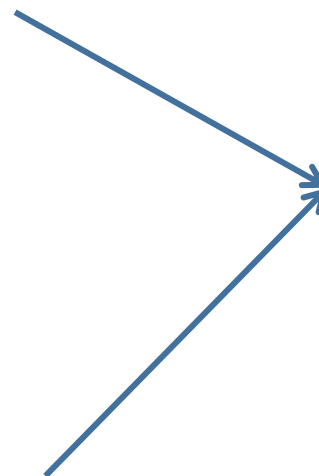

GYENNO Spoon

# 2.RGPD

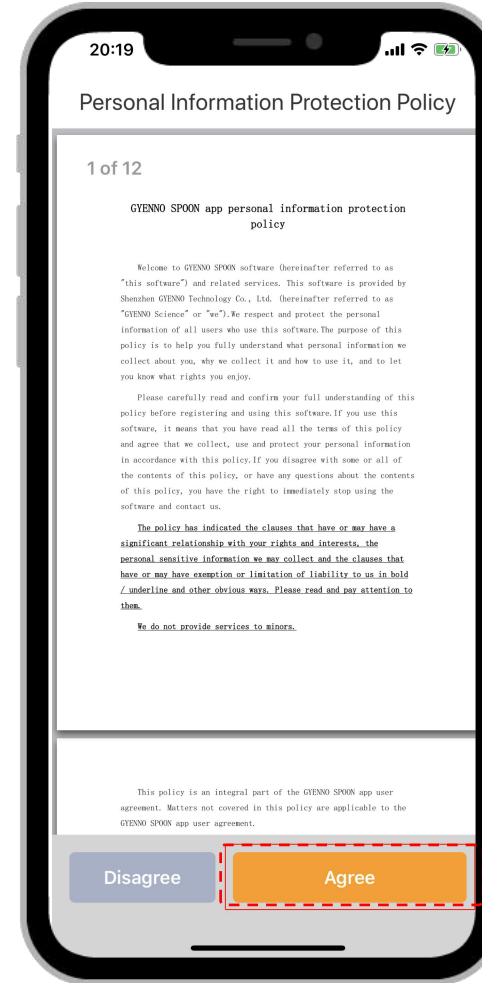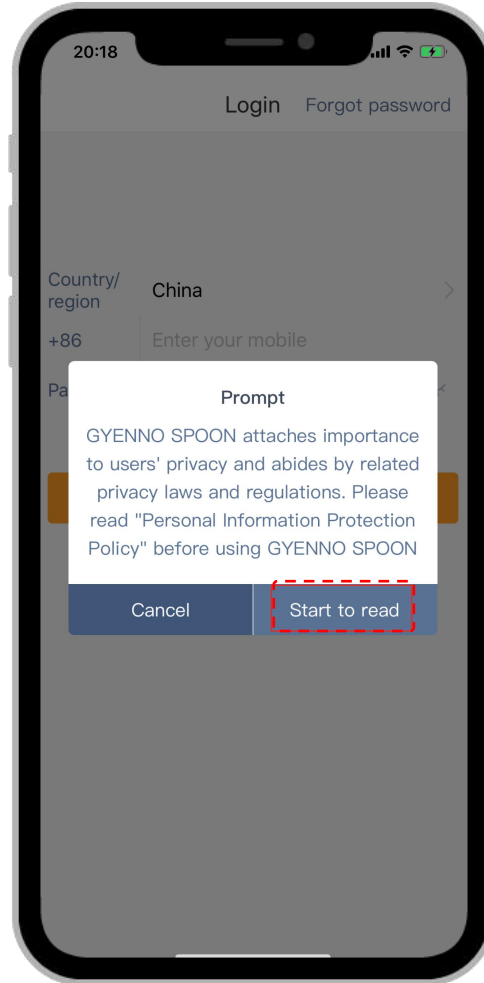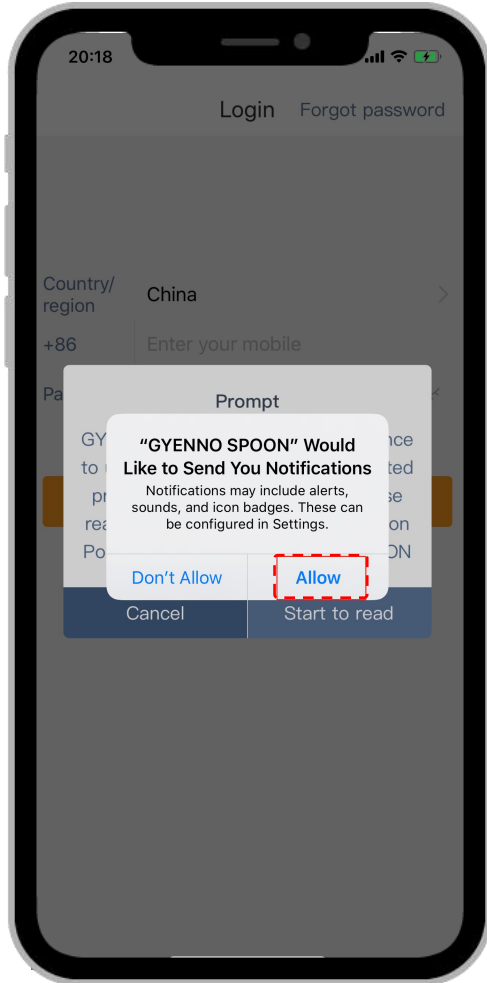


**1. Autoriser/Ne pas autoriser l'application à vous envoyer des notifications (Alertes ; sons ; icônes)**


**2. Lire les conditions générales relatives aux informations personnelles**

**3. Accepter/refuser les conditions générales de protection des données relatives aux informations personnelles**


# 3. Enregistrement

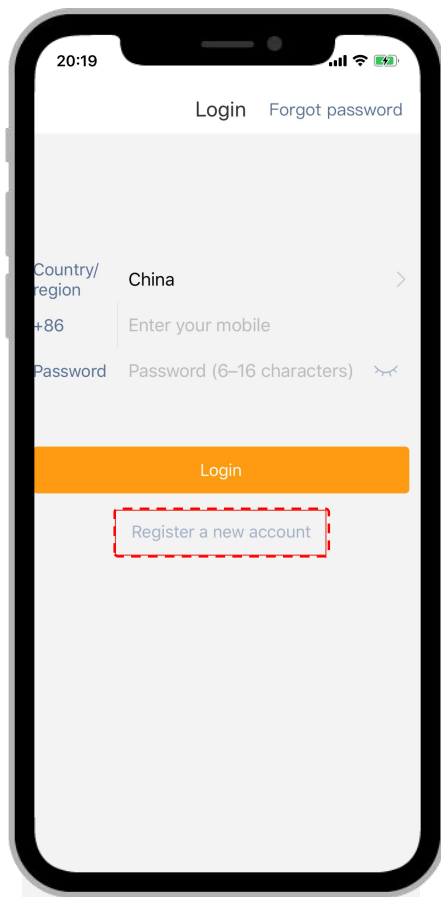


1. Cliquez sur "Créer un nouveau compte"

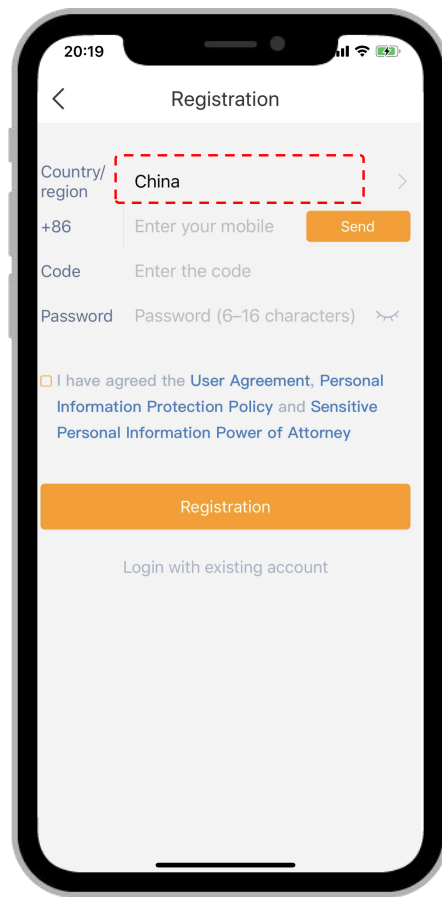

2. Sélectionnez votre pays de résidence

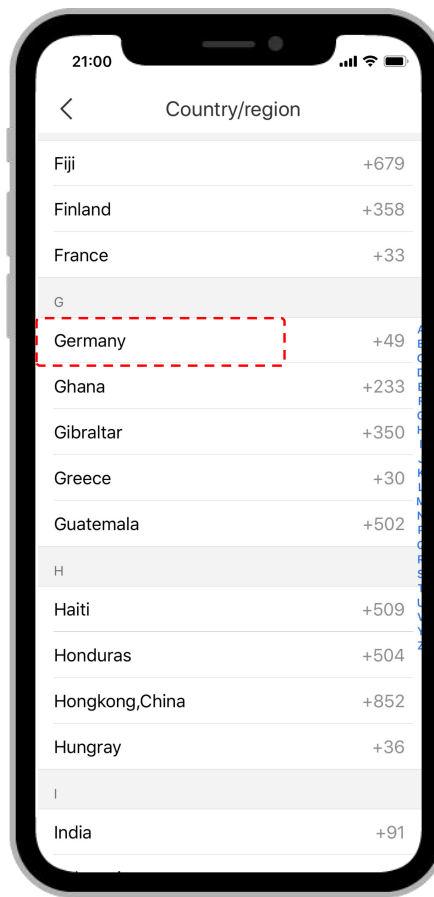

3. Saisissez votre numéro de téléphone puis créez un mot de passe compris entre 6 et 16 caractères

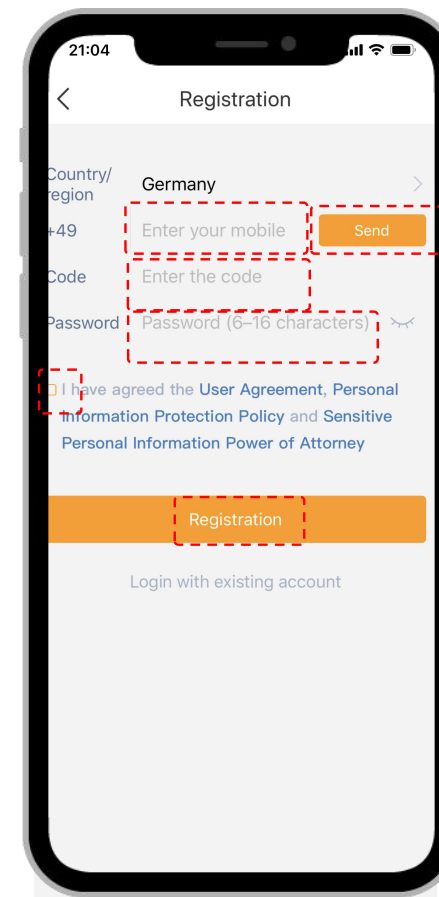


4. Puis cochez la case pour accepter les conditions générales de l'application, ensuite cliquez sur "Inscription"


# 4.Associer la BRAVO-TWIST à l'application GYENNO SPOON



**1.**Saisissez vos informations de connexion (Pays, Tél, Mot de passe)

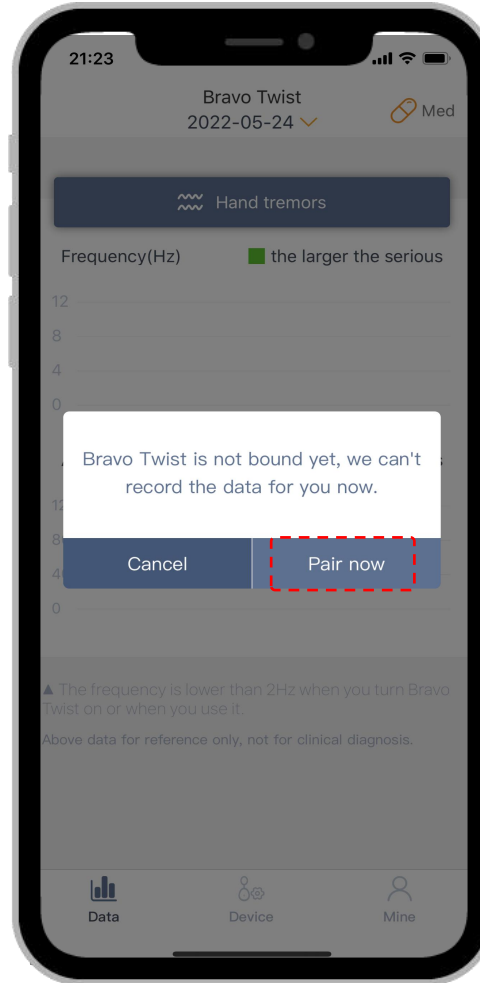


**2.**Votre Bravo-Twist n'est pas encore associée avec l'application, cliquez sur "Associer maintenant"

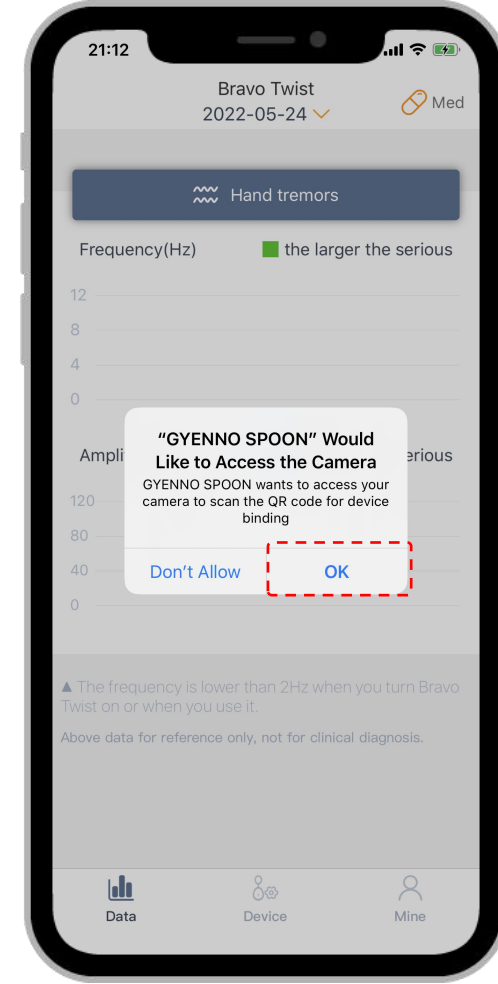

**3.**L'application souhaite avoir accès à votre appareil photo afin de scanner le QR CODE de votre cuillère Bravo-Twist

# 5.Association de l'appareil

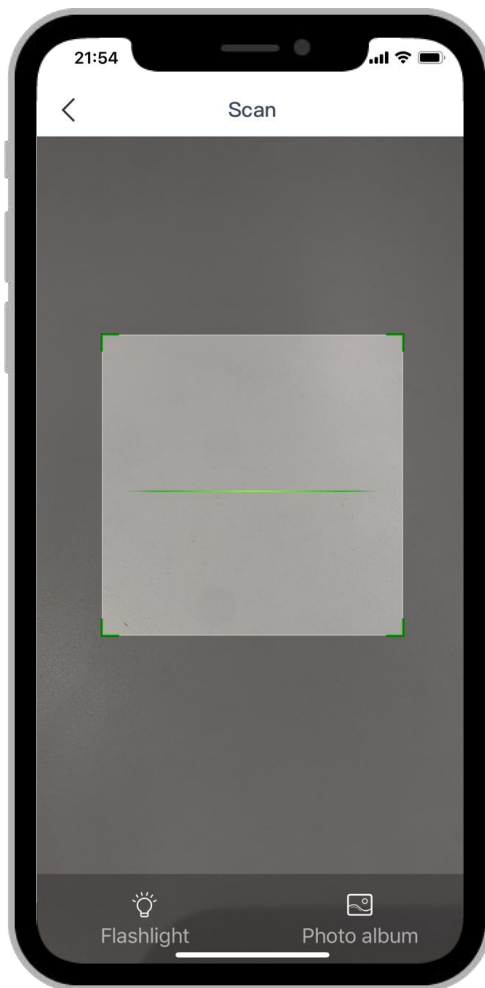



**QR CODE :**



**1.**À l'aide de votre appareil photo au dos de votre téléphone, scannez le QR CODE situé sur votre cuillère pour associer celle-ci à l'application GYENNO SPOON



## 6. Connexion WiFi

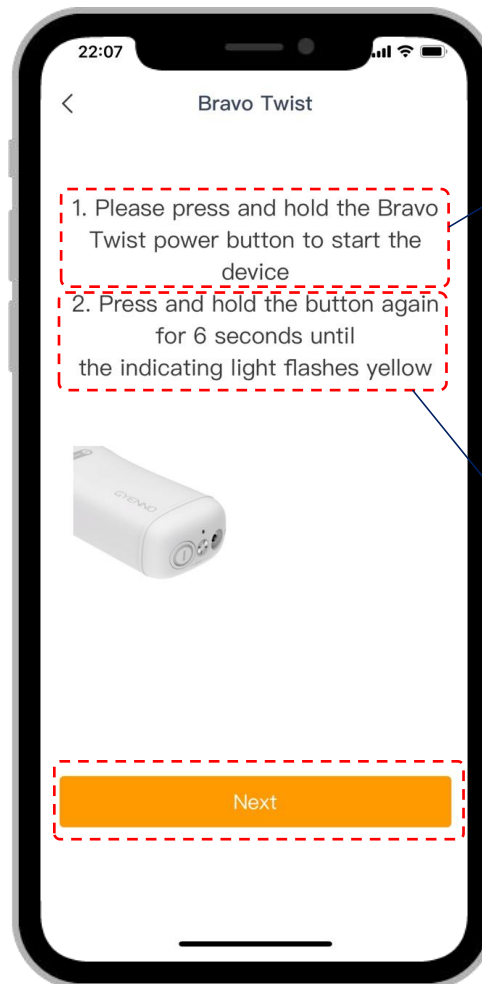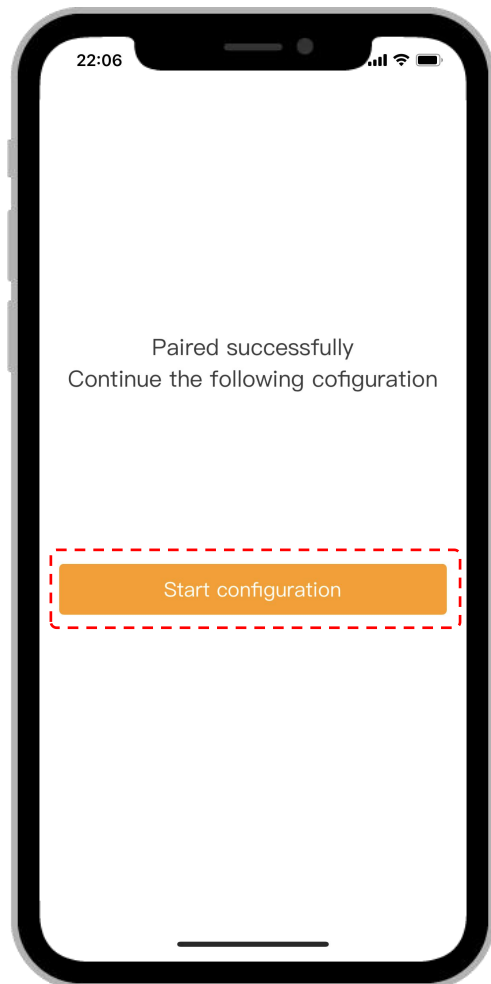

1. Mettez en marche l'appareil



2. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à obtenir le témoin jaune


1. Cliquez sur "Commencer la configuration"




# 6. Connexion WiFi



1. Saisissez votre code d'accès Wifi

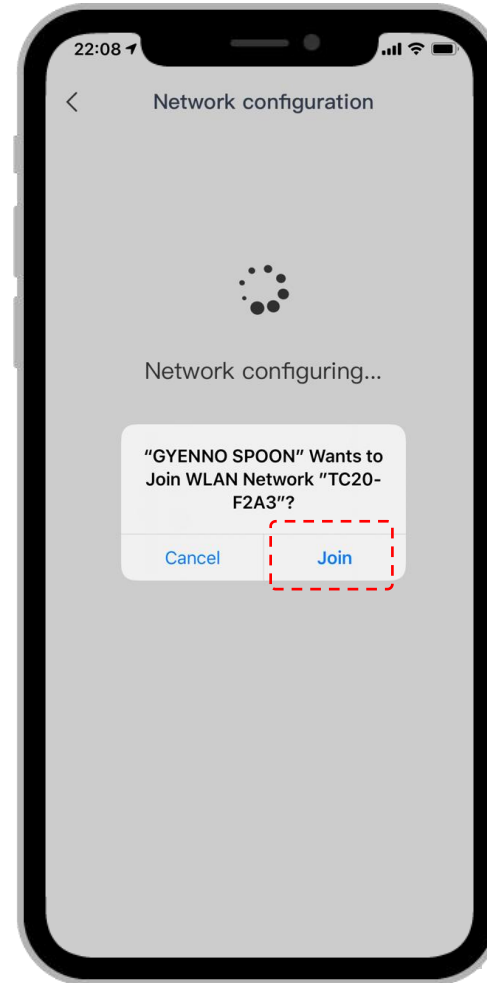

2. Cliquez sur "Rejoindre"

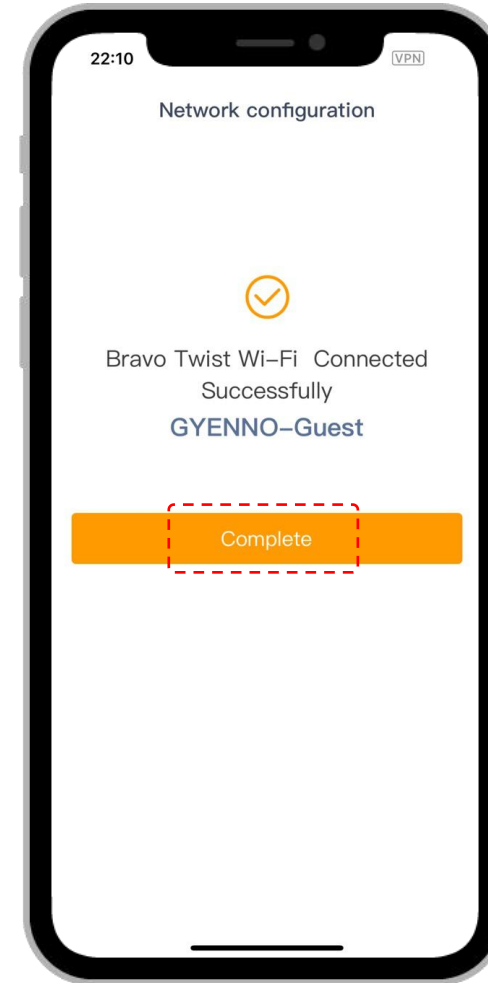


3. Cliquez sur "Complet"

## 7.Chargement de l'appareil



Une fois la connexion WiFi établie.  
Assurez-vous que la cuillère est complètement  
chargée avant de l'utiliser.

## 8. Données sur les tremblements

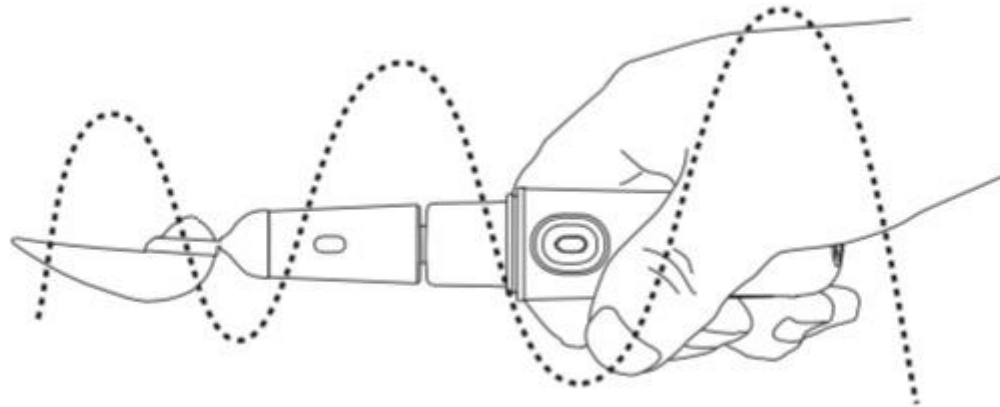

Les données relatives aux tremblements seront enregistrées si l'utilisation dure plus de 30 secondes.

## 9. Télécharger les données sur les tremblements

Veillez à ce que votre cuillère soit CHARGÉE lorsque les données sont téléchargées.



Le clignotement en bleu signifie que les données sont en train d'être téléchargées.



La cuillère est complètement chargée.



La cuillère est en cours de chargement

# 10.Observation des données



Cliquez sur "Données" pour observer celles-ci

# 11. Témoins lumineux

Couleur	Statut
<b>Produit en charge</b>	
Vert	Entièrement chargée
Alternance Jaune/vert	Charger complète, Accès Wi-Fi non connecté
Rouge	En charge
Alternance de jaune et de rouge	En charge, Accès Wi-Fi non connecte
Clignote en Bleu	Accès Wi-Fi connecté ou transfert
Clignote en jaune	En cours de configuration Wifi
<b>Équipement en cours d'utilisation</b>	
« Respiration » en vert	En veille
« Respiration » en Bleu	Collecte de données
« Respiration » en rouge	Batterie faible
Clignote en jaune	En cours de configuration Wifi



**Une question technique ? Contactez notre technicien :**

sav@cree.fr / 04 72 24 08 99

**Une question sur un produit ?**

Ouvert de 9h à 12h et de 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi, et

le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Tél : 04 72 24 08 99