

Manuel d'emploi des coussins LEVABO : Soulagement de la pression en moins de 60 secondes !



Dépliez le coussin et insérez la pompe dans la valve bleue à fermeture automatique jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.



Gonflez...



Gonflez le coussin **jusqu'à ce que la bandelette - Stop Up® saute** - et posez la pompe. Le coussin est maintenant prêt à l'emploi.



Placez le coussin sur la zone à protéger. Fermez le ruban à travers l'ouverture.



Vérifiez que la zone à protéger est relevée à environ 1,5 cm du sol.



Terminé !

