









## FR PREPARATION DU FLAMINGO EN VUE DE L'UTILISATION

Le modèle Flamingo est livré replié afin d'occuper le moins d'espace possible pendant le transport. Déballez le Flamingo.

Dépliez le cadre et fixez les étais au point (A) à l'aide de vis.





Vous trouverez étais et vis dans un sac en plastique au sommet du soutien dorsal.

Libérez le verrou de sécurité vert (B) sous le siège et choisissez l'angle que vous voulez.


Le modèle Flamingo est à présent prêt à être utilisé.




Le siège Flamingo est livré avec des roues avec freins de 75 mm . Il est possible de remplacer les roues d'origine par des roues de 100 mm pouvant être commandées a postériori.

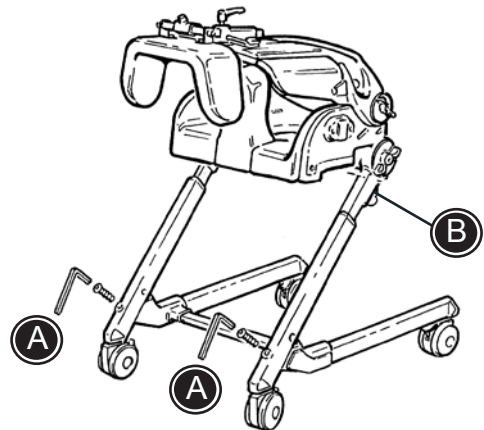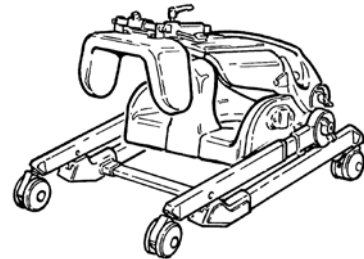

1

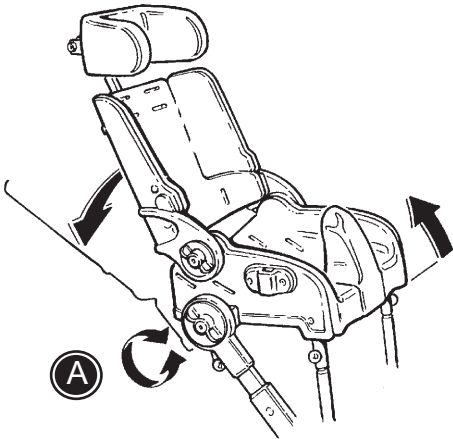

2

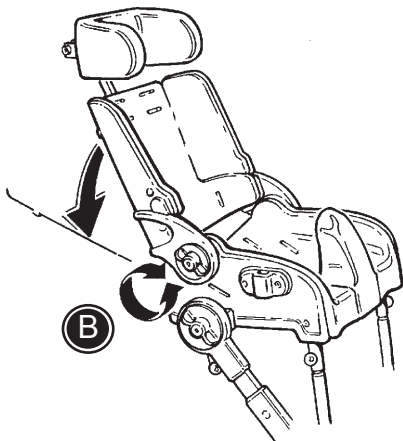


## FR ORIENTATION DU SIÈGE ET DU DOSSIER


### 1) Orientation du siège :

Desserrez les poignées (A) des deux côtés pour orienter l'ensemble du siège.

### 2) Orientation du dossier :

Desserrez les poignées (B) des deux côtés pour orienter seulement le dossier.


 N'activez pas les écrous de sécurité verts sous le siège pour ajuster l'angle. L'écrou de sécurité ne sert que lors du repliage du Flamingo.

 Veillez à ce que les rivetages de chaque côté de la chaise soit serrés.

## **FR** REGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA CHAISE FLAMINGO


Dévissez les vis en haut du cadre inférieur (A) et tirez le cadre vers l'extérieur du siège jusqu'à la hauteur voulue.

Le trou de vis doit être aligné avec un trou correspondant dans la partie intérieure du cadre avant de commencer à revisser les vis. Serrez les vis.

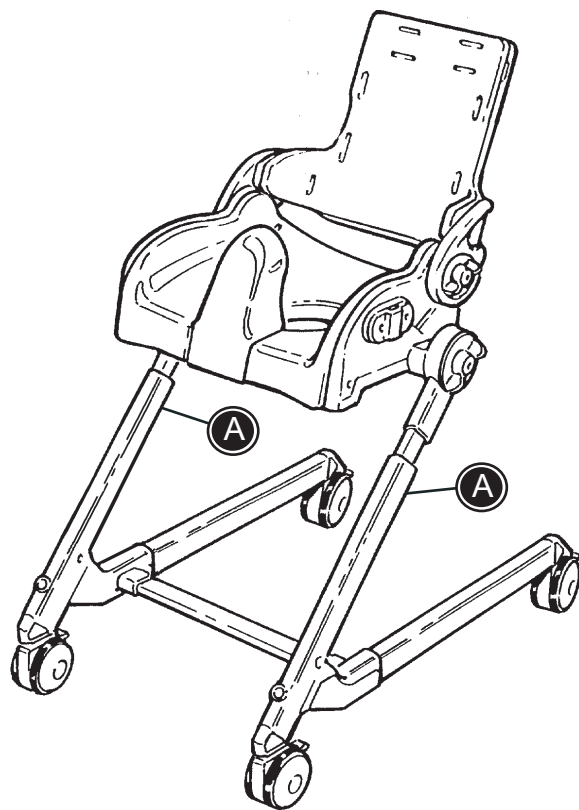


## FR REPOSE-PIEDS REGLABLES

1) Les repose-pieds peuvent être réglés selon l'orientation et la position voulues (A). Les repose-pieds sont réglables en hauteur. Desserrez la vis à oreilles (B) sur la barre du repose-pied et réglez la hauteur.

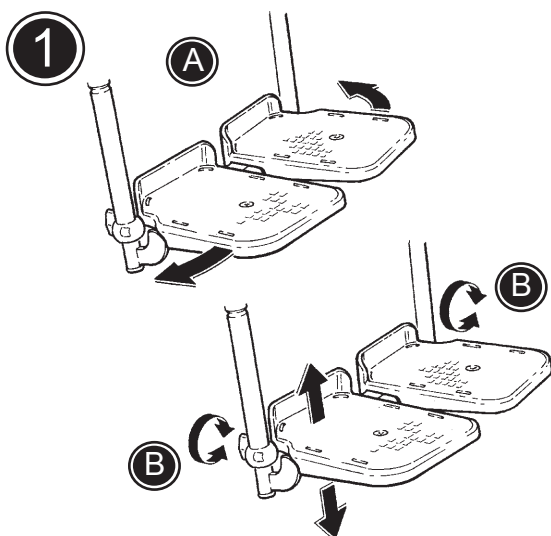



2) Orientez l'ensemble du repose-pied :

- \* Soulevez les repose-pieds en position verticale (C)
- \* Tirez les écrous de sécurité verts vers le bas (D) sous le siège et orientez le repose-pied vers l'avant ou l'arrière.

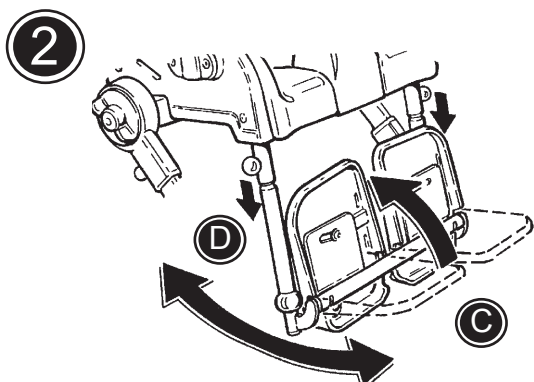

3) Des lanières attache-pied peuvent être montées sur les repose-pieds (E)

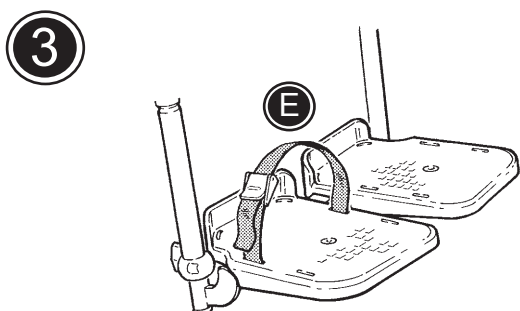

 Déposez la cuvette de chaise percée, le cas échéant, pour soulever le repose-pied.




## FR SUPPORTS LATERAUX

### 1) Supports latéraux fixes :

Suivez les instructions ci-dessous pour monter correctement les supports latéraux :

- \* Placez le support latéral dans la fente, comme indiqué (A)
- \* Poussez le support latéral pour le mettre en place derrière le rembourrage (B)
- \* Fixez le support latéral avec une vis Allen (C)

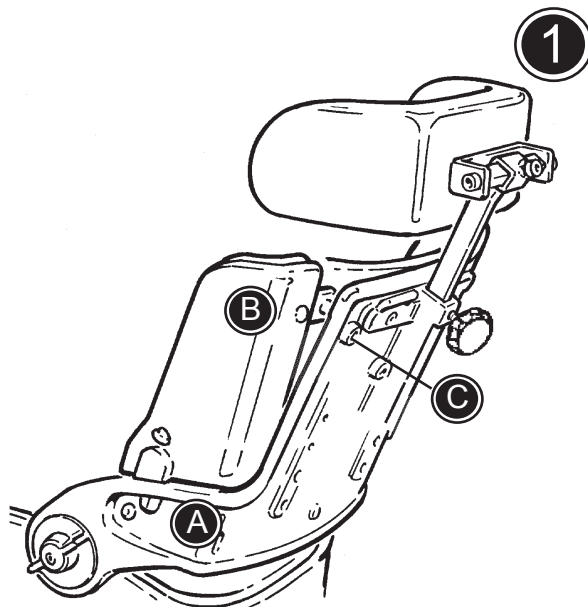


Déposez la vis Allen pour démonter le support latéral. Ensuite, appuyez sur le dossier et ouvrez le support latéral.

### 2) Supports latéraux escamotables :


Montez les supports latéraux escamotables dans les trous du dossier.

- \* Retirez les caches blancs des trous (D)
- \* Placez le support latéral à la hauteur voulue et serrez avec deux vis Allen (E)
- \* Réglez la hauteur en changeant le support latéral pour le mettre dans les autres trous du dossier.

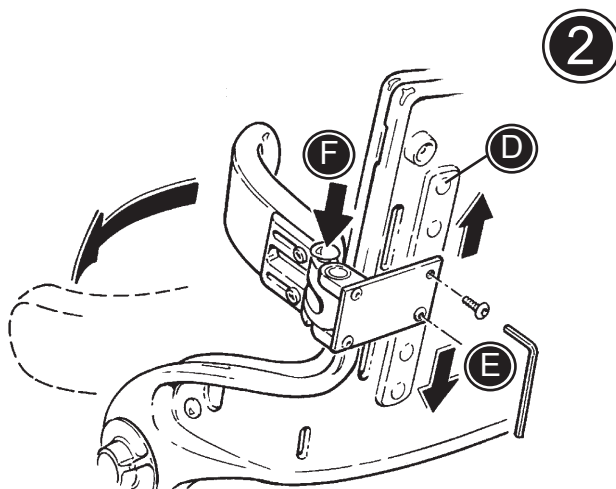


Appuyez sur l'écrou rouge (F) et le support latéral est rabattu.

1

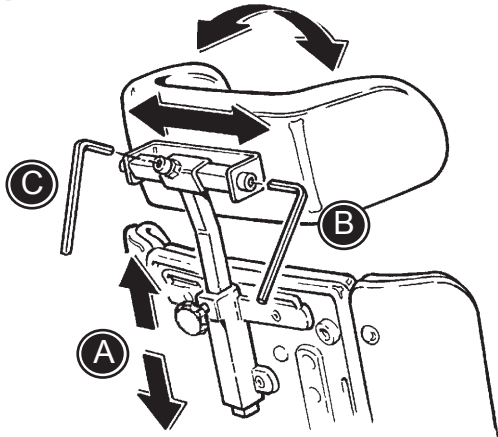

2

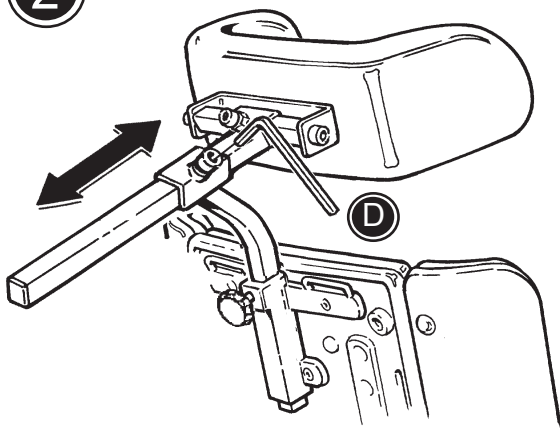

## FR APPUI-TETE

1) L'appui-tête est monté sur une fixation sur le dossier. Utilisez la poignée (A) pour régler le dossier. Utilisez la clé Allen pour orienter (B) et ajuster l'appui-tête d'un côté à l'autre (C).


2) Remplacez la barre de l'appui-tête par une barre à col de cygne si un soutien plus en avant s'avère nécessaire. Utilisez la clé Allen pour régler la profondeur (P).

## FR BARRE


1) La chaise Flamingo peut être munie d'une barre de guidage.

Montez la barre dans la fixation située sur le dossier du fauteuil et serrez avec la poignée (A).

Desserrez la poignée (B) pour régler la hauteur de la barre.

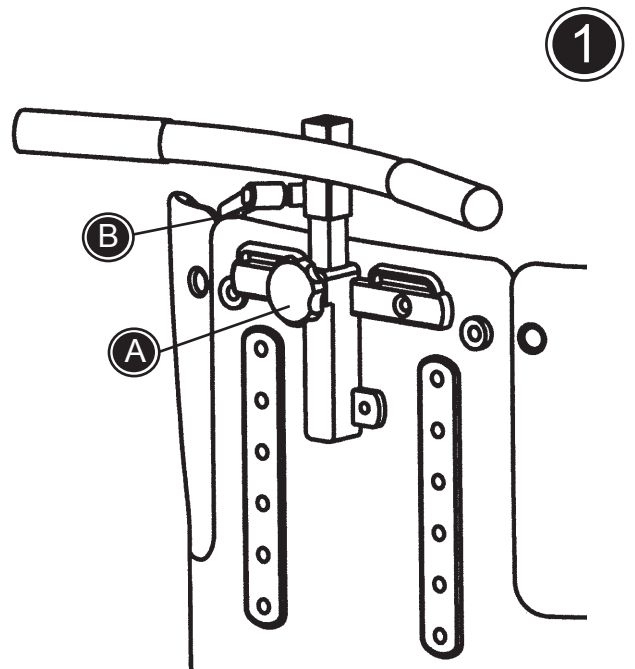

1

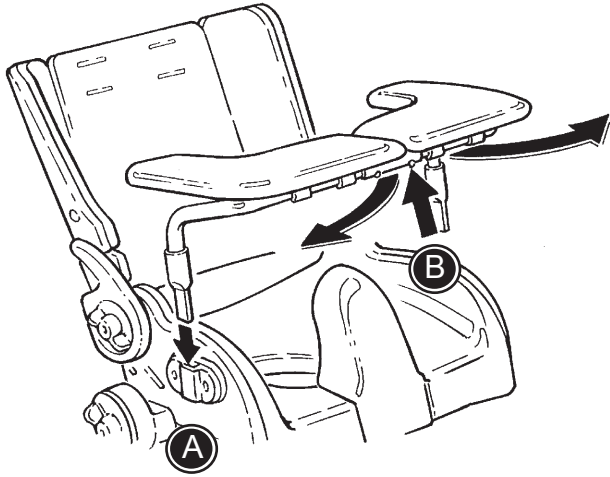

## FR ACCOUDOIR / PLATEAU

1) L'accoudoir/le plateau peut facilement être rabattu pour mettre l'enfant en place.



\* Le plateau est monté dans les fixations situées des deux côtés (A).

\* Ouvrez la fixation sous le plateau pour rabattre l'accoudoir/le plateau (B).


## FR CUVETTE DE CHAISE PERCEE

Le fauteuil Flamingo peut être équipé d'une cuvette de chaise percée facile à enlever. Montez les supports sous le siège pour pouvoir monter la cuvette de chaise percée.

- 1) Utilisez les vis Allen pour monter les deux supports dans les trous (A) sous le siège.
- 2) La cuvette de chaise percée est montée sous le siège à partir du dossier du fauteuil (B).

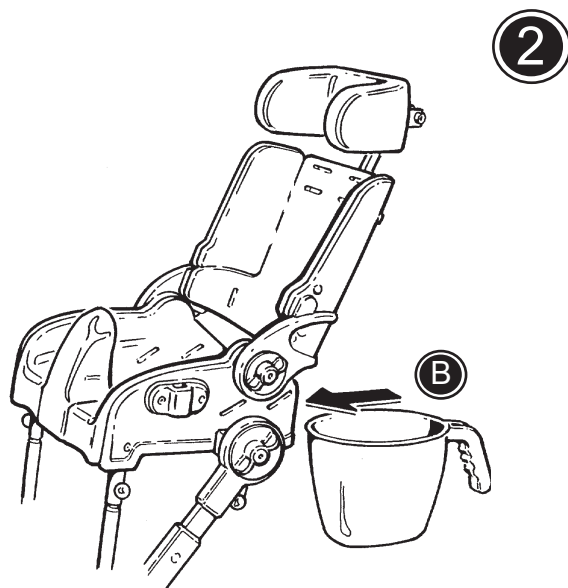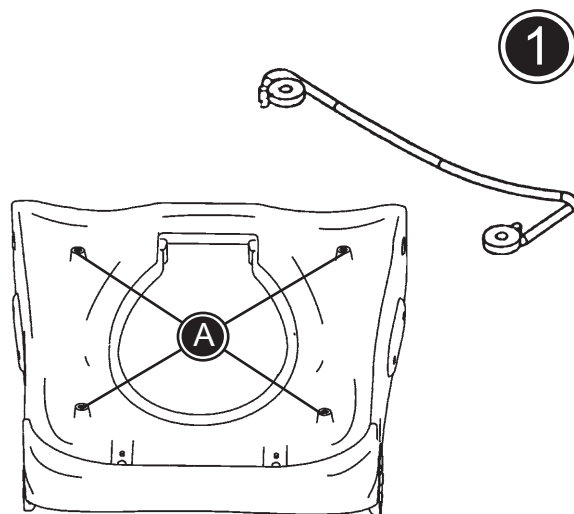

1

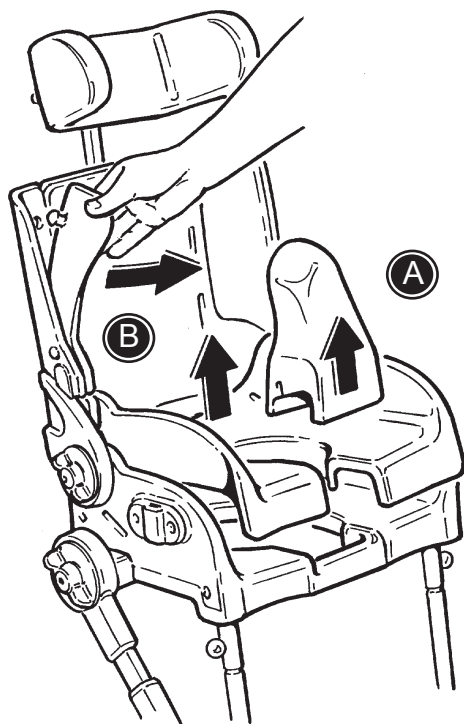


## FR REMBORAGE ET PROTECTION CONTRE LES ECLABOUSSURES

- 1) Le rembourrage et la protection contre les éclaboussures sont très faciles à démonter, par exemple lors du nettoyage du fauteuil.
  - \* Soulevez et retirez la protection contre les éclaboussures (A)
  - \* Déposez le rembourrage (B) en appuyant/tirant les boutons hors des trous du fauteuil.
- 2) La protection contre les éclaboussures est disponible en deux versions ; modèle haut (C) et modèle bas (D)



N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du chlore.

2

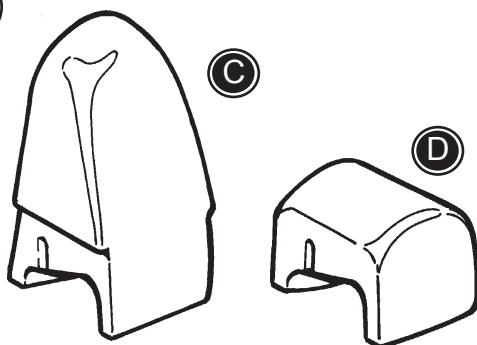

FR


## GILET / GILET CROISÉ

### 1) Montage du gilet / gilet croisé

- \* Montez les lanières d'épaules par les trous du dossier (A).
- \* Montez les lanières latérales par les trous du siège (B).
- \* Fixez les bandes avec les boucles des verrous d'accrochage (C) sur le dossier.



Faire attention que toutes les fixations et réglages conviennent et soient correctement placées. Ceci doit être vérifié de manière régulière.

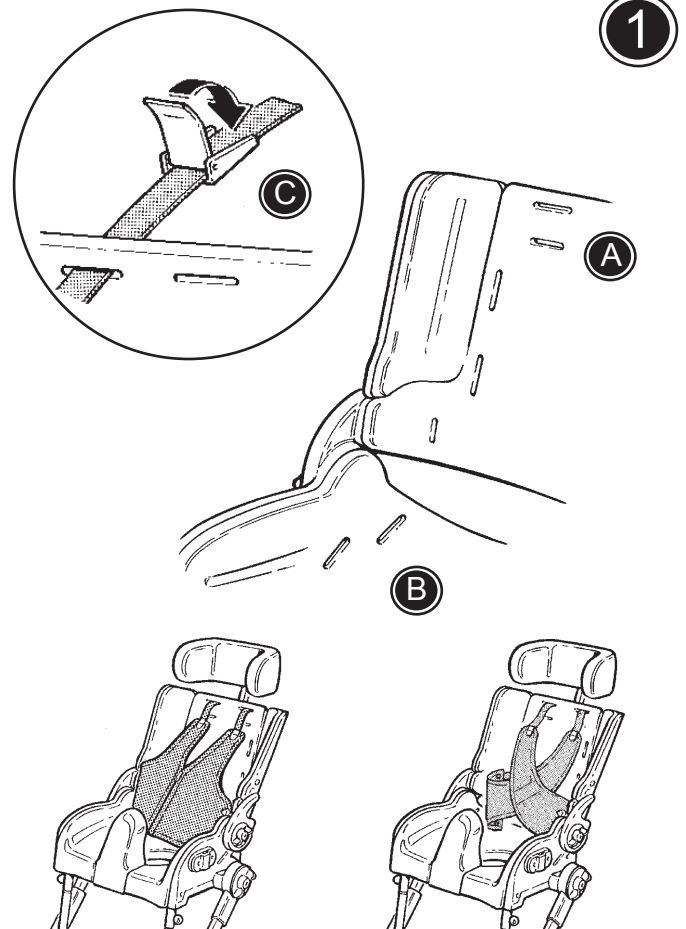

FR


## SANGLES DE PIED

Les sangles de pieds peuvent être ouvertes et fermées grâce au velcro ou à la boucle (A). Suivre les instructions ci dessous pour le montage.

- \* Ouvrir les sangles et les tirer (A) à travers les fentes des palettes.
- \* Fermer les sangles autour des pieds de l'utilisateur.




Veiller de façon régulière à ce que toutes les fixations et réglages soient correctement installés.

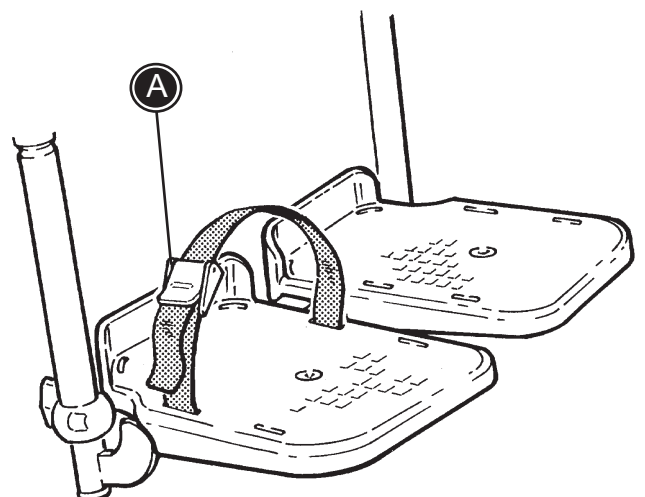

FR

1

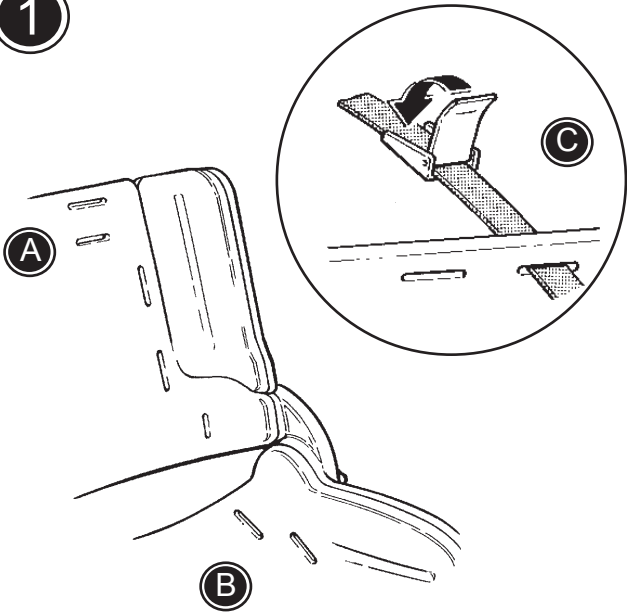


FR

## COURROIE EN H / COURROIE DE HANCHE


1) Montage de la courroie en H / courroie de hanche :


- \* Montez les lanières d'épaules (courroie en H) par les trous du dossier (A).
- \* Montez les lanières latérales par les trous du siège (B).
- \* Fixez les bandes avec les boucles des verrous d'accrochage (C) sur le dossier.

2

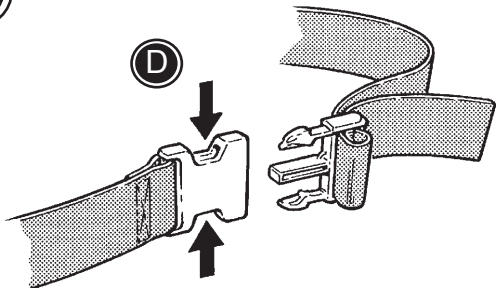

2) Ramenez les courroies dans la boucle du verrou d'accrochage sur le devant et réglez la longueur. Ouvrez la boucle en appuyant comme indiqué (D).

 Faire attention que toutes les fixations et réglages conviennent et soient correctement placées. Ceci doit être vérifié de manière régulière.

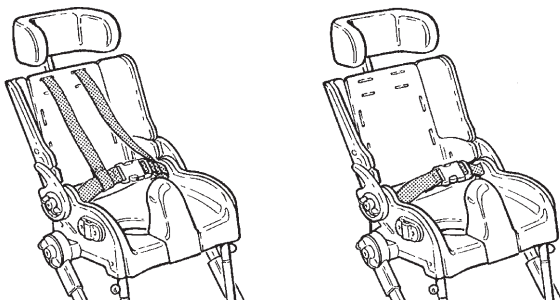






## FR SANGLE DE MOLLETS


Pour éviter que l'enfant ne passe ses pieds derrière le repose pied, il est possible de monter une sangle de mollets .

Montage de la sangle de mollets :

Ouvrir la sangle de mollets et la tendre autour des 2 montants du repose pieds du Flamingo. . Ensuite refermer la sangle avec le Velcro

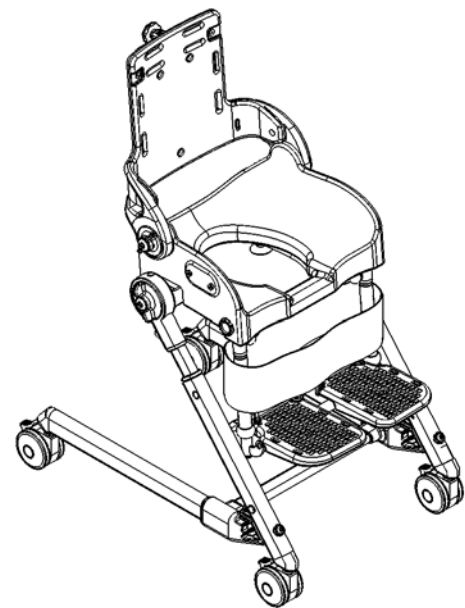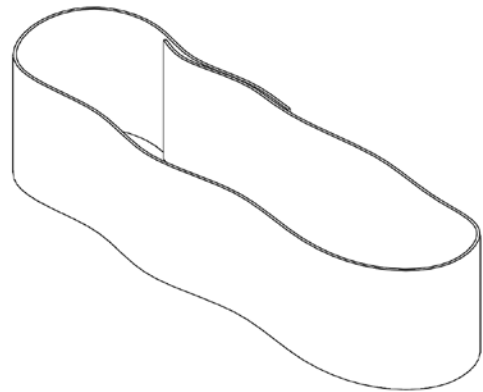

 Ne pas trop tendre la sangle de mollet au risqué de courber les montants du repose pieds.

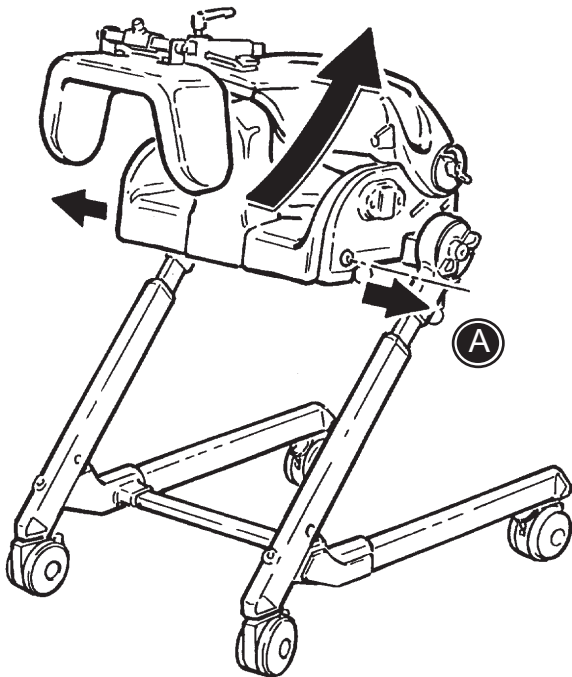


## FR DEMONTAGE DU SIEGE

Autre caractéristique unique du Flamingo : son siège. Vous pouvez le retirer du cadre et le monter sur des toilettes standard ou l'utiliser dans une baignoire ordinaire.

Déposez les vis (A) de chaque côté du fauteuil, pour démonter le siège. Ensuite, basculez le siège vers l'arrière pour le déposer.



Enlevez l'enfant du siège avant de démonter celui-ci.

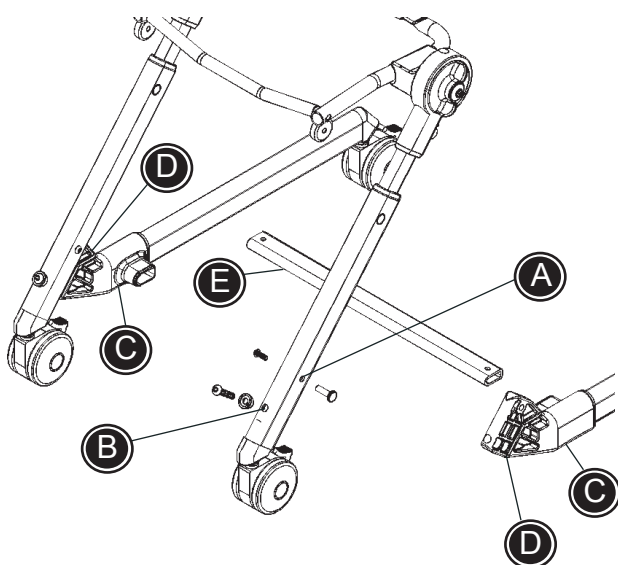

## FR MONTER OU REMPLACER L'ENTRETOISE

- 1) Démontez les ensembles vis/écrou (A) et vis/rondelle (B) sur l'un des côtés, puis retirez les vis (C) cachées sous l'une des 2 pièces de jonction plastique, ce qui permet de desserrer cette pièce et de démonter l'entretoise.
- 2) Pour la remonter, installez l'entretoise (E) dans les 2 pièces de jonction en plastique (D), positionnez la barre et revissez.
- 3) Remontez les ensembles vis/écrou (A) et vis/rondelle (B).



Assurez-vous d'avoir correctement serré le vis et écrou.

## FR MONTAGE DU SIEGE SUR DES TOILETTES

Pour pouvoir monter le siège Flamingo sur des toilettes standard, vous devez commander une fixation supplémentaire et suivre les instructions ci-dessous :



### 1) Préparation du siège :


- \* Démontez le siège (cf. page 15)
- \* Déposez le système de montage de la cuvette de chaise percée le cas échéant.
- \* Placez le nouveau cadre sous le siège.
- \* Placez la fixation du support (A) devant le cadre du siège alors que celui-ci est mis en place. Serrez les vis des deux côtés.
- \* Montez les barres de montage (B) sur le cadre du siège à l'aide des vis incluses.
- \* Les deux fixations des supports (C) doivent être montées sous le siège, dans les trous situés dans le dossier.

### 2) Préparation des toilettes :

- \* Déposez le siège des toilettes (D)
- \* Placez le système de montage (E) et fixez-le avec le siège des toilettes, comme indiqué.

Pour finir, montez le siège Flamingo sur les toilettes en introduisant les barres de montage dans le système de montage. Serrez les vis des deux côtés (F).

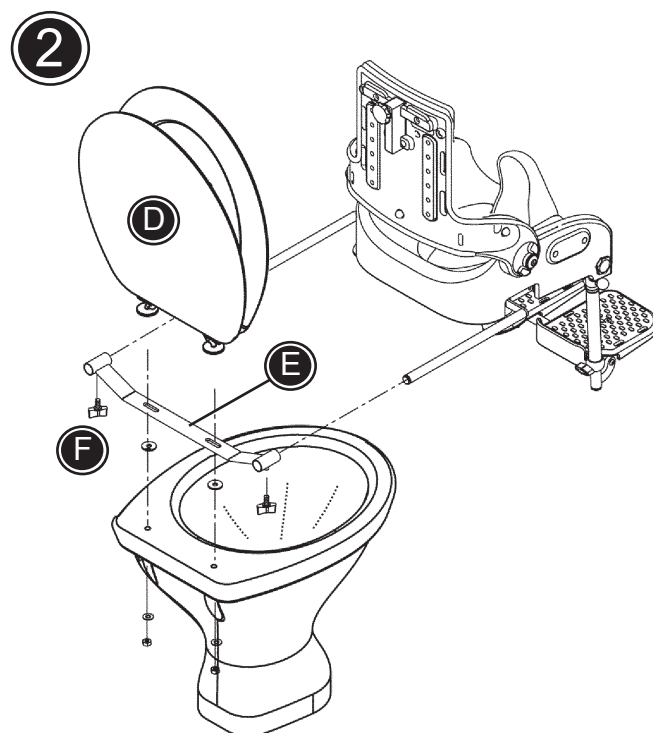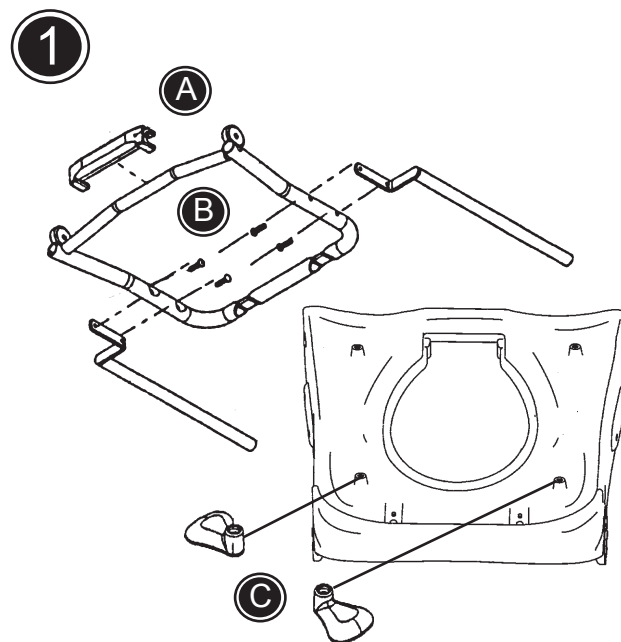

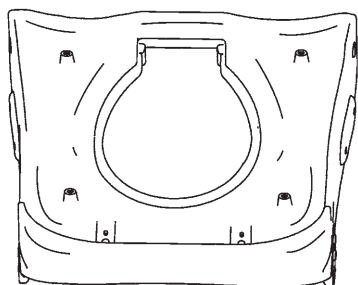

A



1

## FR FLAMINGO EN SIEGE DE BAIN


Grâce aux ventouses montées sous le siège, il est facile d'installer le Flamingo dans la baignoire.


- \* Démontez le siège (cf. page 15)
- \* Déposez le système de montage de la cuvette de chaise percée le cas échéant.


- 1) Montez les quatre ventouses (A) sous le siège
- 2) Placez le siège Flamingo dans la baignoire, le dossier étant adossé à la paroi de la baignoire, conformément au schéma (B)


Faites couler de l'eau dans la baignoire jusqu'à ce que l'eau soit au niveau des hanches de l'enfant.

2

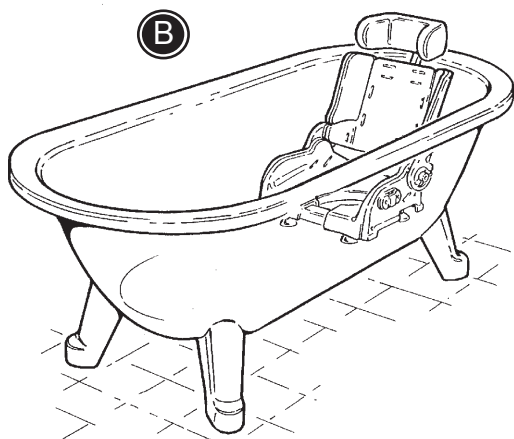

 Vérifiez la température de l'eau avant d'y mettre l'enfant, veillez à ce qu'elle ne dépasse pas les 37°.

 Gardez toujours un oeil sur l'enfant quand il est dans la baignoire.

 Toutes les 20 minutes, vérifiez que le siège est toujours bien positionné dans la baignoire.

## FR REPLIAGE DU FLAMINGO.


Le Flamingo est très facile à plier et déplier, ce qui permet de l'emporter partout. Pour que le Flamingo occupe le moins de place possible, il convient de suivre exactement cette séquence :

- 1) Démontez la cuvette de chaise percée le cas échéant (A).
- 2) Inclinez les plate-formes en position verticale (B) et poussez le repose-pied complet sous le siège en tirant les écrous de sécurité verts vers le bas (C).
- 3) Poussez le dossier vers l'avant. Déposez les vis (D) des deux côtés et sortez le siège du cadre.
- 4) Desserrez les poignées et les écrous de sécurité blancs (E) pour orienter le siège. Déposez les vis (F) à l'avant du cadre et le Flamingo se repliera.




Tenez bien le siège lorsque vous déposez les vis (F) à l'avant du cadre.


1

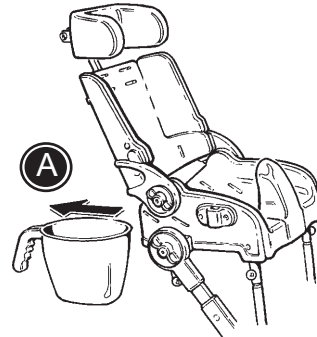



2

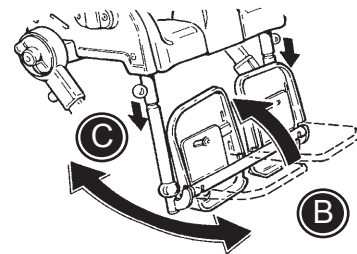


3

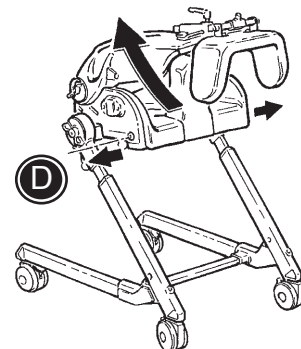

4

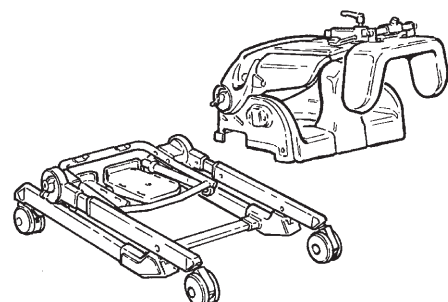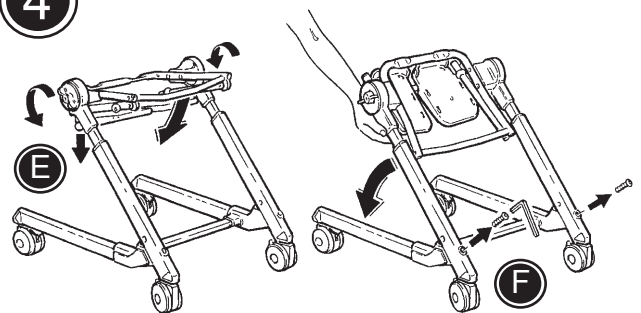

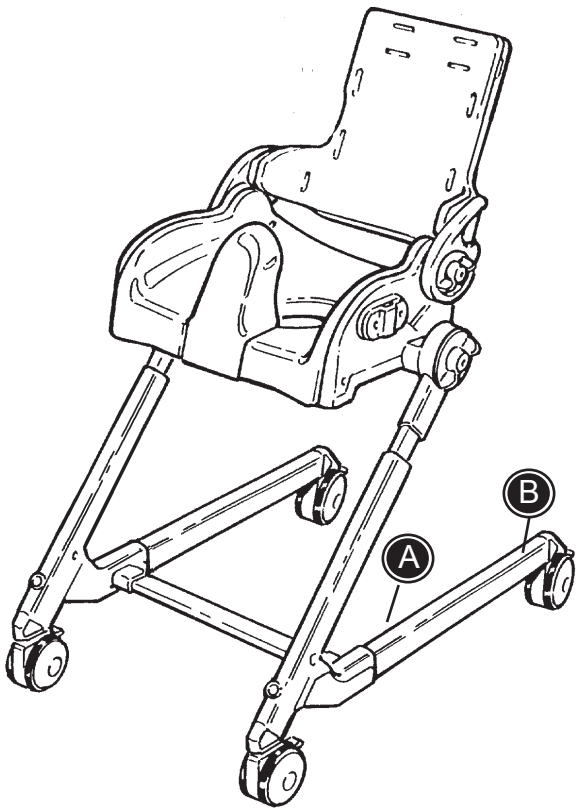

## FR IDENTIFICATION DU PRODUIT


### A) Numéro de série

L'étiquette est placée sur l'intérieur du cadre, juste sous la roue avant gauche.

### B) Fabricant

L'étiquette est placée sur le cadre, juste sous la roue arrière gauche.



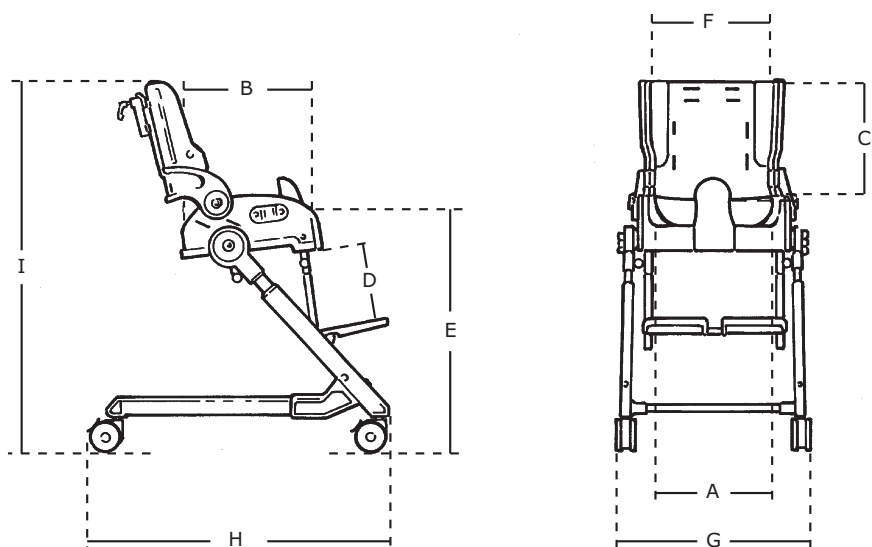

## FR MESURES

	Taille 1 cm (pouces)	Taille 2 cm (pouces)	Taille 3 cm (pouces)	Taille 4 cm (pouces)
Largeur dossier aux hanches (A)	25 (10")	28 (11")	32 (12½")	34 (13")
Profondeur du siège (B)	24 (19½")	29 (11½")	34 (13¼")	40 (15½")
Hauteur du dossier (C)	36 (14")	38 (14¾")	41 (16")	47 (18½")
Longueur jambe inférieure (D)	18-26 (7-10")	25-35 (9¾-13½")	30-40 (11¾-15½")	29-43 (11¼-16¾")
Hauteur du siège (E)	50-60 (19½-23½")	50-60 (19½-23½")	50-60 (19½-23½")	50-60 (19½-23½")
Largeur aux épaules (F)	30 (12")	32 (12½")	38 (15")	40 (15½")
Largeur dossier aux épaules(F1)	19½ (7½")	22 (8½")	26 (10¼")	28 (11")
Largeur, cadre (G)	44 (17")	46 (18")	50 (19¼")	54 (21")
Longueur, cadre (H)	66 (26")	66 (26")	66 (26")	66 (26")
Hauteur, cadre avec siège (I)	86 (33½")	89 (35")	93 (36½")	95 (37")
Hauteur siège, replié	24 (9")	26 (10")	27 (10½")	27 (10½")
Longueur siège, replié	37 (14½")	40 (15½")	43 (17")	46 (18½")
Hauteur cadre, replié	20 (8")	20 (8")	20 (8")	20 (8")
Longueur cadre, replié	74 (29")	74 (29")	74 (29")	74 (29")
Poids	11 kg (10,89 kg)	13 kg (13,15 kg)	14 kg (14,06 kg)	15 kg (14,97 kg)
Charge max./Poids de l'utilisateur	35 kg (34,93 kg)	50 kg (49,90 kg)	60 kg (59,87 kg)	70 kg (69,85 kg)
Orientation	Du siège Barre du repose-pied	-15°-+35° 90°-60°	Du dossier	+25°-90°





