


halv charlie

1

Ouvrez le sac, le coussin de positionnement est déplié et la pompe et le tuyau d'insufflation sont à insérer dans la valve.

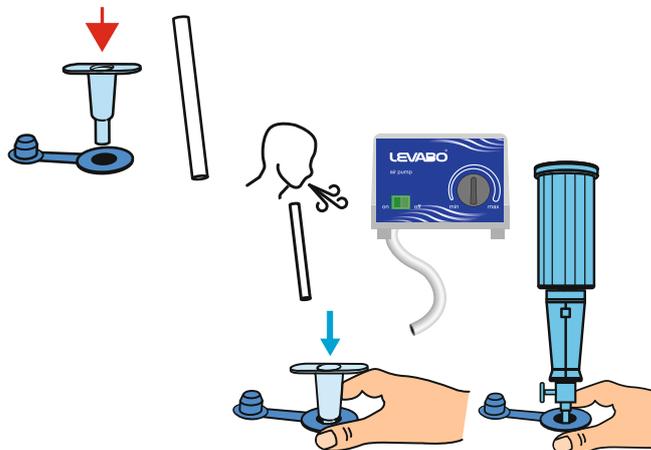

2

Gonflez le coussin aux trois quarts de sa hauteur pour qu'il soit encore souple et flexible.
Fermez la valve.
Le coussin est maintenant prêt à être utilisé.


3

Le patient est aidé à prendre la position souhaitée dans le lit, de préférence avec les genoux relevés et une tête de lit légèrement surélevée.



4

Le coussin est placé sous et entre les genoux de l'utilisateur.
Vérifiez que les hanches et les genoux sont légèrement fléchis et que les jambes de l'utilisateur forment un léger angle vers l'extérieur et effectuent une légère rotation vers l'extérieur.
Déplacez les jambes jusqu'à ce que ce résultat soit atteint.

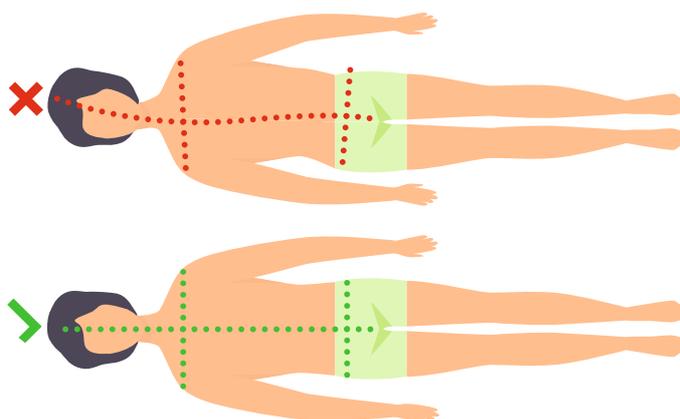

Voir au verso

5

Vérifiez qu'il n'y a aucun endroit sur la face inférieure de l'utilisateur qui ne soit pas en contact avec la surface sous-jacente.

Cela signifie que le coussin ne doit pas seulement soutenir les genoux, mais aussi la surface du corps jusqu'à ce qu'il soit à nouveau en contact avec la surface.

Redressez le coussin de positionnement de manière à ce qu'il repose bien sous le patient.



6

Déterminez s'il y a trop ou trop peu d'air dans le coussin.

Cela dépend du poids de l'utilisateur. Les personnes ayant de grandes jambes auront généralement besoin d'un peu moins d'air.

Le coussin doit rester souple et pliable lorsqu'il est placé sous les jambes de l'utilisateur.

À l'inverse, si un utilisateur a des jambes étroites, un peu plus d'air peut être nécessaire pour que les jambes de l'utilisateur soient soulevées de la surface.



7

La pression d'air est ajustée à l'aide de l'adaptateur fourni.

Le coussin peut également être regonflé s'il perd de l'air après un certain temps d'utilisation.



N'oubliez jamais de fermer la valve et d'appliquer l'étiquette de couverture fournie si nécessaire.

Le coussin peut être utilisé par le même utilisateur jusqu'à ce que le feutre soit usé, soit environ 6 à 8 semaines.

Le coussin peut être essuyé avec un chiffon humide, de l'alcool ou un autre désinfectant approprié.

Le coussin peut être recouvert d'une housse pour patient unique. La housse est commandée séparément comme accessoire.

Numéro de produit : 76140

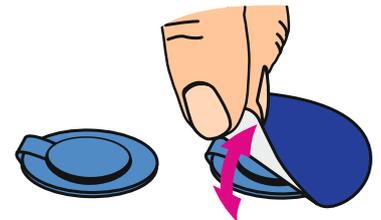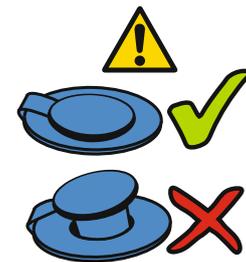

IMPORTANT

All Up® Halv Charlie ne doit PAS être complètement gonflé. Pour un soulagement optimal, il doit être souple et pliable, afin de procurer un soulagement. Vérifiez régulièrement le coussin selon les directives cliniques.