


MONTANA

MANUEL D'INSTALLATION

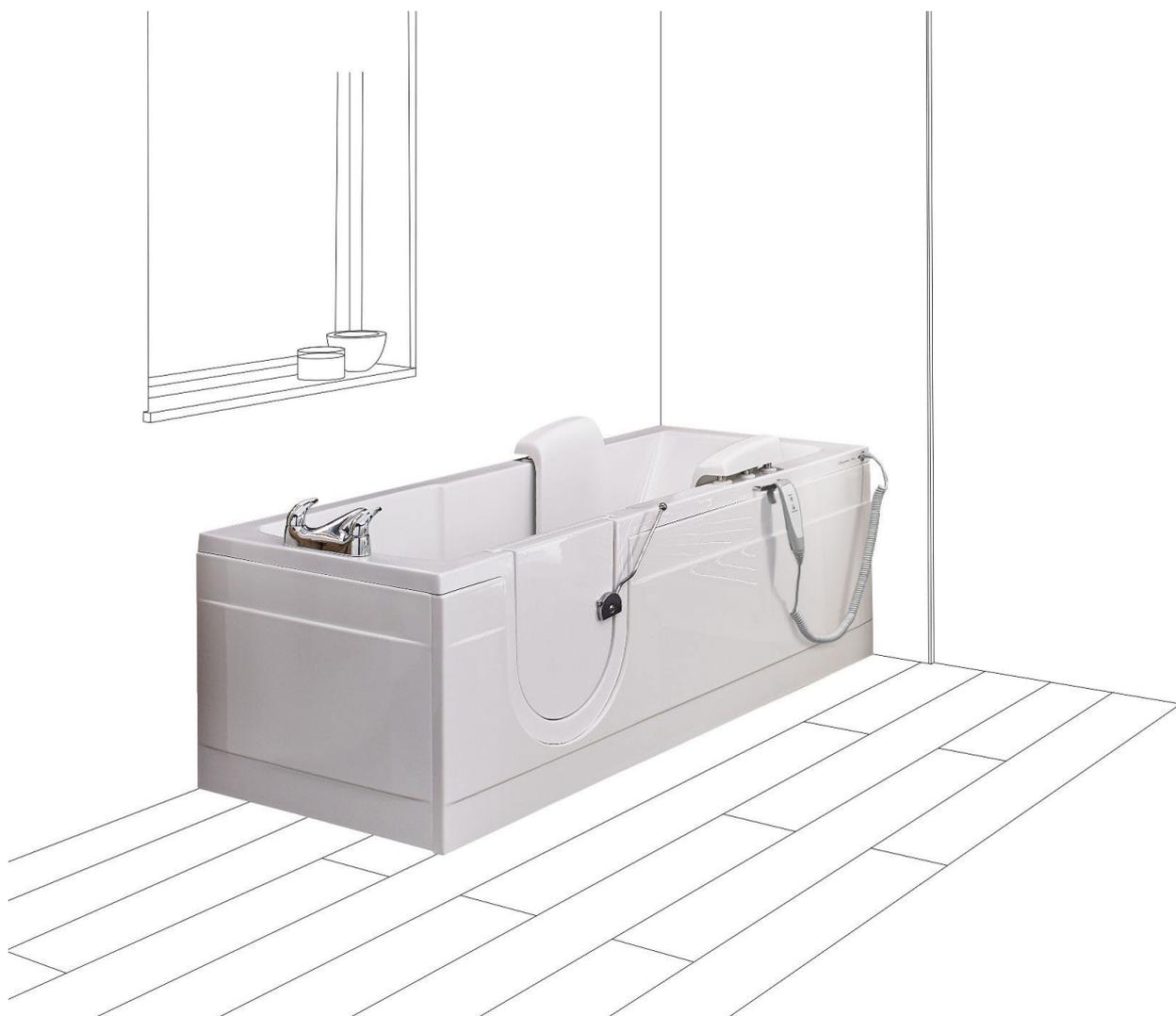

JUMP STRAIGHT TO OUR QUICK VIDEO GUIDE TO FITTING A POWERED WALK IN BATH:



INTRODUCTION

PRÉFACE

Des lectures supplémentaires et des informations connexes peuvent être obtenues en en faisant la demande auprès de Gainsborough Healthcare Group Ltd. Il s'agit notamment de schémas de circuits, de listes de composants, de descriptions, d'instructions d'étalonnage et d'autres informations qui aideront le personnel de service. Vous devez lire et comprendre pleinement ce manuel d'installation dans son intégralité.

UTILISATION PRÉVUE

Cette baignoire est conçue pour être utilisée à des fins d'hygiène générale ainsi que de relaxation. La baignoire ne doit pas être utilisée à d'autres fins.

RECYCLAGE

Les matériaux suivants sont utilisés dans l'emballage du bain à des fins de transport. Triez les matériaux comme recommandé et éliminez-les conformément aux recommandations de votre autorité locale et dans une déchetterie recommandée par celles-ci.

- Emballages - bois, carton et plastiques.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Lors du transport ou du stockage de la baignoire et de tout équipement supplémentaire, assurez-vous que le siège est dans sa position la plus basse, tout autre équipement est solidement fixé à une planche de transport ou à une palette robuste. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager la baignoire et d'autres équipements et annuler la garantie.


DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS FUTURS

Gainsborough Healthcare Group Ltd applique une politique de développement continu des produits et se réserve le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction.....	2
Dimensions et poids.....	4
Consignes de sécurité.....	5
Installation.....	6
Retirer le siège.....	7
Retrait de la porte.....	8
Configurations de salle de bain.....	9
Plomberie.....	11
Éléments électriques.....	12
Combiné à distance - Installer.....	13
Support de combiné - Installer.....	14
Alignement de l'ouverture de la porte.....	15
Installer le siège.....	16
Installer le siège souple (en option).....	16
Installer la porte.....	17
Installez les panneaux de salle de bain.....	20

DIMENSIONS ET POIDS

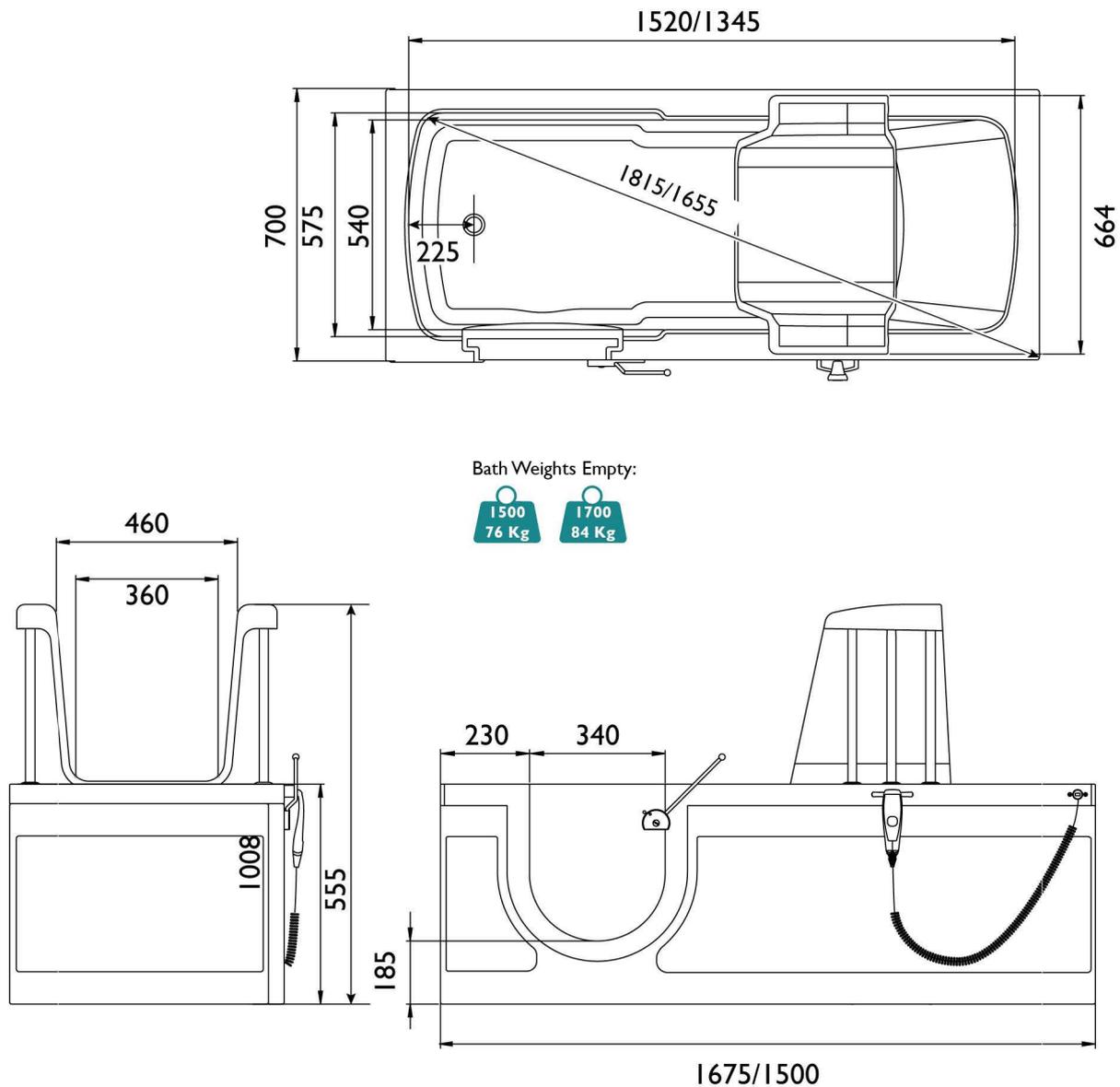

 **Note:** Bath height, dimensions 555, 1008 & 185 are when the bath is adjusted to its lowest position.

Fig 0115

Reportez-vous à la figure 0115, dimensions en millimètres (mm). L'exemple d'un gaucher est illustré (la prise d'un bain est indiquée par le point de sortie du bain en position assise). Pour plus de clarté, les baignoires pour droitiers et gauchers sont disponibles en longueurs de 1700 mm et 1500 mm, qui sont toutes deux annotées sur le schéma ci-dessus.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Les avertissements, les mises en garde et les notes utilisés tout au long de ce manuel ont les significations suivantes :



AVERTISSEMENTS : Les avertissements utilisés dans ce manuel **DOIVENT** être suivis scrupuleusement, le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou être mortel.



MISES EN GARDE : Les précautions utilisées tout au long de ce manuel **DOIVENT** être respectées pour éviter d'endommager votre baignoire ou d'autres équipements optionnels.



REMARQUES : Les notes utilisées dans ce manuel contiennent des informations importantes et des conseils utiles sur le fonctionnement de ce produit.

INSTALLATION

Avant l'installation, vous devez lire les exigences préalables à l'installation. Si **TOUS** les critères sont remplis, poursuivez l'installation. Les avertissements, mises en garde et remarques suivants s'appliquent tout au long de l'installation. Des avertissements, des mises en garde et des notes spécifiques supplémentaires sont également pertinents pour l'étape ou la procédure, comme indiqué tout au long de l'article.



AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Un câblage inapproprié peut provoquer un choc électrique qui peut être mortel. Assurez-vous que l'alimentation électrique est installée par un électricien qualifié conformément à la législation en vigueur, l'équipement ne doit être connecté qu'à une conduite d'alimentation principale avec une mise à la terre de protection à l'aide d'un dispositif à courant résiduel (RCD) selon les dernières spécifications.



AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE : Une mauvaise technique de levage ou le manque d'assistance peut entraîner des blessures. La baignoire est un équipement de levage à usage intensif ou un minimum de deux personnes lors du déplacement de la baignoire.



AVERTISSEMENT RISQUE DE COINCEMENT : L'utilisation du siège lorsque des personnes se trouvent à proximité peut causer des blessures graves ou être mortelle en cas de coincement. Assurez-vous qu'AUCUNE personne ne se trouve à proximité de l'équipement en mouvement pendant son fonctionnement.



ATTENTION : La baignoire ou l'équipement peut être endommagé ou rayé lors de l'utilisation d'outils tranchants pour retirer l'emballage. **N'utilisez PAS** d'outils tranchants pour retirer les matériaux d'emballage.



REMARQUE : Il est de la responsabilité des installateurs de se conformer aux dernières réglementations de construction et de planification avec les autorités locales avant / pendant l'installation, ce qui comprend les travaux de plomberie / électricité / santé / sécurité / levage.



REMARQUE : Les batteries du système doivent être chargées pendant 24 heures avant d'utiliser le bain. Vous pouvez tester le fonctionnement du siège de la baignoire vide pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.



REMARQUE : Lorsque l'installation a lieu, il s'agit d'une installation d'au moins 2 personnes avec un équipement de levage.

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et les emballages en carton du bain et jetez-les conformément aux recommandations de votre autorité locale.
2. Retirez la baignoire de la palette pour la manoeuvrer jusqu'à sa position finale, assurez-vous que tous les articles sont présents, inspectez la baignoire, les panneaux de la baignoire et tous les

accessoires/équipements optionnels, assurez-vous que tous sont intacts.

3. Assurez-vous que la zone où l'installation est prévue est propre, exempte de débris, qu'elle est de niveau plat et structurellement saine.

RETIRER LE SIÈGE

4. Reportez-vous à la Fig 0130, pour faciliter l'installation, retirez le siège comme suit : Connectez temporairement une alimentation électrique et branchez le combiné à distance. Pour plus d'informations, reportez-vous à [la page Remote Handset -Install, 13.](#)
5. Appuyez sur le bouton « Seat up » (1) pour soulever le siège à mi-hauteur.
6. Appuyez avec précaution sur les deux boutons chromés arrière (2) pour libérer le siège (4) du cadre du siège (3).
7. Soulevez simultanément le dossier du siège (4) comme indiqué et faites-le pivoter vers l'extérieur, rangez-le dans un endroit sûr.

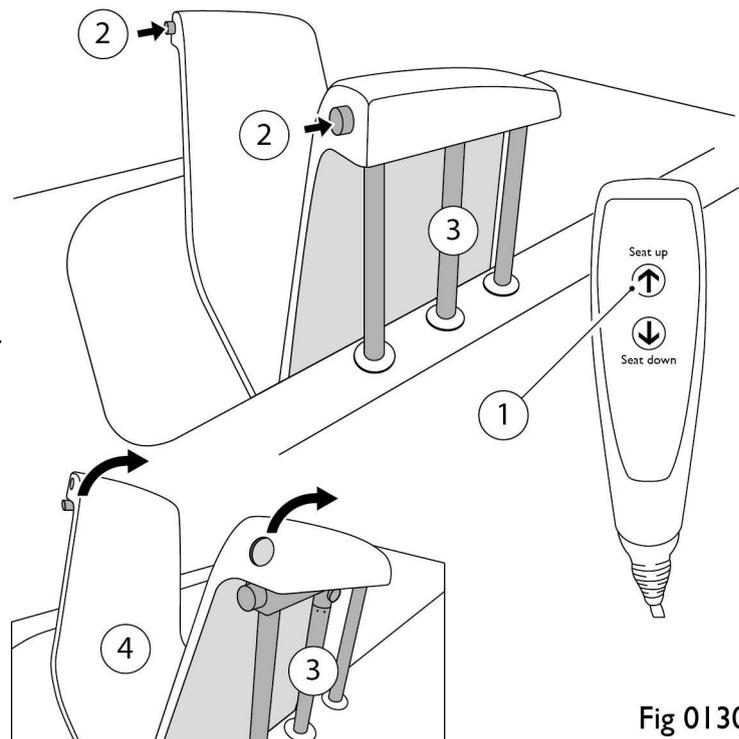


Fig 0130

Siège souple - Retrait (en option)

8. Reportez-vous à la Fig 0125, retirez le siège souple comme suit : Connectez temporairement une alimentation électrique et branchez le combiné à distance. Pour plus d'informations, reportez-vous à [la page Remote Handset - Install, 13.](#)
9. Utilisez la télécommande (3) et actionnez le bouton « Seat up » (4) pour soulever le siège à peu près à mi-hauteur.
10. Tout en appuyant sur les boutons (2) Retirez l'ensemble du carénage (6) pour déverrouiller.
11. Dégagez l'ensemble carénage (6) de l'ensemble de l'étrier (7).
12. Retirez l'ensemble tissu/carénage (1), (6) de l'ensemble de l'étrier (7) comme

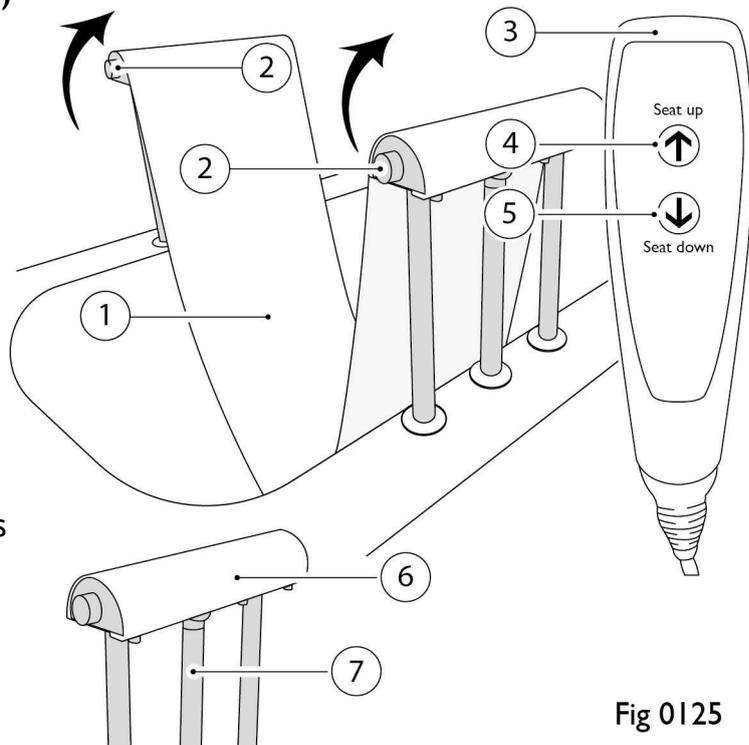


Fig 0125

indiqué et faites-le pivoter,
rangez-le dans un endroit sûr.

RETRAIT DE LA PORTE



ATTENTION : La baignoire pourrait fuir de l'eau, ce qui pourrait endommager la salle de bain, ce qui peut être irréparable NE PAS desserrer ou défaire en aucun cas les écrous de charnière ou les vis, ceux-ci sont préréglés en usine.



REMARQUE : Lorsque la baignoire n'est pas utilisée, la porte doit être fermée mais pas verrouillée. Cela permet d'éliminer la tension des charnières et d'éviter que le joint de porte ne se comprime au fil du temps.

Pour éviter que la porte ne soit rayée ou endommagée lors de l'installation, retirez-la comme suit :

13. Reportez-vous à la Fig 0177, ouvrez la porte (1) d'environ 1/2 à 3/4 complètement ouverte.

14. Soulevez uniformément la porte (1) vers le haut qui sépare les ensembles de charnières (2) et (3), rangez-la dans un endroit sûr.

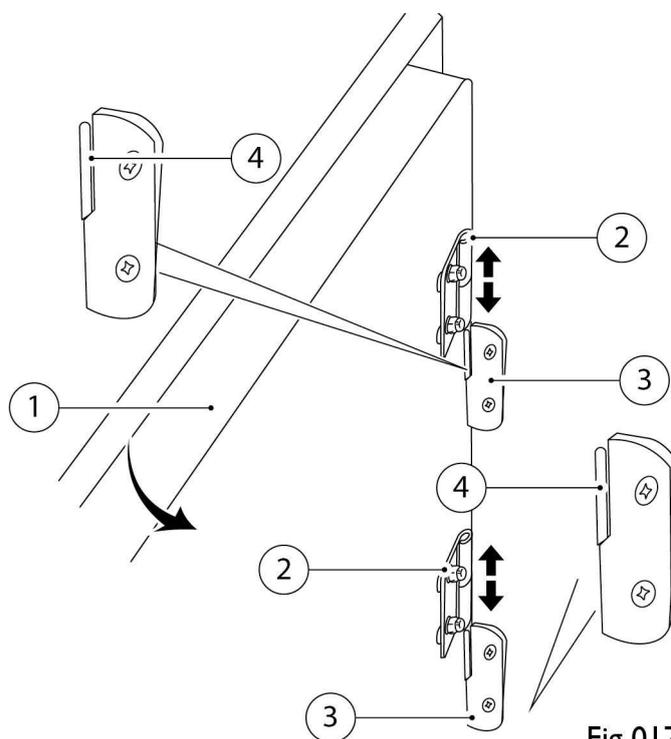


Fig 0177

CONFIGURATIONS DE SALLE DE BAIN




ATTENTION : La baignoire peut se déformer/pincer en particulier avec la configuration 'Alcôve' qui peut être irréparable. Assurez-vous qu'il y a quelques millimètres entre le périmètre de la baignoire et **TOUTE** surface murale. Cela garantit que la baignoire n'est pas déformé/pincé.

Il existe trois configurations différentes possibles. Assurez-vous d'avoir la bonne configuration de baignoire et le bon nombre de panneaux de baignoire, comme suit :

15. Reportez-vous à la Fig 0129, configuration à paroi droite (A), un panneau de baignoire avant et deux panneaux d'extrémité sont nécessaires.

16. Configuration d'angle (B), un panneau de baignoire avant et un panneau d'extrémité sont requis.

17. Configuration en alcôve (C), un panneau de baignoire avant est requis.

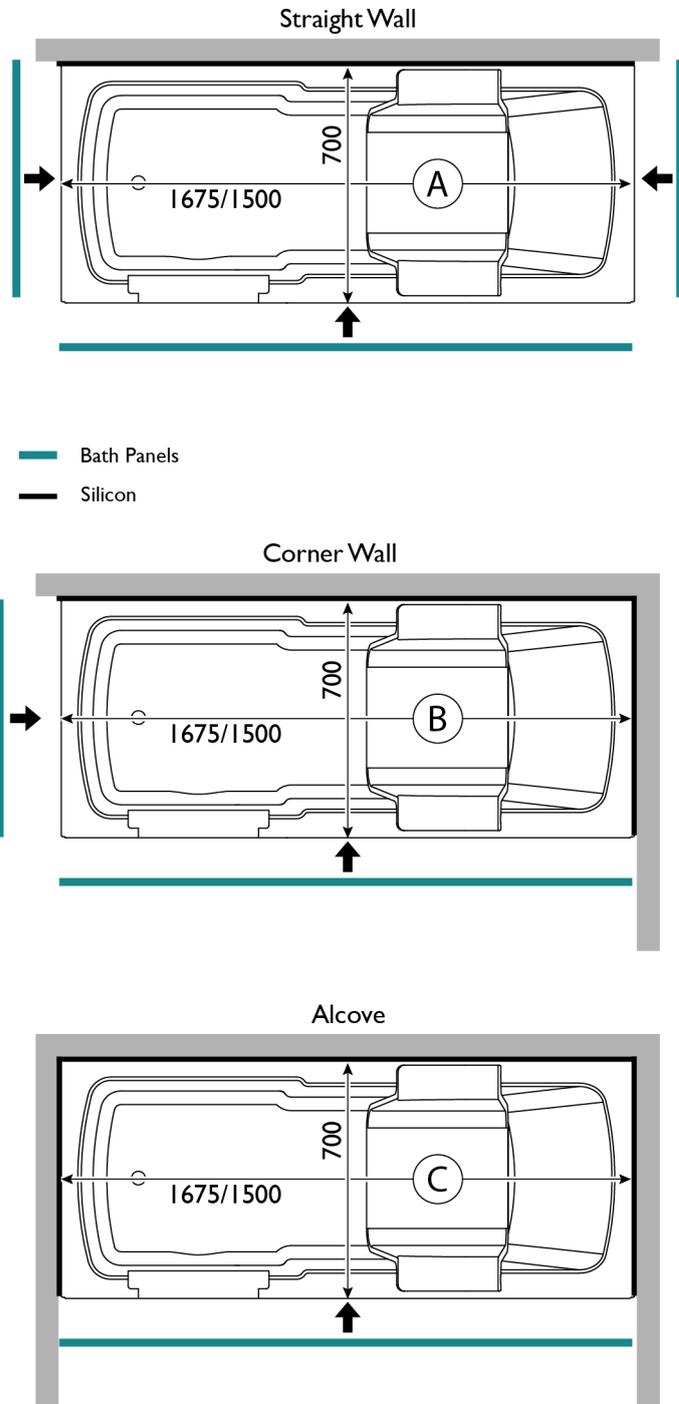

Left Handed Bath Shown
Right Handed Mirror Image

Fig 0129



POINT D'ENTRETIEN : Reportez-vous à la Fig 0132, **NE PAS** jeter les supports de pieds fendus (3), ils sont nécessaires pour ancrer la baignoire, lors de l'installation.

18. Reportez-vous à la Fig 0132, retirez 2 vis (1) dans chaque position et jetez la planche de transport en bois (2), les supports de pied fendu X4 (3) restent avec la baignoire et ne doivent pas être jetés.

19. Reportez-vous à la Fig 0133, Positionnez la baignoire dans sa position optimale.

20. L'utilisation d'un niveau à bulle dans toutes les directions permet de s'assurer que la baignoire est de niveau.

21. Tous les réglages nécessaires doivent être effectués comme suit dans les positions X4 (1) : Desserrez le contre-écrou (3) et ajustez-le vers le haut/vers le bas si nécessaire avec l'écrou de réglage

5° jusqu'à ce que la baignoire soit de niveau dans toutes les directions. Ne serrez pas les contre-écrous (3) à ce stade.

22. Marquer les positions de fixation des vis (4) sur le sol, en veillant à ce que la fente ouverte (A) des supports de pieds fendus X4 (2) soit orientée à l'opposé de l'arrière de la baignoire. Cela permet de remettre la baignoire en place une fois que les supports de pieds fendus (2) ont été vissés au sol.

23. Déplacez la baignoire hors de la zone d'installation immédiate, percez le sol (si le béton) et installez des « chevilles Rawl » appropriées, et/ou fixez les supports de pieds fendus (2) avec des vis appropriées au sol. Assurez-vous que les 4 fentes

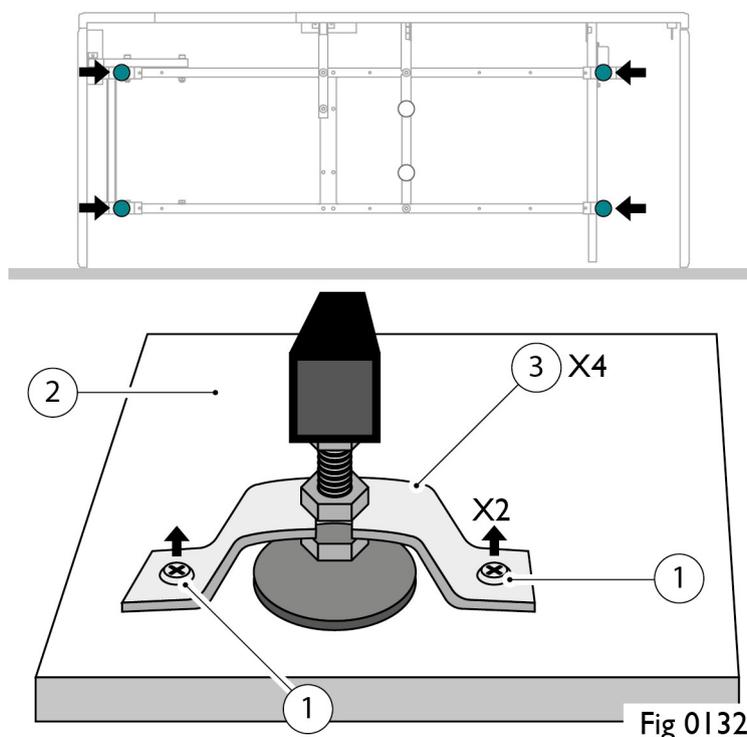


Fig 0132

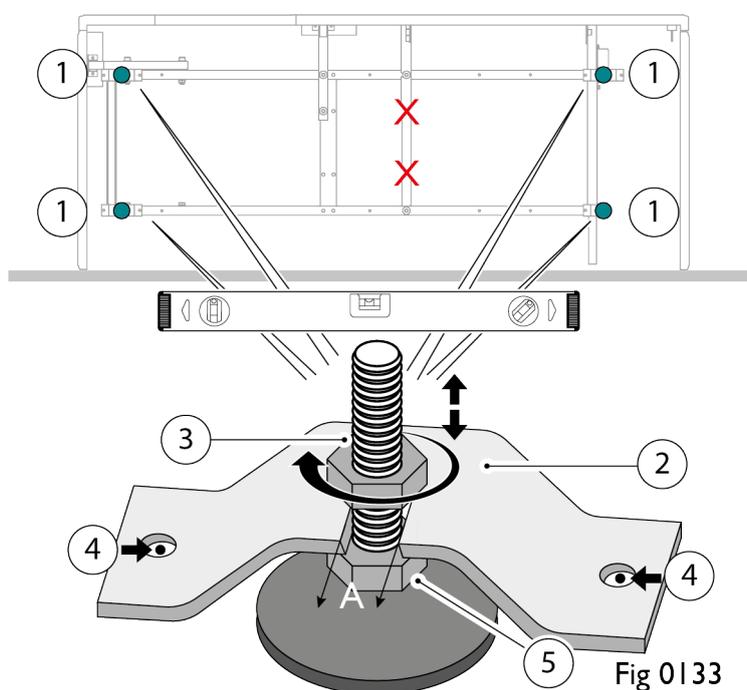


Fig 0133

ouvertes (A) sont orientées vers l'extérieur, comme décrit à l'étape précédente.

24. Avec de l'aide, déplacez la baignoire en position et faites glisser la baignoire/les pieds de la baignoire dans les fentes ouvertes

(A) jusqu'à ce qu'il soit complètement à la maison, vérifiez à nouveau

La baignoire est toujours de niveau et effectuez les derniers ajustements si nécessaire, assurez-vous qu'un espace de 5 mm est maintenu le long de tout mur touché par la baignoire, puis serrez les contre-écrous (3).

PLOMBERIE



AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE : L'utilisation d'un bain sans mitigeur thermostatique (TMV) peut provoquer des brûlures. Installez un TMV et réglez la température à un maximum de 43 °C, si elle n'est pas déjà pré-réglée.



REMARQUE : Les TMV sont réglementés par la loi. En 2010, il est devenu obligatoire d'installer un TMV dans toutes les nouvelles constructions commerciales et domestiques, ainsi que dans les propriétés subissant un « changement d'utilisation » après 2012.

25. Si un ensemble de robinets et de becs a été commandé au point de vente, ceux-ci seront livrés entièrement équipés et le TMV est réglé à 43 °C. Un TMV peut être fourni directement ou acquis ailleurs, mais il est fortement recommandé d'installer une vanne de bonne qualité, en suivant les informations d'installation et en réglant la température à un maximum de 43 °C.

26. Si un robinet ou un ensemble de becs n'a pas été commandé au point de vente, installez vos robinets conformément aux instructions du fabricant.



REMARQUE : Pour les positions d'alimentation en eau et en déchets et des informations supplémentaires, veuillez vous référer à la documentation de pré-installation.

27. Reportez-vous à la Fig 0147, raccordez l'alimentation en eau froide (1) au mitigeur ou directement au robinet d'eau froide à l'aide d'un raccord flexible de longueur appropriée de 22 mm. Itinéraire pour s'assurer qu'il n'y a pas de pliage, serre-câble si nécessaire.

28. Raccorder l'alimentation en eau chaude (3) secteur à la vanne mélangeuse ou directement au robinet d'eau chaude à l'aide d'un connecteur flexible de longueur appropriée de 22 mm. Itinéraire pour s'assurer qu'il n'y a pas de pliage, serre-câble si nécessaire.

29. Coupez à la longueur voulue si nécessaire et raccordez la sortie du tuyau d'évacuation de 40 mm (2) à la baignoire à l'aide d'un coude en « U » approprié, tracez pour vous assurer qu'il n'y a pas de pliage, serre-câble si

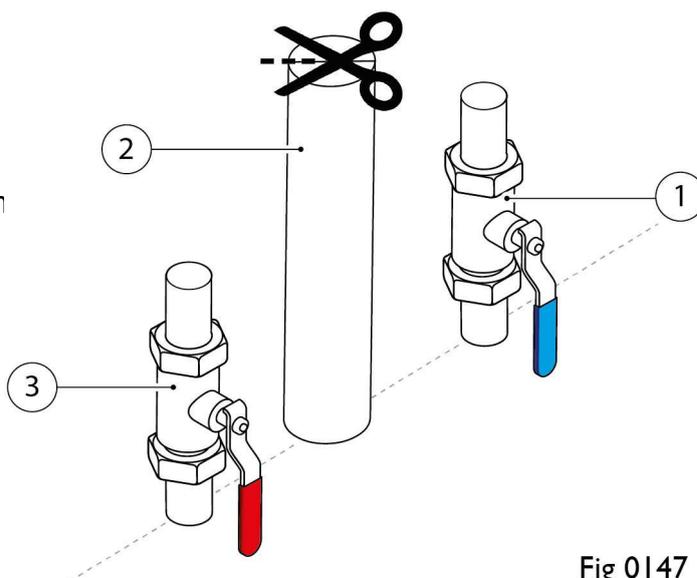


Fig 0147

nécessaire. Si vous utilisez un joint flexible , assurez-vous qu'il est conforme aux réglementations en vigueur en matière de construction.

ELEMENTS ELECTRIQUES



AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Un câblage inapproprié peut provoquer un choc électrique qui peut être mortel. Assurez-vous que l'alimentation électrique est installée par un électricien qualifié conformément à la législation en vigueur, l'équipement ne doit être connecté qu'à une conduite d'alimentation principale avec une mise à la terre de protection à l'aide d'un dispositif à courant résiduel (RCD) selon les dernières spécifications.



REMARQUE : Pour plus d'informations sur les exigences électriques, veuillez vous référer à la documentation de pré-installation .

30. Reportez-vous à la Fig 0180, localisez la prise à fusible commutée 5A d'alimentation (1).

31. Mesurez et coupez le conduit (installé à l'étape de pré-installation) à une longueur appropriée

32. Assurez-vous que le flex de 1,5 mm (2) est acheminé à travers le cadre de la baignoire et le câble attaché pour sécuriser.

33. Connectez le flex à 3 noyaux de 1,5 mm au boîtier de commande (3).

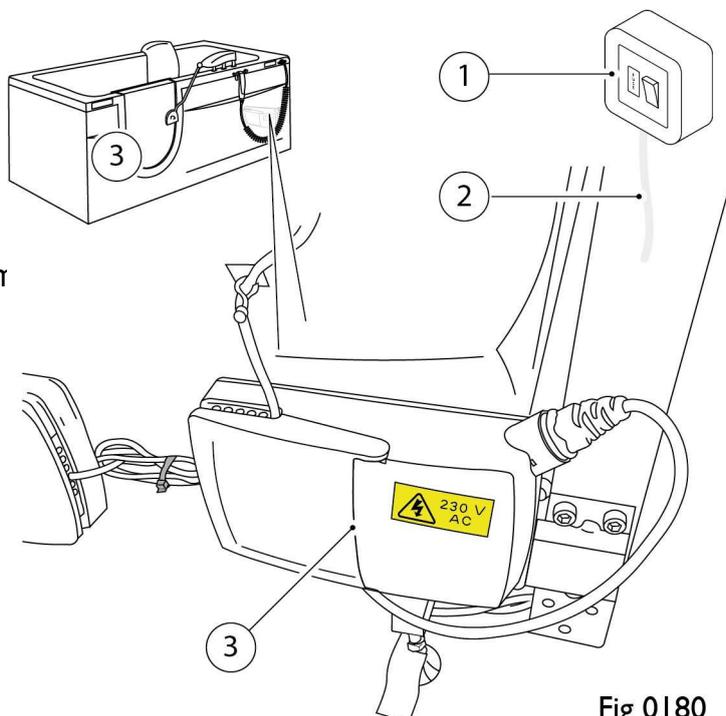


Fig 0180


34. Tous les accessoires sont pré-câblés lors de la fabrication, mais il est nécessaire d'installer une alimentation électrique, comme suit :

35. Reportez-vous à la Fig 0181, localisez l'accessoire, le fusible commuté 13A (1).

36. Mesurez et coupez le conduit (installé à l'étape de pré-installation) à une longueur appropriée

37. Assurez-vous que le flex de 1,5 m (2) est acheminé à travers le cadre de la baignoire et le câble attaché pour sécuriser.

38. Connectez le flex à 3 noyaux de 1,5 mm au boîtier de commande des accessoires (3).

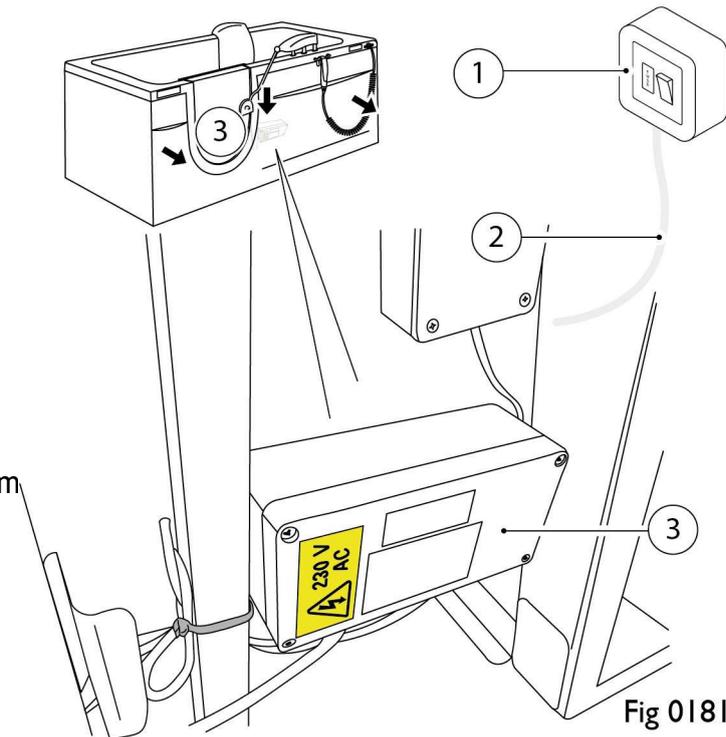


COMBINÉ À DISTANCE - INSTALLER

39. Reportez-vous à la Fig 0182, installez le câble du combiné (1) dans la baignoire, en vous assurant que l'orientation est correcte et que la fiche est alignée avec le point d'entrée de la baignoire.

40. Assurez-vous que les languettes (4) du clip de retenue (3) sont orientées vers la baignoire et que l'ardillon surélevé sur le côté du clip de retenue (2) est orienté à l'opposé du bain, comme illustré.

41. Compresser le clip de retenue (3) légèrement et poussez dans le trou. Manœuvrez le clip de retenue (3) jusqu'à ce que les languettes (4) s'enclenchent dans les fentes du clip de retenue dans l'orifice.

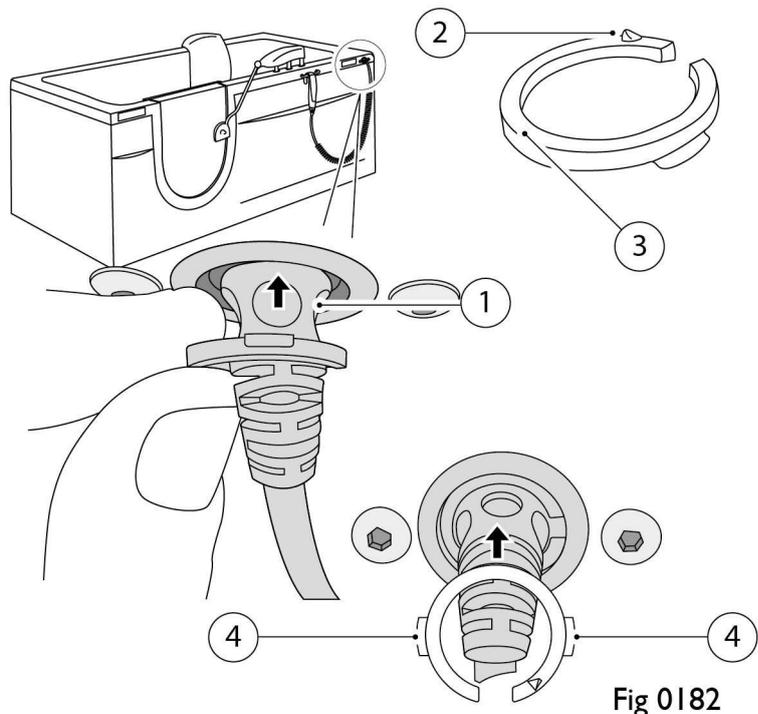

SUPPORT DE COMBINÉ - INSTALLER

42. Reportez-vous à la Fig 0157, installez le support de combiné à distance chromé à l'aide des vis X2 fournies.

43. Accrochez le combiné à distance sur le support.

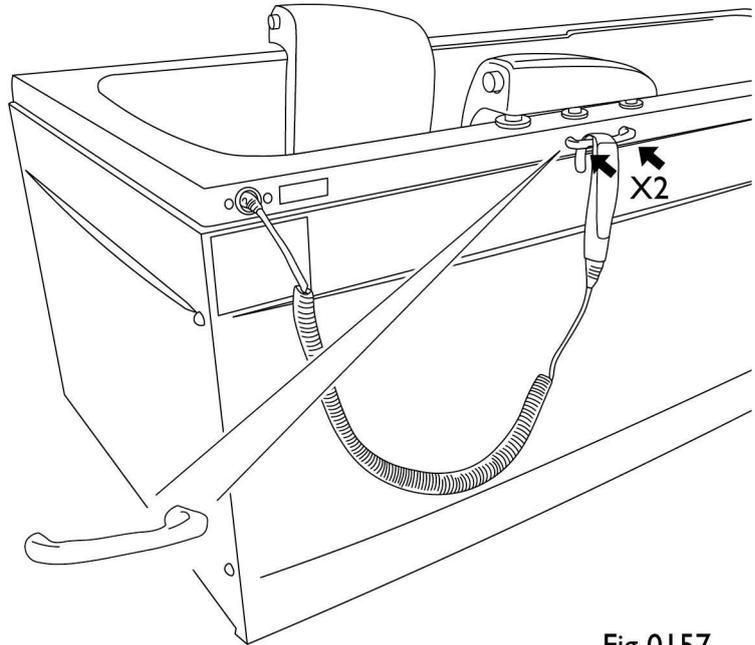


Fig 0157

ALIGNEMENT DE L'OUVERTURE DE LA PORTE



ATTENTION : La baignoire pourrait être endommagée ou des fuites/inondations pourraient se produire, ce qui peut être irréparable, si le réglage pour aligner l'ouverture de la porte n'est pas effectué correctement. **N'ESSAYEZ JAMAIS D'AJUSTER LA PORTE OU LES CHARNIÈRES, SI LE VERRE**

La porte semble mal alignée. Quoi qu'il en soit, réajustez les pieds de la baignoire pour assurer l'alignement de l'ouverture de la porte .

44. Reportez-vous à la Fig 0158, avec un long niveau à bulle à travers l'ouverture de la porte, vérifiez qu'il est de niveau.

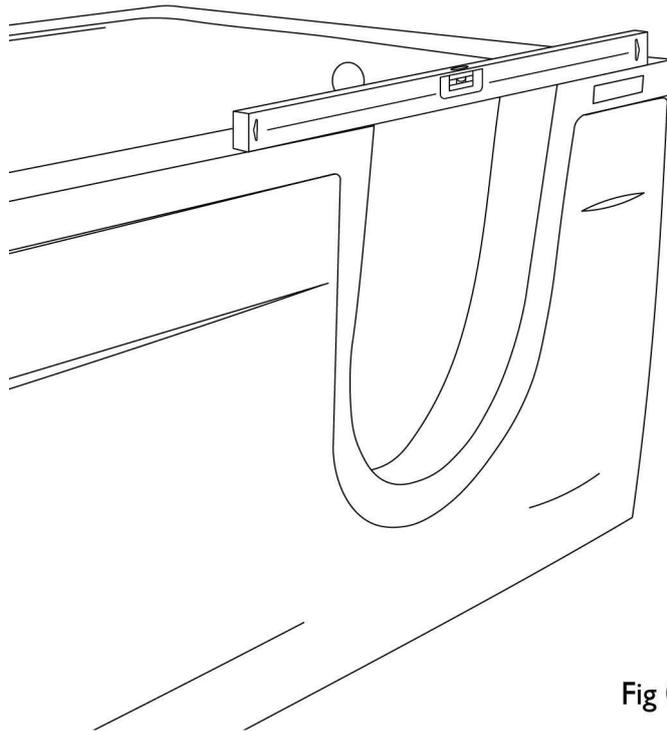


Fig 0158

Si un ajustement est nécessaire, procédez comme suit :

45. Reportez-vous à la Fig 0159, localisez les pieds de réglage X2 (1) sous la baignoire (pas les pieds extérieurs).

46. Desserrez le contre-écrou (2).

47. Abaissez le pied (3) au sol, faites un demi-tour supplémentaire pour vous assurer que le pied (3) supporte le poids du bain.

48. Fixez-le en position contre le cadre de la baignoire à l'aide d'un contre-écrou (3).

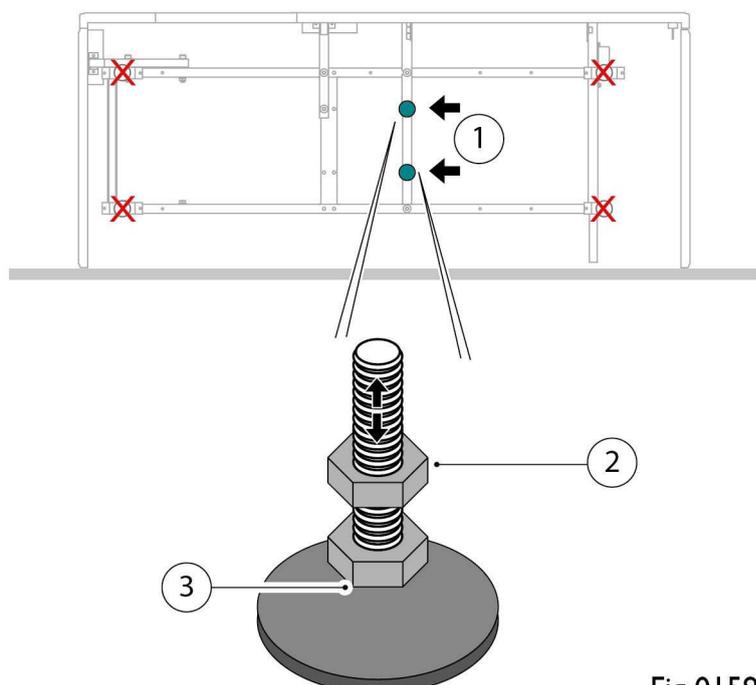


Fig 0159,

INSTALLER LE SIÈGE

49. Reportez-vous à la Fig 0141, soulevez la plate-forme du siège à environ mi-chemin en appuyant sur le bouton « Siège vers le haut »

(6) bouton.

50. Assurez-vous que le siège est dans le bon sens avec les boutonnières (2) face à l'arrière.

51. En commençant par l'avant (1), (dans un mouvement de pivotement comme illustré), placez le siège (4) sur le bras du siège (3) pour les engager.

52. Lorsque les deux côtés du siège sont engagés à l'avant (1), abaissez le siège (4) à l'arrière jusqu'à ce que le siège repose légèrement sur les boutons chromés du siège (5).

53. Appuyez simultanément sur les boutons chromés du siège (5) tout en abaissant le siège (4), jusqu'à ce que les trous (2) dans le siège se trouvent dans les boutons chromés du siège (5).

54. Abaissez le siège dans la baignoire en appuyant sur le bouton « Seat down » (7).

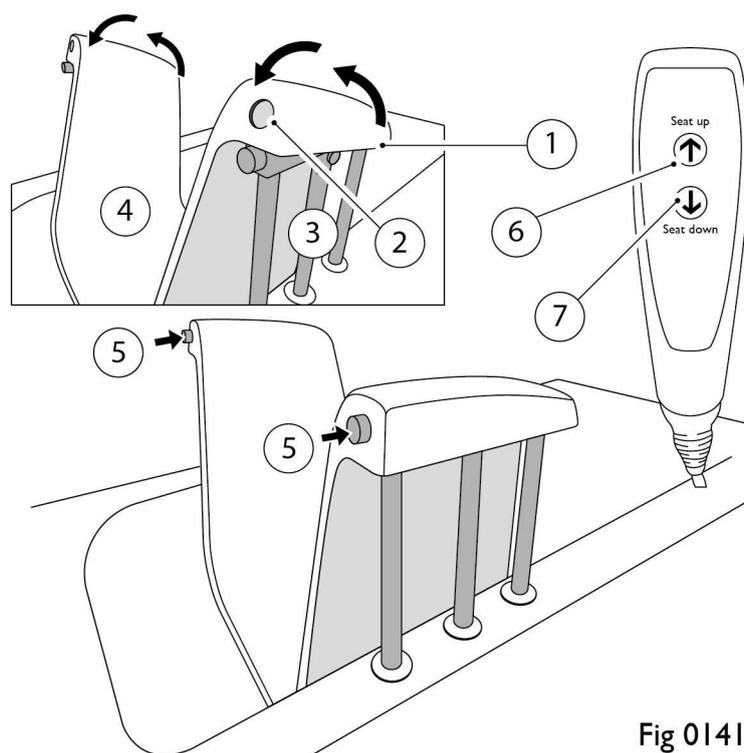


Fig 0141

INSTALLER LE SIÈGE MOELLEUX (EN OPTION)

55. Reportez-vous à la Fig 0135, soulevez la plate-forme du siège à environ mi-chemin en appuyant sur le bouton « Siège vers le haut »

(1) sur la télécommande.

56. Assurez-vous que le siège est dans le bon sens avec les boutonnières (2) orientés vers l'arrière et les fixations à boulons 'Allen' (5) pointant vers l'extérieur de la baignoire.

57. En commençant d'un côté ou de l'autre, prenez l'ensemble de fixation du siège (3), accrochez la lèvres avant sous l'avant du siège (4)

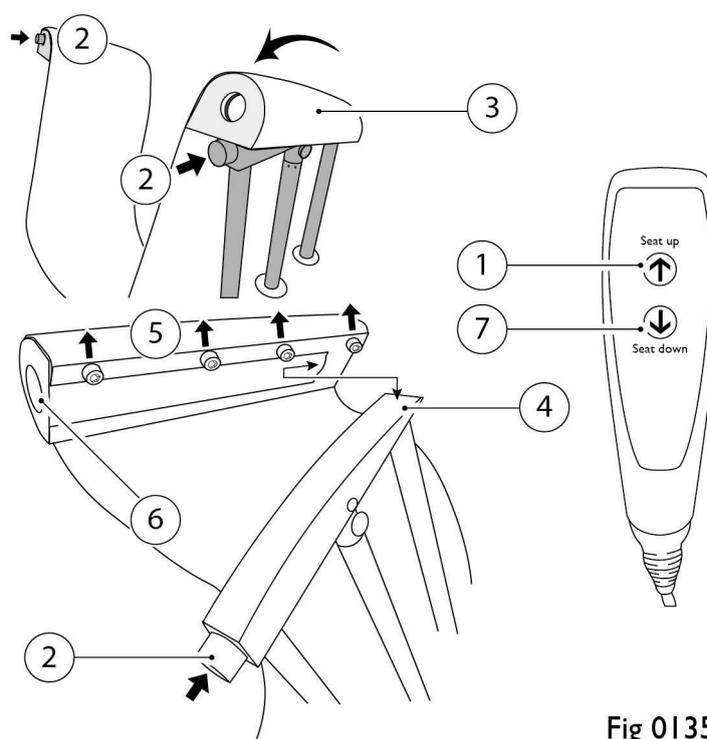


Fig 0135

et faites pivoter l'arrière vers le bas comme indiqué, en posant doucement la fixation du siège (3) sur le bouton chromé du siège (2).

58. Appuyez simultanément sur le bouton chromé du siège (2) et appuyez sur la fixation du siège (3) jusqu'à ce que le trou (6) du siège se situe dans le bouton chromé du siège (5). Répétez les étapes 3 et 4 pour l'autre côté.

59. Abaissez le siège dans la baignoire en appuyant sur le bouton « Seat down » (7).

INSTALLER LA PORTE



ATTENTION : La baignoire pourrait fuir de l'eau, ce qui pourrait endommager la salle de bain, ce qui peut être irréparable **NE PAS** desserrer ou défaire en aucun cas les écrous de charnière ou les vis, ceux-ci sont préréglés en usine.



REMARQUE : Lorsque la baignoire n'est pas utilisée, la porte doit être fermée mais pas verrouillée. Cela permet d'éliminer la tension des charnières et d'éviter que le joint de porte ne se comprime au fil du temps.



ATTENTION : La baignoire pourrait être endommagée ou des fuites/inondations pourraient se produire, ce qui peut être irréparable, si le réglage pour aligner l'ouverture de la porte n'est pas effectué correctement.
N'ESSAYEZ JAMAIS D'AJUSTER LA PORTE OU LES CHARNIÈRES, SI LE VERRE

La porte semble mal alignée. Quoi qu'il en soit, réajustez les pieds de la baignoire pour assurer l'alignement de l'ouverture de la porte .

60. Reportez-vous à la Fig 0177, avant d'installer la porte, lubrifiez légèrement les deux axes de charnière inférieurs (4) avec une petite quantité de vaseline

61. Positionnez la porte (1) de manière à ce qu'elle soit approximativement en position ouverte de 1/2 à 3/4 .

62. Guidez soigneusement les charnières supérieures (2) sur les goupilles (4) des charnières inférieures (3) et abaissez uniformément la porte (1) vers le bas. Assurez-vous que la porte est complètement abaissée .

63. Ouvrez et fermez la porte plusieurs fois pour vous assurer qu'elle s'ouvre et se ferme en douceur.

64. Fermez la porte et vérifiez qu'elle est alignée avec l'ouverture de la baignoire/porte. S'il est mal aligné, ajustez l'alignement de l'ouverture de la porte, reportez-vous à [la page Alignement de l'ouverture de la porte, 15](#).

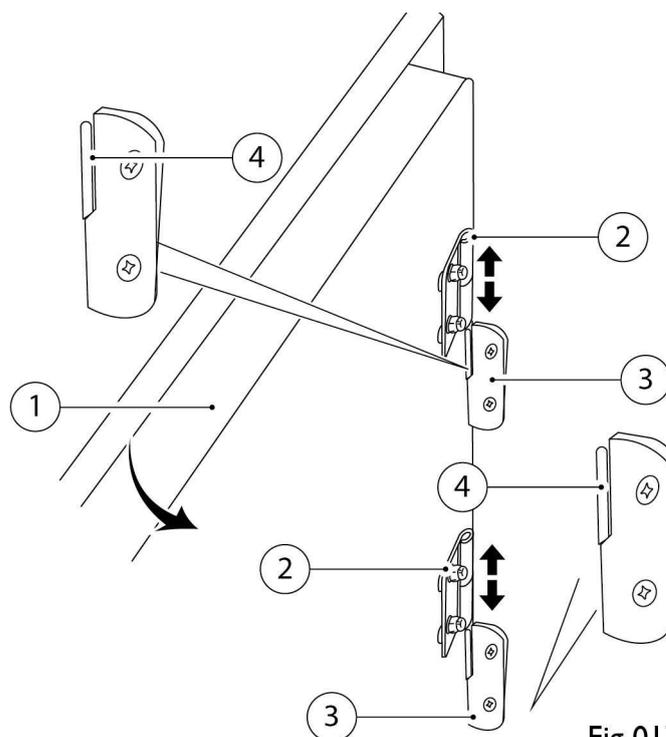


Fig 0177

65. Reportez-vous à la Fig 0178, fermez la porte et verrouillez-la, en position avec la poignée.

66. Inspectez visuellement : la porte s'adapte parfaitement et le joint de la porte semble légèrement comprimé autour du périmètre de la porte.

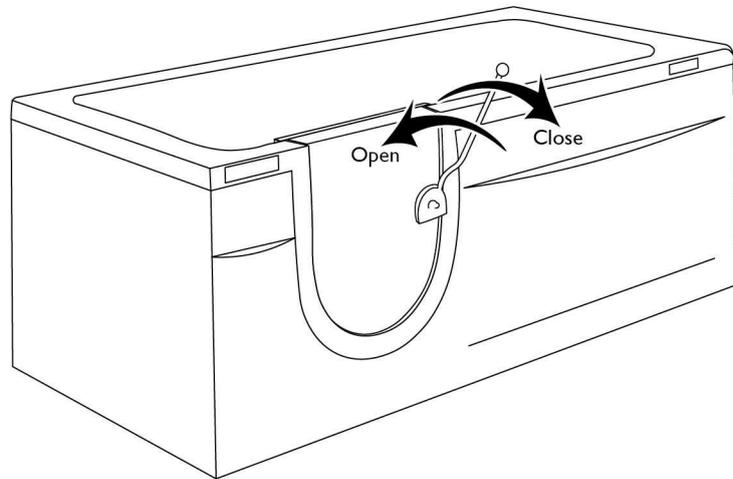


Fig 0178

67. Reportez-vous à la Fig 0113, verrouillez le vidage du clicker (1) en position fermée en appuyant dessus et en le relâchant.

68. Ou insérez le bouchon (2), (facultatif) dans le trou du bouchon (3).


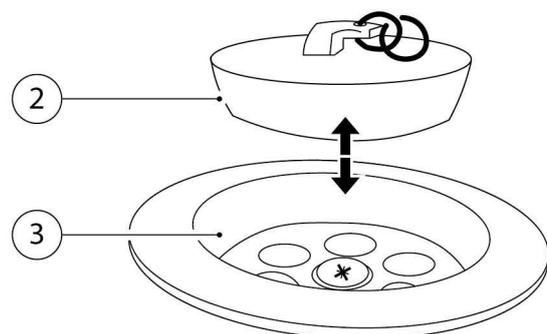


Fig 0113

Remplir le bain

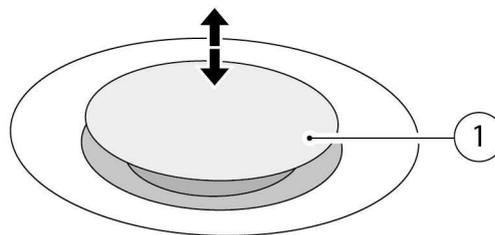

REMARQUE : Reportez-vous à la Fig 0161, l'option de robinets de remplissage (A) est disponible pour les baignoires de 1500/1700 mm . Le bec de remplissage avec vannes chaudes et froides (B) est disponible uniquement sur les baignoires de 1700 mm.

69. Ces informations se réfèrent aux remplisseurs/robinets de baignoire (en option) fournis par **Access Walk in Baths** (ou reportez-vous au manuel correspondant fourni par votre fournisseur). Reportez-vous à la Fig 0161, ouvrez les robinets/robinet de remplissage à chaud (1) et commencez à remplir le bain.

70. Pendant le remplissage du bain, si un TMV est installé, testez la température de l'eau chaude et ne dépasse pas un maximum de 43 °C avec un thermomètre calibré.

71. Ouvrez les robinets/remplissage à froid (2), tout en continuant à remplir la baignoire, vérifiez visuellement s'il y a des fuites d'eau provenant des alimentations chaudes et froides sous la baignoire, de la zone d'étanchéité de la sortie des déchets et autour du joint de la porte.

72. Remplissez la baignoire juste au-dessus du trop-plein, assurez-vous que l'eau sort par le trop-plein et inspectez le trop-plein pour détecter les fuites autour de la ou des zones d'étanchéité.

73. Reportez-vous à la Fig 0162. Avec la baignoire pleine à l'aide d'un mastic silicone sanitaire antibactérien, scellez la baignoire au mur indiqué par les flèches sur le schéma, en fonction de la configuration de la baignoire. Laissez la baignoire pleine, en laissant le temps aux panneaux de la

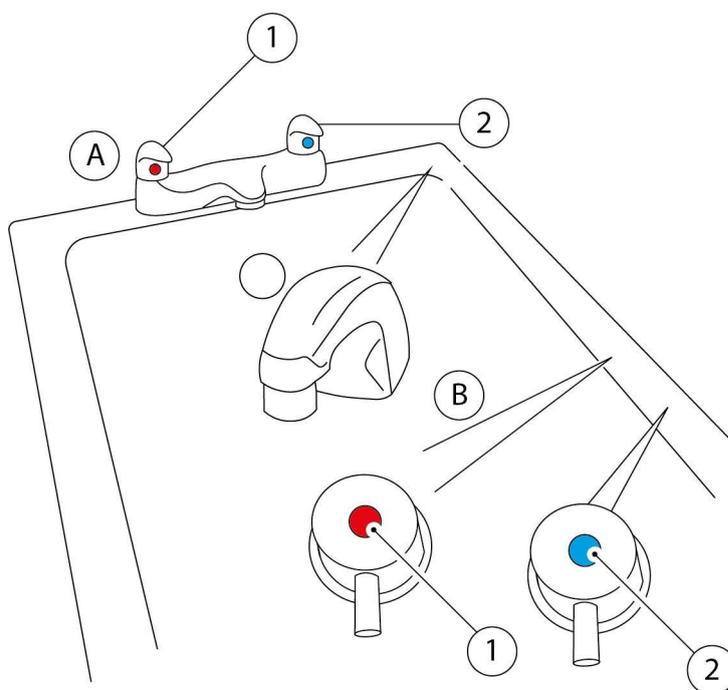


Fig 0161

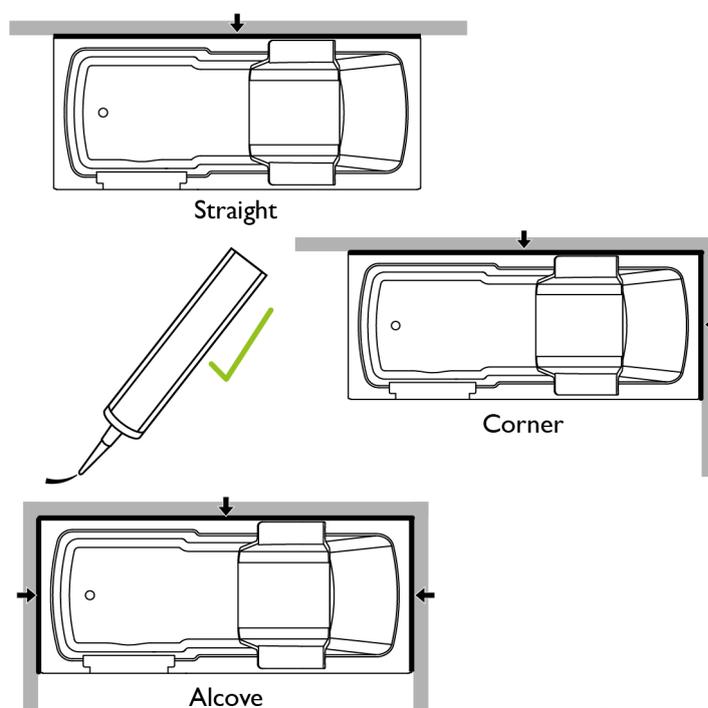


Fig 0162

baignoire et au silicone de durcir (ce qui peut prendre jusqu'à 24 heures).

74. Utiliser (le cas échéant) les équipements optionnels suivants, pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme décrit dans les sections correspondantes du manuel d'utilisation : « Option Air Spa », « Air Spa »

et « Option d'éclairage de chromathérapie », « Option d'éclairage de chromathérapie » ou « Option d'éclairage sonore ».

INSTALLER LES PANNEAUX DE LA SALLE DE BAIN



REMARQUE : Les lattes ne sont pas fournies avec la baignoire et doivent être d'origine locale. Il est recommandé d'utiliser du bois tanalisé.

Selon la configuration de votre salle de bain, 1, 2 ou 3 panneaux doivent être installés.

Pour soutenir les panneaux de la baignoire, une combinaison de lattes murales verticales et de lattes de sol doit être installée.

Les panneaux de la baignoire sont ensuite fixés au mur, aux lattes de sol et les uns aux autres.

75. Reportez-vous à la figure 0164 et à la figure 0183 au verso et déterminez quelles sont vos exigences ainsi que l'option que vous décidez de fixer les lattes de sol.

76. Coupez les lattes requises à des longueurs approximatives comme suit :

Lattes verticales murales :

- Deux 50 X 25 X 400 mm.

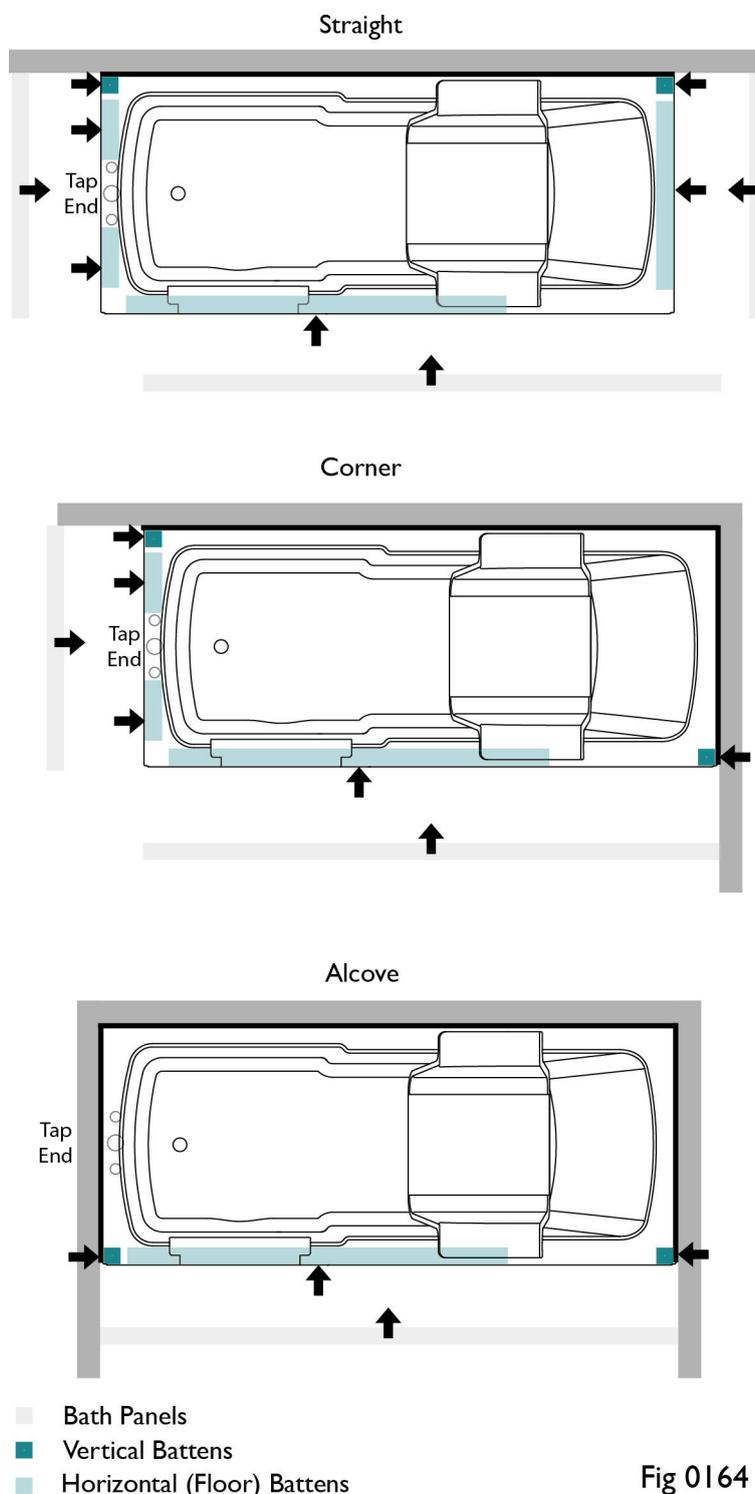



Fig 0164

Reportez-vous à la figure 0183, les panneaux de la baignoire ont un retour en bas, donc pour éviter les collisions, les lattes de sol doivent être jointes ou chanfreinées de la manière suivante :

Latte de panneau d'extrémité de plancher :

- (A) Une longueur de 50 X 25 X 500 mm et une longueur de 25 X 25 X 500 mm, jointes ensemble, avec des vis courtes, Ou :
- (B) Une longueur 50 X 50 X 500 mm, chanfreiner un bord.

Remarque : Ce qui précède s'applique à l'extrémité sans appui. Pour l'extrémité du robinet, joignez ou chanfreinez de la même manière pour obtenir deux longueurs (déterminées sur place) afin d'éviter les collisions avec la plomberie.

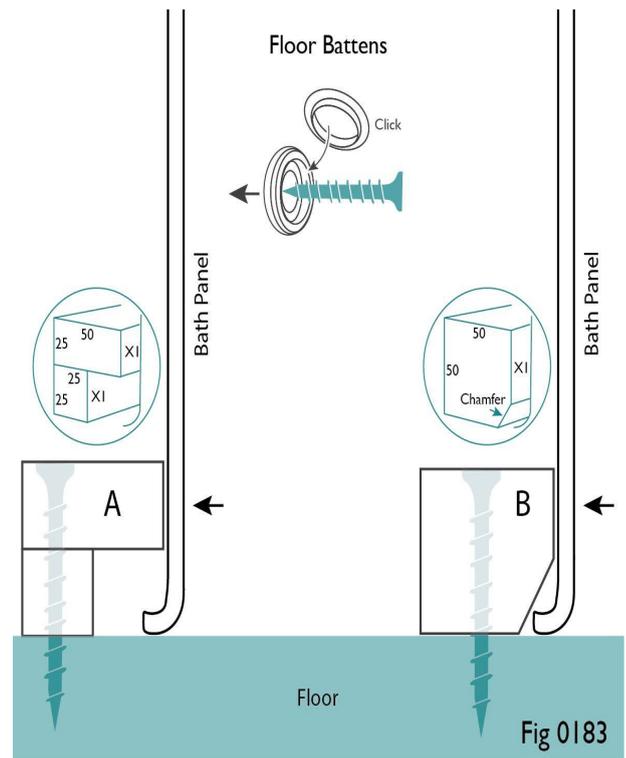

Latte du panneau avant :


- (A) Une longueur de 50 X 25 X 1000 mm et une longueur de 25 X 25 X 1000 mm réunies, avec des vis courtes, Ou :
- (B) Une longueur 50 X 50 X 1000 mm, chanfreiner un bord.

Fixation des lattes murales et de sol :

77. En référence à la figure 0174, à la figure 0183 et à la figure 0160, mesurer à l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau à bulle à partir du bord de la baignoire (1), 8 mm d'entrée, dimension (A).

78. Marquez les murs en vue de la fixation des lattes (2) préparées précédemment.

79. En utilisant la même dimension que ci-dessus et un

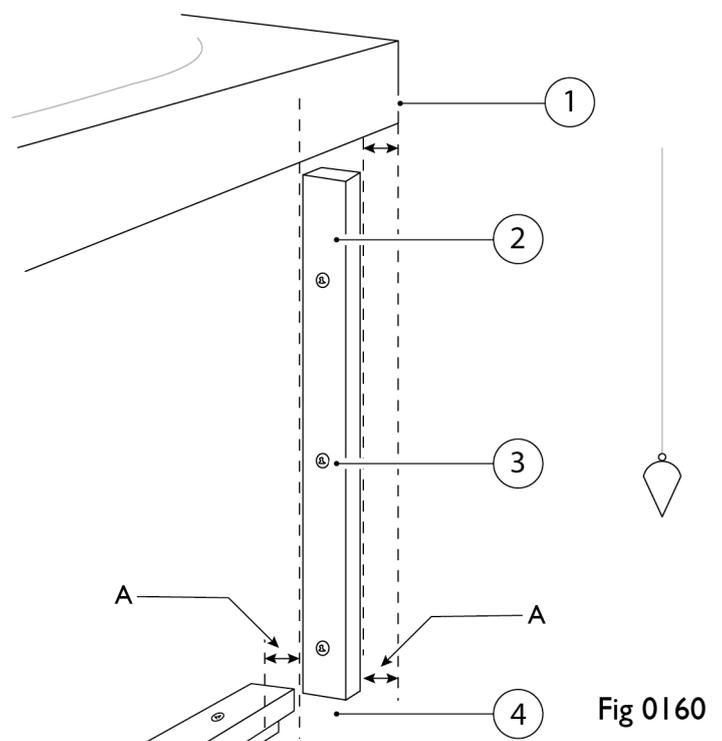

équerre d'ensemble d'ingénieurs

Marquez le sol pour indiquer le bord de latte de sol (4).

80. Fixez les lattes de mur et de sol à l'aide de vis appropriées et/ou de chevilles Rawl.

81. Offrez les panneaux vers le haut et, si nécessaire, les garnitures en conséquence, si nécessaire.



REMARQUE : Selon la configuration de votre salle de bain, certaines des étapes suivantes peuvent ne pas s'appliquer.
NE PAS utiliser de silicone pour fixer les panneaux de la baignoire.

82. Reportez-vous à la Fig 0174, installez le(s) panneau(x) d'extrémité (1) Tout d'abord, poussez les panneaux en place à l'aide des clips à ressort métalliques fixés à la baignoire pour les maintenir en position.

83. Installez le panneau avant, (2) poussez le panneau (en chevauchant les panneaux d'extrémité) en place à l'aide des clips à ressort métalliques fixés à la baignoire, pour le maintenir en position.

84. Assurez-vous que le(s) panneau(x) d'extrémité et le panneau avant sont alignés, puis procédez comme suit :

85. Lorsqu'un panneau d'extrémité est monté, percez deux avant-trous (A).

86. Fixez le(s) panneau(x) d'extrémité (A) (1) aux lattes murales à l'aide de deux vis, de rondelles et de couvercles de capuchon bombés (3), « enclenchez » les couvercles en place pour vous assurer qu'ils sont bien en place.

87. Fixez le panneau avant (2) au(x) panneau(x) d'extrémité (1) à l'aide de deux/quatre vis, de rondelles et de couvercles de capuchon bombés (3), « enclenchez » les couvercles en place pour vous assurer qu'ils sont bien en place.

88. Percez deux avant-trous (C) dans le(s) panneau(x) d'extrémité (1) et le panneau avant (2) et fixez-les à l'aide de deux vis, de rondelles et de couvercles de capuchon bombés (3), « enclenchez » les couvercles en place pour vous assurer qu'ils sont bien en place.



POINT D'ENTRETIEN : Remettez le manuel d'utilisation au client, montrez l'utilisation et la fonctionnalité de la baignoire en veillant à indiquer les caractéristiques de sécurité.

89. Nettoyez soigneusement la baignoire à l'intérieur et à l'extérieur.

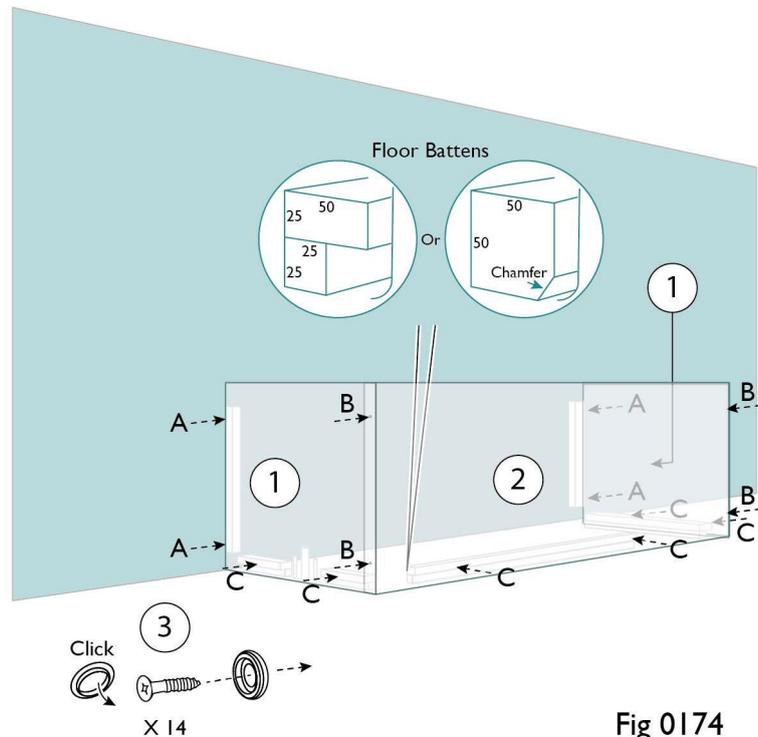


Fig 0174

Gainsborough Healthcare Group

Life enhancing bathing



Tel: 01527 400026
Email: info@accesswalkinbaths.co.uk
www.accesswalkinbaths.co.uk