



CREE fête ses 50 ans en 2025 !

INTEGRATION SENSORIELLE & SALONS D'APAISEMENT



Développer l'espace de liberté...

Pourquoi proposons-nous des aides à l'intégration sensorielle ?



L'intégration sensorielle par le mouvement apaisant.

La conception des produits Protac émane de plusieurs théories relatives à l'intégration sensorielle. Ces dernières sont basées sur ce que l'on connaît de l'interaction entre les sensations corporelles et la manière dont ces sensations affectent le comportement et la vie au quotidien.

Nous faisons appel à nos 5 sens ; nous voyons, entendons, touchons, sentons et goûtons. Selon la théorie de l'intégration sensorielle nous possédons en fait 7 sens : nous nous servons également du sens proprioceptif (le sens de la position et des limites de notre corps, ce qui est moi et ce qui n'est pas moi) et vestibulaire (équilibre).

Intuitivement, nous utilisons le mouvement pour nous procurer le retour au calme :
Si nous nous sentons tendus, nous choisissons d'aller nous promener pour nous apaiser.
Si nous sommes stressés, nous allons remuer sur notre chaise ou taper au sol avec l'un de nos pieds.
Ces deux exemples quotidiens démontrent que nous utilisons le mouvement pour nous calmer. C'est ce que nous résumerons en mouvement apaisant.

Dans la gamme PROTAC, le poids et la répartition des balles opposent une résistance permanente et « en mouvement » aux articulations et aux muscles. Notre sens tactile envoie alors un message au système nerveux, que le cerveau enregistre comme mouvement.

C'est le mouvement apaisant.

Développer l'espace de liberté

FAUTEUILS SENSIT® ET POUFS



Protac SenSit®



Protac SenSit® est un fauteuil de stimulation sensorielle qui procure une agréable sensation d'enveloppement de tout le corps. Les balles remplissant le Sensit et ses quatre ailes stimulent le sens du toucher et le sens proprioceptif par des pressions profondes et dynamiques, favorisant ainsi une meilleure conscience du corps.

- L'oreiller cervical est composé de granules pour un soutien optimal du cou.
- Le fauteuil peut être utilisé comme repère sûr dans les institutions, les salles de classe, les salles sensorielles, les centres de soins, et les hôpitaux psychiatriques.
- Il soulage les troubles mentaux et physiques et aiguise la concentration.
- Il convient aux enfants et aux adultes et profite aux personnes atteintes de TDAH, d'autisme, de troubles psychiatriques, de démence, de lésions cérébrales, de spasticité et de troubles du développement.



Les bénéfices

- ✓ Entoure l'utilisateur
- ✓ Calmant et relaxant
- ✓ Renforce le sentiment de sécurité
- ✓ Ignifuge

Coloris



Découvrez en plus !



Optez pour un deuxième pouf !

Disponible pour l'ensemble des Sensit !

Un premier pouf permet une position des jambes plus haute ce qui favorise une position assise détendue pour l'usager. Le second sera quant à lui idéal pour une position dynamique et confortable de l'aidant !

Pensez aux conditions de travail des soignants !



Nouveauté



Protac SenSit® Nature

Réf: Voir brochure



Matériel disponible en location



Coloris



BLEU MARINE


Les bénéfices en

- ✓ Utilisable à l'extérieur
- ✓ Etanche
- ✓ Housse de protection intégrée
- ✓ Taille unique

Attention :

- Ne pas laisser en extérieur si la température est inférieure à -5°C
- N'est pas ignifuge

Plus de détails ici

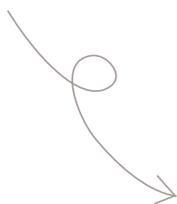

Protac SenSit® Straight

Réf. Voir brochure




Les bénéfices en

- ✓ Hauteur adaptée aux plus âgés
- ✓ Assure une posture assise confortable
- ✓ Facilite la transition assis-debout
- ✓ Ignifuge



Coloris

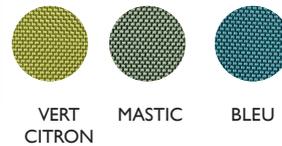

Protac SenSit® Frame

Réf. Voir brochure



S'adapte à tous les fauteuils PROTAC Sensit® INF, SUP et NATURE.

- Permet de se relever plus facilement.
- Permet de déplacer le Sensit® plus facilement.



Tutoriel de montage :



Quelles solutions préventives à destination de la psychiatrie ?




Les salons d'apaisement Wavecare peuvent être utilisés en santé mentale et permettent un meilleur bien-être. Leurs but est de permettre aux patients et au personnel d'éviter la montée du stress et l'anxiété.

Ils associent des effets lumineux et des effets sonores à la projection de films pour stimuler les sens visuels et auditifs. Les thèmes de ces chambres ont été développés dans un but de relaxation.

Nous utilisons des thèmes uniquement composés de paramètres qui ont montré des effets calmants et apaisants. Ceux-ci ont été sélectionnés spécifiquement à partir de paramètres scientifiquement prouvés, dédiés au soutien des procédures médicales et auxquels sont ajoutées des compétences artistiques.

La musique et les sons sont composés pour permettre la relaxation toutes cultures, tous individus et diagnostics confondus ! Cet équipement permet de réduire fortement le recours à la contention et à la médication forcée.

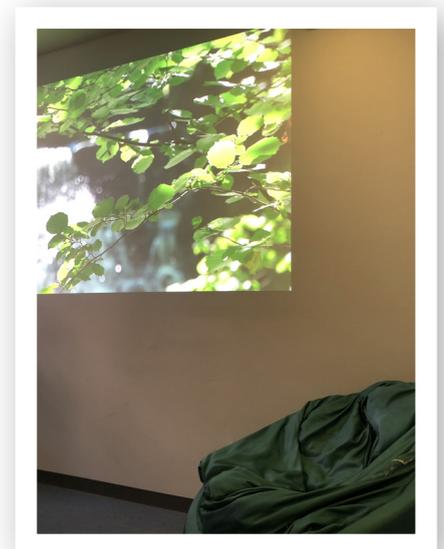

Développer l'espace de liberté

SALONS D'APAISEMENT



Raison d'être

Les salons d'apaisement combinent deux types d'aides à l'intégration sensorielle. Les balles des produits Protac, combinées aux effets relaxants de la musique, de la lumière et des vidéos conçues en ambiances naturelles, réduisent le stress et l'anxiété des patients et du personnel.

Les avantages :

- ✓ Une solution simple avec une interface intuitive
- ✓ Polyvalent
- ✓ Design
- ✓ Génère des économies de personnel et de médicaments
- ✓ Apaisement du personnel et des soignants
- ✓ Une solution innovante et efficace



Notre concept :



Les atouts

- ✓ Une installation sur mesure du sol au plafond !
- ✓ Un poste de contrôle depuis un seul endroit : la tablette wavecare, fixée au mur
- ✓ Peut être utilisé pour l'évaluation (par ex. concentration), la relaxation, la désescalade, la stimulation, la prévention...
- ✓ Une installation sobre, discrète
- ✓ Permet d'utiliser moins de moyens de contention, ce qui signifie un personnel plus apaisé et un meilleur bien-être des patients et soignants !



Module Wavecare Mobile

Les établissements n'ont pas toujours l'espace nécessaire pour implémenter un salon d'apaisement. C'est dans ce but qu'a été développé le Module Wavecare Mobile. Cette station mobile reprend les effets lumineux et sonores d'un salon d'apaisement, mais c'est à l'aide d'un écran que les thèmes calmants et apaisants sont diffusés.



Les atouts :

- ✓ Facilement déplaçable d'une salle à l'autre
- ✓ Flexibilité d'utilisation
- ✓ Boîtier de commande & écran TV résistants
- ✓ Compact : 1320x1500x1659 (LxIxH)
- ✓ Câble d'alimentation sectionnable
- ✓ Produit "Plug & Play", prêt à être utilisé dès réception !
- ✓ Écran fixe et solidaire du module



Contrats d'assistance annuelle

Nos deux contrats d'assistance annuelle permettent une utilisation et un suivi optimal des salons d'apaisement Wavecare.

Ces contrats, renouvelables annuellement et portant sur un engagement minimal de 3 ans peuvent proposer :

Contrat Basic

- ✓ Mise à jour et assistance en ligne



- ✓ Formation et intervention



- ✓ Statistiques



Contrat Premium

Toutes les options du contrat Basic et en plus:

- ✓ 3 Nouveaux Thèmes



- ✓ Accès à Wavecare Me app



Découvrez nos deux contrats en détail sur notre brochure

COUVERTURES DE STIMULATION SENSORIELLE PROTAC BALL BLANKET®



Protac Ball Blanket®

Couverture de stimulation sensorielle

POURQUOI UNE BALL BLANKET ?

Protac Ball Blanket® est la couverture originale de stimulation sensorielle avec de grandes balles en plastique, qui procure une agréable sensation d'enveloppement pour tout le corps. Les balles stimulent le sens du toucher et les articulations grâce à des pressions profondes et dynamiques, favorisant ainsi une meilleure conscience du corps. Cela aide l'utilisateur à s'endormir plus facilement.


Il a été démontré par des recherches que la Protac Ball Blanket® atténue les problèmes de sommeil et augmente le bien-être quotidien.

Protac Ball Blanket® convient aux personnes souffrant de troubles physiques, de TDAH, d'autisme, d'anxiété, de troubles psychiatriques, de démence, de troubles du développement et/ou de lésions cérébrales. La Protac Ball Blanket® contient des balles de 5 cm spécifiques, qui aident à maintenir les effets bénéfiques de la couverture plus longtemps.

De plus, les couvertures sont des dispositifs médicaux de classe I avec un marquage CE.

Les bénéfices

- ✓ Stimule la proprioception
- ✓ Relaxe, apaise
- ✓ Améliore le sommeil
- ✓ Donne de l'énergie pendant la journée

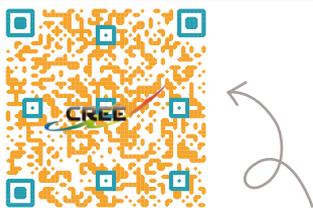

Retrouvez toutes les déclinaisons de nos couvertures de stimulation sensorielle




Ball Blanket
COMBI : 4.5 TOG

Ball Blanket
COMBI & FLEXIBLE : 2.9 TOG

Ball Blanket
COMBI : 1.6 TOG

Retrouvez l'étude des effets bénéfiques des Protac Ball Blankets® auprès des enfants souffrant de TDAH

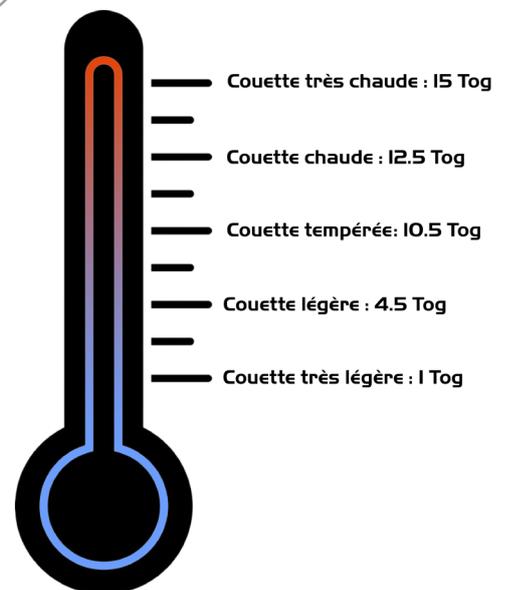

TOG : Indice d'isolation thermique





Protac Ball Blanket® FLEXIBLE

Couverture de stimulation sensorielle avec fermeture éclair et sacs amovibles.

Balles de 50mm (adultes) ou 38mm (junior)



Les balles sont divisées en compartiments afin qu'elles puissent bouger et fournir une stimulation sensorielle dynamique.

La couverture flexible est particulièrement adaptée aux personnes qui ont des difficultés à prendre conscience de leur corps et à garder leur corps au repos.

MODELES FLEXIBLES ADULTES

INIFUGEE OUI / NON	POIDS	DIMENSIONS CM	REFERENCE
OUI	7 KG	200X140	30810
NON	7 KG	200X140	30802
OUI	10KG	200X140	30814
NON	10KG	200X140	30804

MODELES FLEXIBLES JUNIORS

INIFUGEE OUI / NON	POIDS	DIMENSIONS CM	REFERENCE
OUI	3.5 KG	100X140	30808
NON	3.5 KG	100X140	30800



Protac Ball Blanket® GRANULATE

MODELES GRANULES + BALLEES

INIFUGEE OUI / NON	POIDS	DIMENSIONS CM	REFERENCE
OUI	5 KG	200X140	30748-5
NON	5 KG	200X140	30744-5



Protac Ball Blanket® Granulate a un rembourrage constitué de polypropylène et de balles en EVC de 15mm.

Ce modèle convient particulièrement aux personnes souffrant de troubles cognitifs (démence, troubles mentaux, etc) ou souffrant de douleurs chroniques.



Protac Ball Blanket® CALM



Couverture de stimulation sensorielle avec balles organisées en colonnes.

Balles de 38mm. Les tailles adultes peuvent être séparées en 3 parties et les juniors en 2 parties, ce qui facilite leur nettoyage en machine. Les balles sont cousues en lignes, de sorte qu'elles s'emmailotent plus près du corps et fournissent une stimulation sensorielle plus apaisante et uniforme.

La couverture Calm convient particulièrement aux personnes ayant une hypersensibilité tactile, une sensibilité sonore extrême ou des personnes trop facilement surstimulées.

MODELES CALM ADULTES

INIFUGEE OUI / NON	POIDS	DIMENSIONS CM	REFERENCE
OUI	4 KG	200X140	30834
NON	4 KG	200X140	30826
OUI	7 KG	200X140	30836
NON	7 KG	200X140	30828
OUI	10 KG	200X140	30838
NON	10 KG	200X140	30830



MODELES CALM JUNIORS

INIFUGEE OUI / NON	POIDS	DIMENSIONS CM	REFERENCE
OUI	3.5 KG	100X140	30832
NON	3.5 KG	100X140	30824

Retrouvez toutes nos aides sensorielles
sur notre site :

www.cree.fr



Développer l'espace de liberté



NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE DEPUIS 50 ANS pour vous accompagner dans votre projet

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site
relatifs à nos autres domaines d'interventions :

www.cree.fr

ou à consulter les livrets CREE

- **Contrôle d'Environnement**
- **Aménagement des Logements**
- **Prévention des Escarres**
- **Positionnement et Mobilité**
- **Collectivités et Rééducation**



50

CREE fête ses 50 ans en 2025 !

• Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l'objectif premier est votre satisfaction.
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appelant le standard au : **04 72 24 08 99**.

• Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d'utilisation du matériel pour le client :
Prêts de matériel, assistance aux démonstrations et essai de produits, aide à l'élaboration de cahiers des charges en équipement domotique et sanitaire, mises en service, SAV... sont autant de compétences maîtrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

Service Accueil
Annabelle PATRIER
cree@cree.fr
04 72 24 08 99

Devis
Nathalie MAYAUD
n.mayaud@cree.fr
04 72 24 19 81

Commandes
David ESPEITTE
commandes@cree.fr

Livraisons
Ludovic DUBOS
l.dubos@cree.fr

SAV
Youssef CHERID
sav@cree.fr
Ligne d'assistance technique :

0 899 493 251 Service 0,60 €/min
+ prix appel